


Cutimed® Sorbact®

Bacteriënbindend wondverband

**Cutimed®
Sorbact®**


bindt bacteriën,
zo help je antimicrobiële
resistentie te
voorkomen

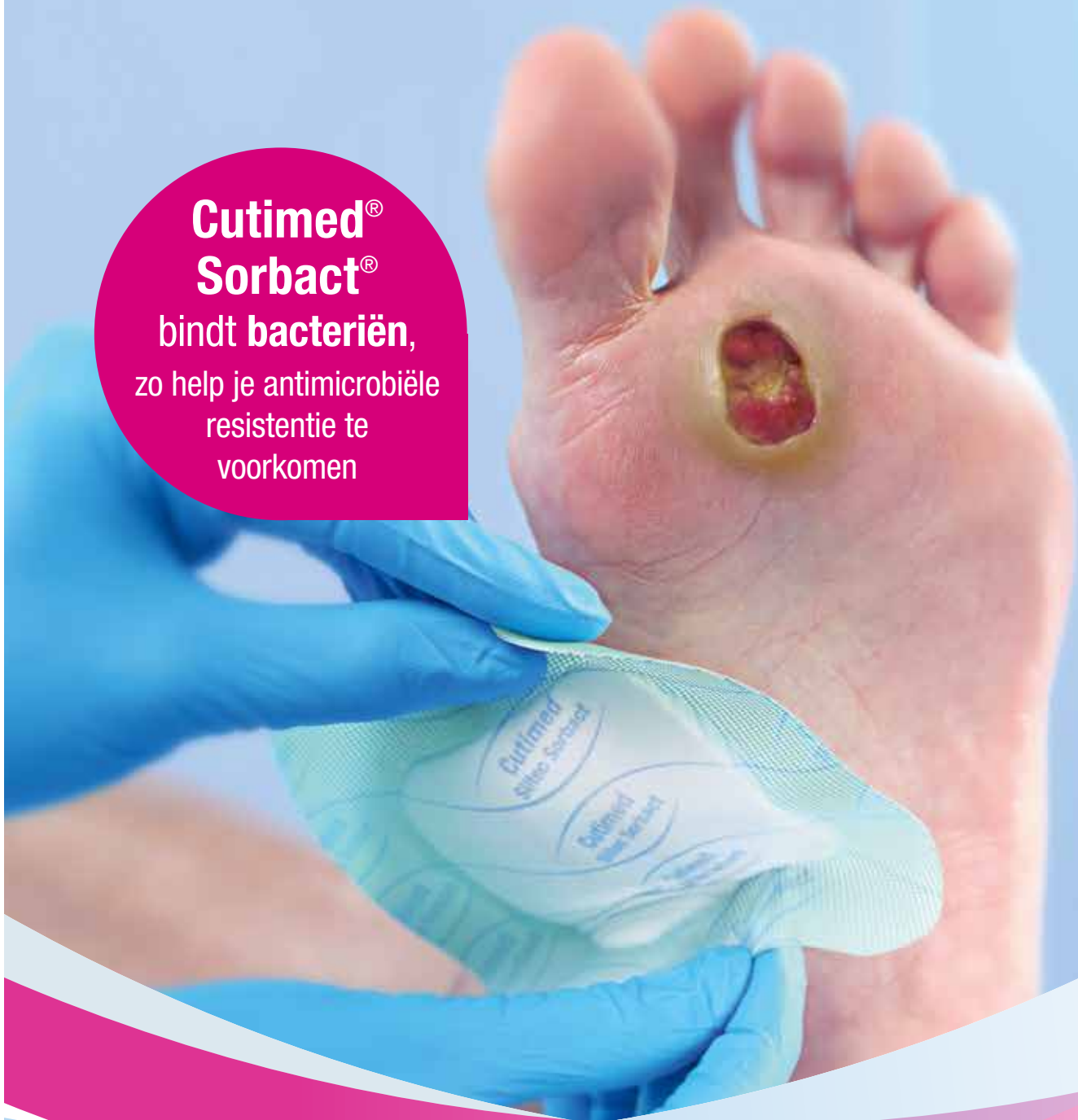

Cutimed®





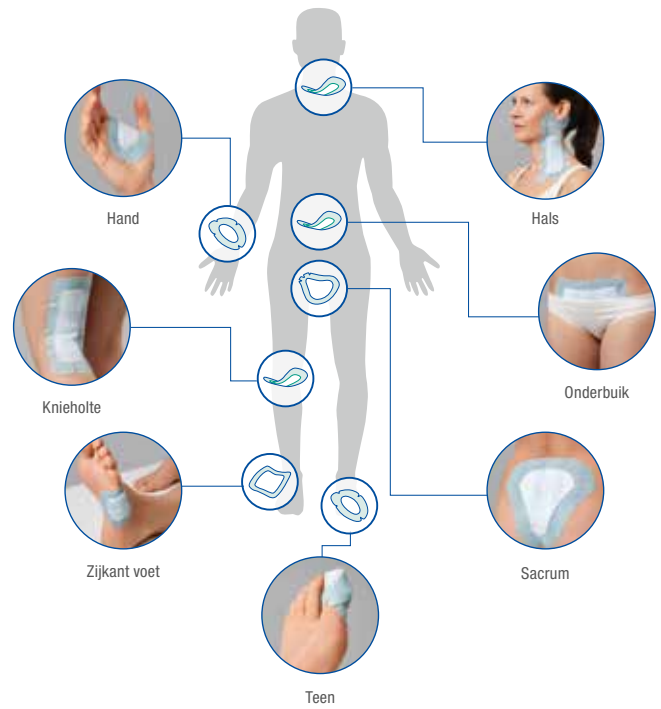


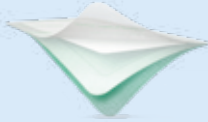




Uniek en eenvoudig in gebruik

Door te kiezen voor een speciale vorm of door de borderrand in te knippen (knip niet in het schuim) kan **Cutimed® Siltec® Sorbact®** voor alle lichaamsdelen worden gebruikt, zelfs op de anatomisch meest uitdagende locaties.



Compleet assortiment voor infectie management

Mate wondvocht

				
 oppervlakkige wonden		 Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	 Cutimed® Sorbact® absorberend wondverband	 Cutimed® Sorbion® Sorbact®
 oppervlakkige en diepe wonden	 Cutimed® Sorbact® gel*	 Cutimed® Sorbact® gaasstroken	 Cutimed® Sorbact® kompres	

* Bevordert autolytisch debridement in wonden met fibrineus (geel) beslag en/of necrose.

Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. Het is tijd om voor **groen** te gaan!

Vanwege het **puur natuurkundige werkingsmechanisme** bindt en verwijdert **Cutimed® Sorbact®** bacteriën en schimmels zonder het vrijkomen van antibacterieel werkende stoffen. De werkzaamheid is gebaseerd op **hydrofobe interactie**. Cutimed Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. **Met iedere verbandwissel worden de gebonden bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd.** Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed® Sorbact®. **Samen kunnen we infectie-management veiliger maken in elk opzicht.**

Makkelijk

Bindt bacteriën en schimmels

Veilig

Geen contra-indicaties bekend

Bewezen klinische resultaten*


Voor meer informatie over **Cutimed® Sorbact®**'s puur natuurkundig werkingsmechanisme, bezoek ons **Cutimed®** YouTube-kanaal:




* Demonstrated ability to reduce bacterial burdens in critically colonized wounds up to 73%¹

¹ Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

Cutimed® Sorbact® bindt puur natuurkundig bacteriën en schimmels veilig aan zich

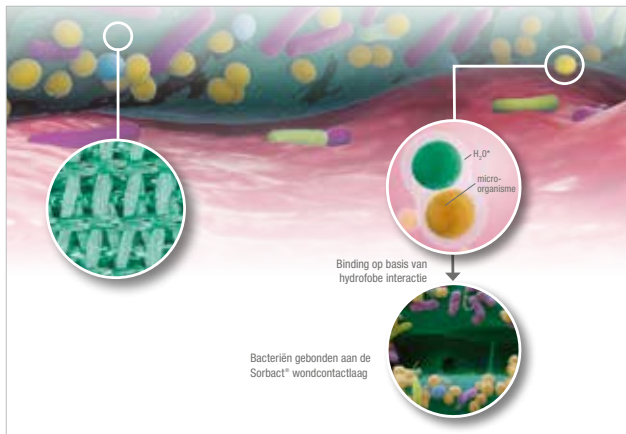

Een gekoloniseerde, geïnfecteerde wond

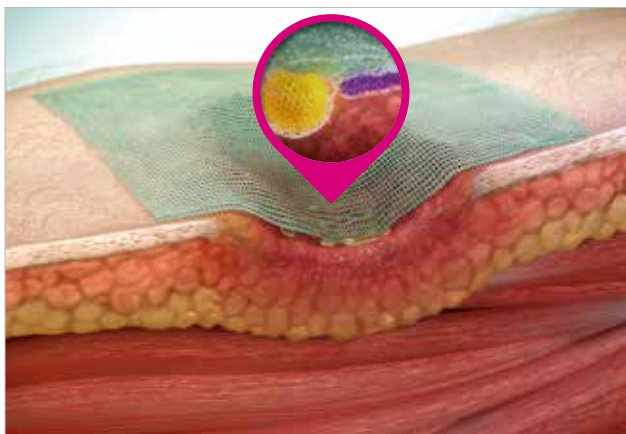

Cutimed® Sorbact® wordt rechtstreeks toegepast op de wond. Bacteriën en schimmels worden gebonden aan de **Sorbact®** wondcontactlaag. (Gebruik in droge wonden Cutimed Sorbact gel)



Bacteriën en schimmels worden verwijderd met **elke verbandwissel**

Cutimed® Sorbact®		
Werkingsmechanisme	Eigenschappen	Voordelen
Puur natuurlijk werkingsmechanisme (Hydrofobe interactie)	Er komen geen antibacterieel werkende stoffen vrij	Geen verstoring van het normale genezingsproces
	Er komen geen extra endotoxinen vrij ¹	Verkleint de kans op inflammatoire reactie en vertraging van de wondgenezing ²
	Geen opbouw van resistentiemechanisme bekend	Kan het risico op het genereren van resistente bacteriestammen helpen te verlagen

¹ As shown in vitro: Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

² Ovington L. Bacterial toxins and wound healing. Ostomy Wound Manage. 2003 Jul;49(7A Suppl):8-12. Review.



Bindt veilig bacteriën en schimmels


De effectiviteit van **Cutimed® Sorbact®** is gebaseerd op een puur natuurkundig werkingsmechanisme. Dit biedt vele voordelen, die uw dagelijkse werk veilig maken:

- Geen contra-indicaties bekend*
- Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter in de wond
- Laag risico op allergieën
- Geschikt voor langdurige behandeling



* Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen.

Cutimed® Sorbact® biedt een compleet assortiment voor lokaal infectie management

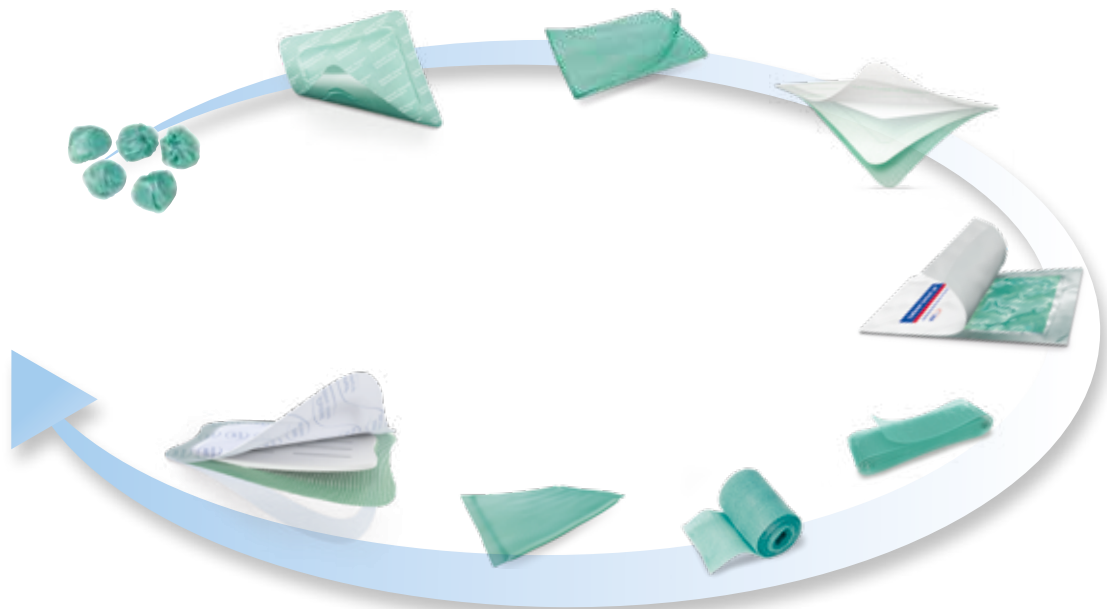


Altijd een passende oplossing voor elk type wond

1 Kies **Cutimed® Sorbact®** voor infectie management^{1,2}

2 Makkelijk **in gebruik**


3 Altijd veilig inzetbaar bij **acute en complex genezende wonden**, geen contra-indicaties bekend

4 Te gebruiken bij **oppervlakkige en diepe wonden die droog, vochtig of (zeer) nat zijn**

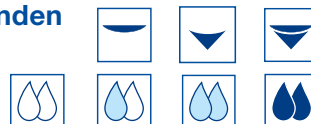

¹ Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbonyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

² Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

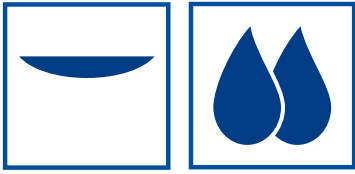

Cutimed® Sorbion® Sorbact® krachtig exsudaat- management

Cutimed® Sorbion® Sorbact® zorgt voor veilig infectie-management en kan tegelijkertijd zeer grote hoeveelheden wondvocht absorberen door de superabsorberende kern.

Verhoogd patiëntcomfort
doordat de bovenlaag
doorlekken voorkomt

**Uitstekend exsudaat-
management** door
superabsorberende kern,
die zelfs onder compressie
wondvocht vasthoudt

50%


MEER
ABSORPTIECAPACITEIT*

**Optimale distributie van
wondvocht** door non-woven laag

Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact® wondcontactlaag




* In comparison to competitive super-absorbers – data on file.

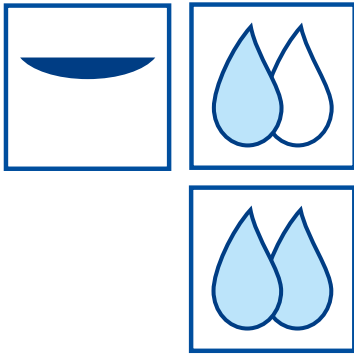

Cutimed® Siltec® Sorbact® bewezen kwaliteit - geen compromissen

Cutimed® Siltec® Sorbact® biedt de voordelen van infectie- en exsudaatmanagement door een bacteriënbindende Sorbact® wondcontactlaag te combineren met het innovatieve **Cutimed® Siltec®** schuimverband. Het is geschikt om de bacteriële belasting in wonden met matig tot veel wondvocht te beheersen.

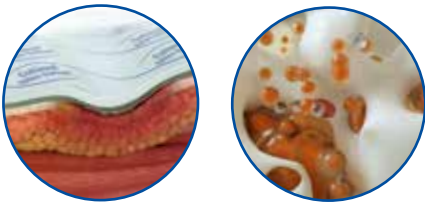

Beschermt wondranden
met verticale absorptie door
polyurethaan schuim

**Ideale genezings-
voorwaarden** dankzij
vochtregulerende zeer
ademende folie




**Huidvriendelijke
fixatie** door zelfklevende
siliconen border

Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact® wondcontactlaag

**Verhoogde flexibiliteit
van absorptiecapaciteit**
dankzij superabsorberende
hot-melt stroken



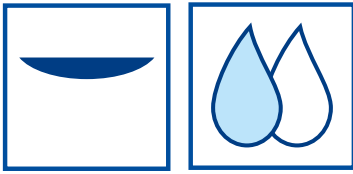

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B stimuleert autolytisch debridement

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B voor infectiemanagement en stimuleren van autolytisch debridement van fibrineus beslag en necrotisch weefsel.

**3-IN-1
OPLOSSING**

Vereenvoudigt de behandeling

door stimuleren autolytisch debridement, exsudaat- en infectiemanagement te combineren

Stimuleert autolytisch debridement

door de hydropolymeerkern (gelmatrix)


Behandelt infecties

dankzij de effectieve Sorbact® wondcontactlaag



Ondersteunt patiënt-mobilisatie

dankzij de veilige fixatie met een hydrogel border

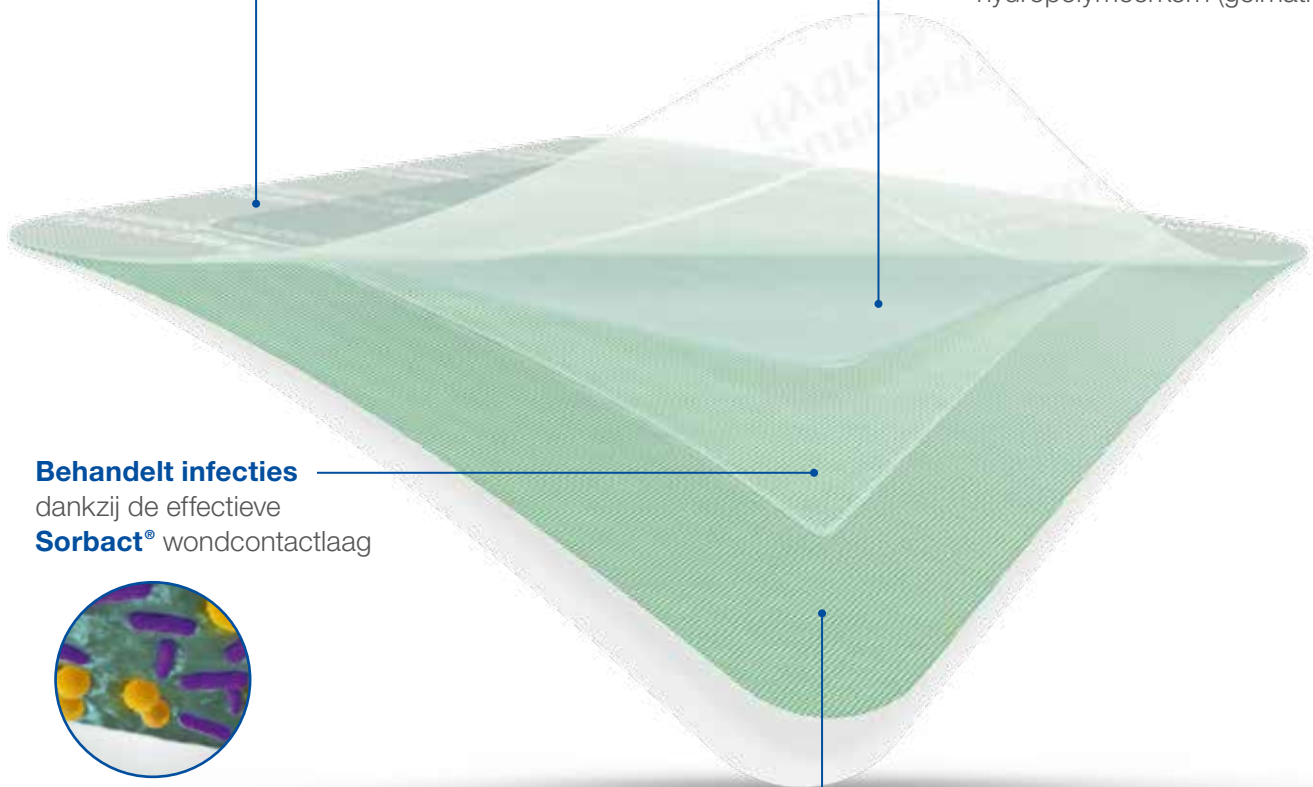

Productoverzicht

	Artikel nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	
Cutimed® Sorbact® absorberend wondverband Bacteriënbindend absorberend wondverband	72161-01	7 x 9 cm		5	16	14982269	
	72162-01	10 x 10 cm		5	16	14982277	
	72163-00	10 x 20 cm		20	2	14982234	
Cutimed® Sorbact® kompres Bacteriënbindend (acetaat) kompres	72164-01	4 x 6 cm		5	24	14982285	
	72165-01	7 x 9 cm		5	24	14982293	
Cutimed® Sorbact® gaasstrook Bacteriënbindende (katoen) gaasstrook	72166-00	2 x 50 cm		20	6	14982242	
	72167-00	5 x 200 cm		10	6	14982250	
Cutimed® Sorbact® depper Bacteriënbindende depper	72168-00	deppers		70 (14 x 5)	6	14982412	
Cutimed® Sorbact® gel Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel	72611-00	7,5 x 7,5 cm		10	36	15299201	
	72611-01	7,5 x 15 cm		10	20	15299228	
	72611-16	15 x 20 cm		5	8	16860853	
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (Border) Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand	79933-00	7 x 8,5 cm	5 x 6,5 cm	10	10	15833410	
	79933-02	14 x 14 cm	10 x 10 cm	10	10	15833445	
	79933-03	19 x 19 cm	15 x 15 cm	10	10	15833488	
	79933-04	14 x 24 cm	10 x 20 cm	10	10	15833453	
Cutimed® Siltec® Sorbact® Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border	73251-00	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	10	10	15802205	
	73251-14	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	10	10	16595912	
	73251-01	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	10	10	15802213	
	73251-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	10	15802221	
	73251-03	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	5	10	15802248	
	73251-04	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	5	10	15802256	
	ovaal	73251-18	7 x 10 cm	3 x 6 cm	10	10	16595920
	sacrum	73251-05	17,5 x 17,5 cm		5	10	25802264
sacrum	73251-06	23 x 23 cm		5	10	15802272	
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag	72698-00	10 x 10 cm		10	12	16187172	
	72698-01	10 x 20 cm		10	6	16187180	
	72698-02	20 x 20 cm		10	4	16187199	
	72698-03	20 x 30 cm		10	4	16187202	

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Geen tot weinig wondvocht
- Weinig tot matig wondvocht
- Matig tot veel wondvocht
- Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden