

PRODUCTOVERZICHT

Bestelinformatie – Cutimed® Sorbion®			
Cutimed® Sorbion® Sachet S	Artikelnummer	Inhoud per doos	
7.5 x 7.5 cm	7323200 7323201	10 25	
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7323206 7323207	10 25	
10 x 10 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7323209 7323210	10 25	
20 x 10 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7323212 7323213	10 25	
15 x 15 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7323215 7323216	10 25	
20 x 20 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7323218	10	
30 x 20 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	Artikelnummer	Inhoud per doos	
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	7323701	10	
ø 8 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	7323703	10	
ø 14 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage	Artikelnummer	Inhoud per doos	
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage	7324100	10	
10 x 10 cm			
Cutimed® Sorbion® Sachet XL	Artikelnummer	Inhoud per doos	
Cutimed® Sorbion® Sachet XL	7324000	10	
45 x 25 cm			
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	Artikelnummer	Inhoud per doos	
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	72698-00	10	
10 x 10 cm			
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	72698-01	10	
10 x 20 cm			
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	72698-02	10	
20 x 20 cm			
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	72698-03	10	
20 x 30 cm			

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Geen tot weinig wondvocht
- Weinig tot matig wondvocht
- Matig tot veel wondvocht
- Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

WERKZAAMHEID GEBASEERD OP BEWIJS UIT DE PRAKTIJK



Chronische veneuze aandoening Disease



Veneuze beenzweer

Geïntegreerde therapie oplossing



Cutimed® Sorbact®



Cutimed® Siltec



Cutimed® Sorbion®

Geavanceerde wondverzorging



JOBST® SoftFit



JOBST® Compi2



JOBST® UlcerCare

Compressie

Cutimed® Sorbion®

Wondzorg doe je samen.

Een super-absorberend verband dat elke situatie aankan?

Cutimed® Sorbion®

BSN MEDICAL EN SORBION®

STERKE PARTNERS OP HET GEBIED VAN WONDVERZORGING

BSN medical kan u nog beter ondersteunen met een combinatie van kennis en integrale therapieoplossingen. De reden: met ingang van 1 januari 2015 zijn de krachten van BSN medical en Sorbion gebundeld. BSN medical en Sorbion zijn innovatieve fabrikanten die zich richten op de ontwikkeling, productie en distributie van moderne wondverzorgingsproducten.

We delen de ambitie om de kwaliteit van leven voor patiënten met acute of chronische wonden te verbeteren en daarbij te voldoen aan de klinische en

economische eisen die aan de moderne wondverzorging gesteld worden. BSN medical en Sorbion bieden oplossingen voor de huidige en toekomstige zorgverlening – lokaal en afgestemd op de behoeften van zorgverleners en patiënten. Onze producten bevorderen een effectieve wondverzorging in alle fasen van het genezingsproces.

Neem voor meer informatie contact op met ons, we horen graag van u!




Indicaties

Cutimed Sorbion Sorbact

is bedoeld voor het voorkomen en bestrijden van infecties bij gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde oppervlakkige wonden met veel tot zeer veel wondvocht

Bijvoorbeeld:

- veneuze ulcera;
- diabetische ulcera;
- postoperatieve wonden;
- traumatische wonden.

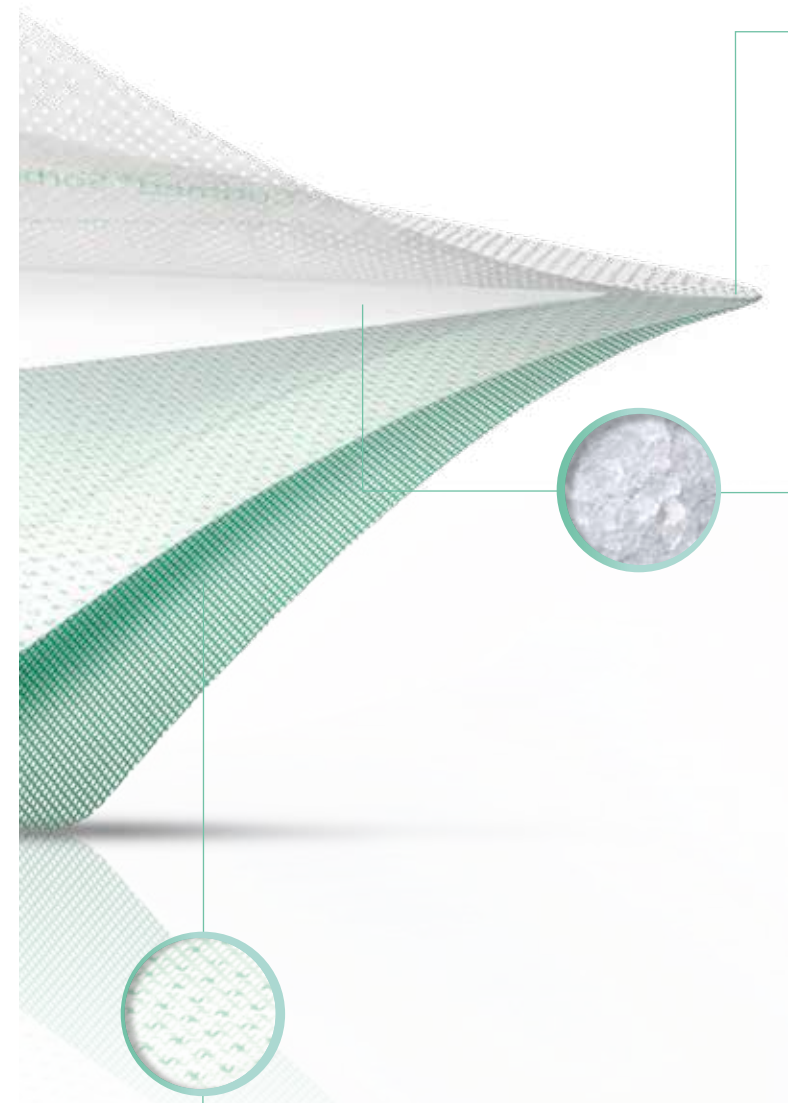

RONDE RANDEN

- Extra patiëntcomfort

SUPERABSORBERENDE KERN

- Absorbeert en houdt grote hoeveelheden wondvocht vast. Ook onder compressie
- ▶ Vermindert het risico op verweking


















NON-WOVEN LAAG

- Optimale opname van het wondvocht door het verband
- ▶ Voorkomt dat wondvocht terugloopt naar het wondbed
- ▶ Vermindert het risico op verweking

EEN CUTIMED® OPLOSSING

VOOR ELKE FASE VAN DE WONDGENEZING

		Fase van de wondgenezing	
		Necrotische wond Geïnfecteerde wond Wond met geel beslag	Granulerende wond Wond met geel beslag
Hoeveelheid wondvocht		Cutimed® Sorbact® gel* 	Cutimed® Siltec L 
		Cutimed® Sorbact® kompres* 	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B  Cutimed® Siltec  Cutimed® Siltec B 
		Cutimed® Sorbact® gaasstrook* 	Cutimed® Siltec Sorbact®  Cutimed® Siltec Plus 
		Cutimed® Sorbion® Sorbact® 	Cutimed® Sorbion® Sachet 

* Cutimed Sorbact gel, kompres, gaasstroken afdekken met een secundair verband

Diepe wonden indien nodig opvullen met Cutimed Sorbact gaasstrook/ kompres, Cutimed Alginate of Cutimed Cavity

CUTIMED® SORBION®

CUTIMED SORBION IS EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT SUPER-ABSORBERENDE VERBANDEN WAARMEE U ELKE SITUATIE AANKAN

Het Cutimed Sorbion assortiment bestaat uit twee soorten oplossingen: Cutimed Sorbion Sachet en Cutimed Sorbion Sorbact.

Cutimed Sorbion Sachet, met Hydration Response Technology, biedt superieure en bewezen absorptiecapaciteit voor een betrouwbare wondbehandeling bij wonden met veel tot zeer veel wondvocht. Ook onder compressie.

Cutimed Sorbion Sorbact, biedt een unieke oplossing voor het voorkomen of behandelen van geïnfecteerde wonden met veel tot zeer veel wondvocht. Sorbact technologie bindt bacteriën en verwijdert deze uit de wond. In combinatie met super absorberende eigenschappen zorgt dit unieke verband voor betrouwbaar exsudaat management en effectieve infectiebestrijding.



CUTIMED® SORBION® SACHET

UNIEKE HYPOALLERGENE SUPERABSORBERENDE VERBANDEN MET SUPERIEURE EN BEWEZEN ABSORPTIECAPACITEIT DOOR 'HYDRATION RESPONSE TECHNOLOGY'

Hydration Response Technology bestaat uit drie componenten die optimaal samenwerken:

① gelvormende polymeren, ② absorberende cellulosevezels en een ③ polypropyleen wondcontactlaag.

Cutimed Sorbion Sachet producten hebben een superabsorberende gelvormende kern van cellulosevezels en gelvormende deeltjes (polymeren). De gelerende kern vormt zich naar het wondbed waardoor een vochtig wondmilieu wordt gehandhaafd. Hierdoor ondersteunt Cutimed Sorbion Sachet het autolytisch debridement. De kern neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht verticaal op en houdt deze vast. Door uitstekende retentie wordt verweking van de wondranden en lekkage voorkomen.

Micro-organismen en onaangename geuren worden ingesloten.


De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel. Het wondbed wordt zo in optimale conditie voor wondgenezing gebracht.

De kern van gelvormende polymeren en cellulosevezels is mechanisch gebonden waardoor geen lijmen, bind- en kleefmiddelen nodig zijn. Ook de zachte, flexibele wondcontactlaag wordt met een ultrasone techniek geseald en zonder bind- of kleefmiddelen vervaardigd. Dit unieke ontwerp maakt Cutimed Sorbion Sachet hypoallergeen.




① Gelvormende polymeren

② Absorberende cellulosevezels

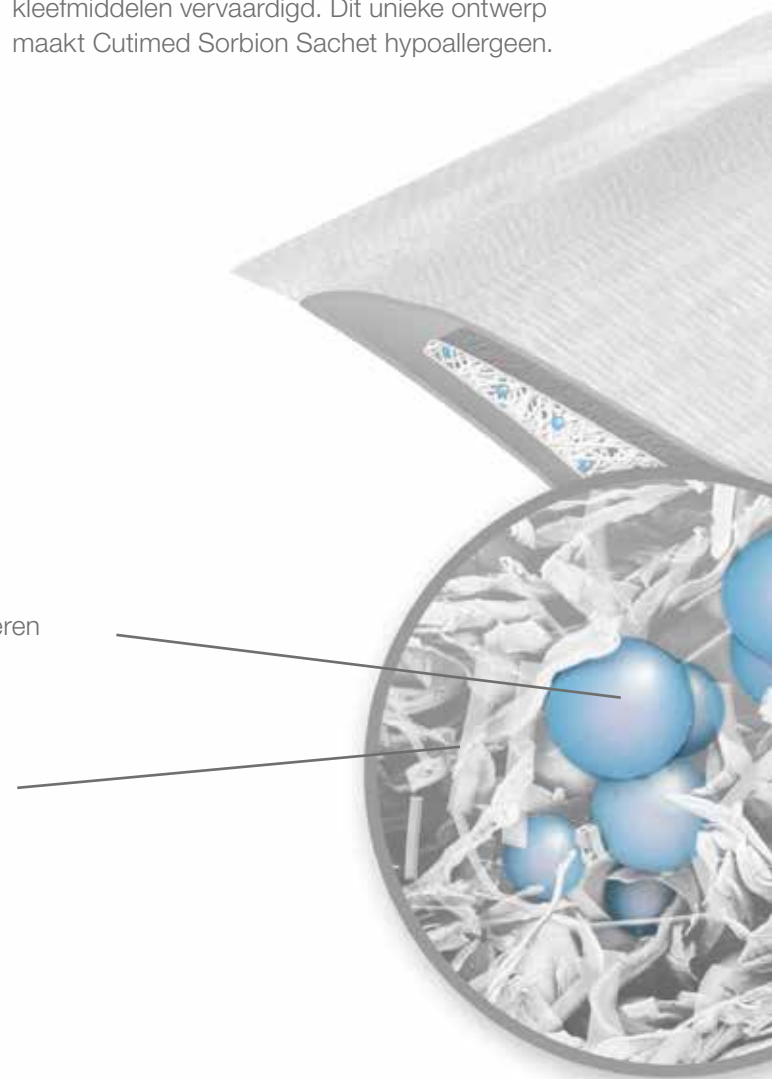

③ Wondcontactlaag van hypoallergeen polypropyleen,
met ultrasone techniek afgedicht, zonder bind- of kleefmiddelen

De gelvormende polymeren zijn
mechanisch gebonden aan de
cellulosevezels, zonder gebruik
van bind- of kleefmiddelen ①, ②.

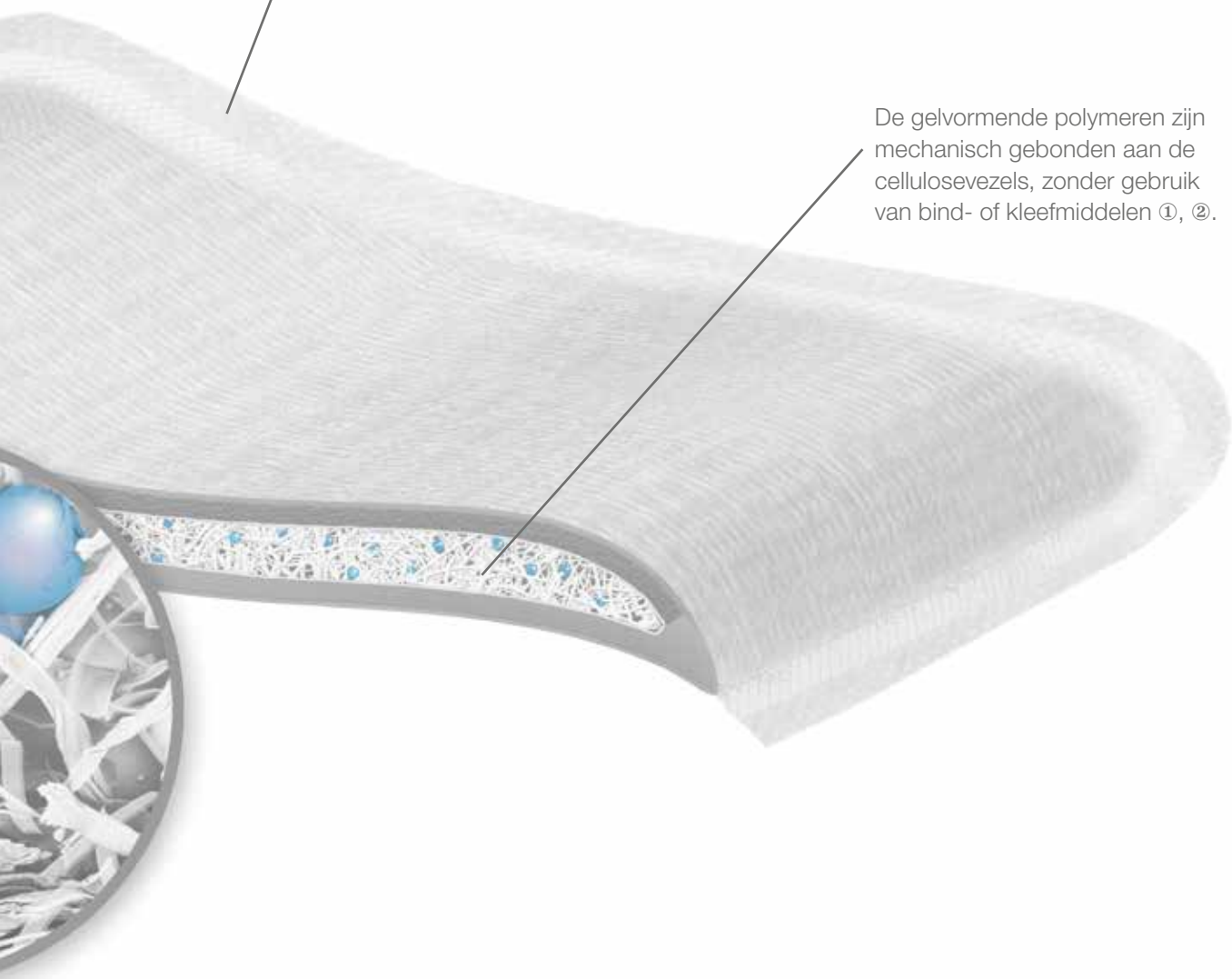

CUTIMED® SORBION® SACHET S

ABSORBEERT EN HOUDT VAST

Cutimed Sorbion Sachet S is een veelzijdig hypoallergeen verband, voor wonden die veel tot extreem veel wondvocht afgeven:

- Neemt wondvocht op en houdt het vast
- Verwijdert op zachte wijze fibreus beslag en necrotisch weefsel
- Bacteriën en onaangename geuren worden permanent ingesloten
- Handhaaft een vochtig wondmilieu



CUTIMED® SORBION® SACHET S ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

ACTIEF EXSUDAAT MANAGEMENT

- Uitstekende absorptie van zeer veel wondvocht
- Houdt geabsorbeerd wondvocht vast, ook onder compressie
- Zorgt voor een vochtig wondmilieu door gelvorming
- Voorkomt maceratie en lekkage

WONDBED PREPARATIE

- Vermindert fibrineus necrotisch weefsel (zacht debridement)
- Verlaagt het risico van kruisbesmetting doordat bacteriën worden vastgehouden

DRAAGCOMFORT EN VEILIGHEID

- Onaangename geuren worden ingesloten
- Laag risico van huidirritatie en sensibilisatie

Indicaties

Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt voor sterk tot zeer sterk exsuderende wonden, waaronder:

- chronische wonden zoals bijvoorbeeld veneuze of diabetische ulcera of decubitus;
- acute wonden met secundaire wondgenezing;
- oncologische ulcera;
- postoperatieve wonden.

CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR

VOOR ANATOMISCH UITDAGENDE TOEPASSINGEN

Cutimed Sorbion Sachet Multi Star combineert de voordelen van Cutimed Sorbion Sachet S met een flexibele vorm. Dankzij de flexibele vorm zijn meer toepassingen mogelijk voor bijvoorbeeld hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.

Indicaties


Cutimed Sorbion Sachet Multi Star

is geschikt voor sterk tot zeer sterk exsuderende wonden, waaronder:

- chronische wonden zoals bijvoorbeeld veneuze of diabetische ulcera of decubitus;
- acute wonden met secundaire wondgenezing;
- oncologische ulcera;
- postoperatieve wonden;
- anatomisch uitdagende lichaamsdelen.



TOEPASSING

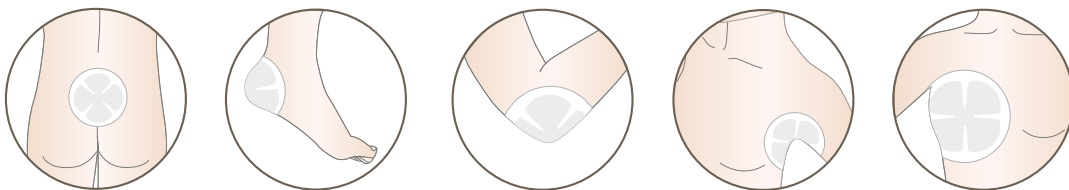

CUTIMED® SORBION® SACHET XL

WONDVERBAND VOOR DE BEHANDELING VAN WONDEN MET EEN GROOT OPPERVLAK


De vorm en afmeting van **Cutimed Sorbion Sachet XL** is speciaal bedoeld voor de behandeling van grote, matig tot sterk exsuderende wonden, op bijvoorbeeld benen, sacrum, borstkas, en buik.

Indicaties 

Cutimed Sorbion Sachet XL

is geschikt voor sterk tot zeer sterk exsuderende wonden, waaronder:

- chronische wonden zoals bijvoorbeeld veneuze of diabetische ulcera of decubitus;
- acute wonden met secundaire wondgenezing;
- oncologische ulcera;
- postoperatieve wonden;
- ideaal voor de behandeling van veneuze ulcera met zeer veel wondvocht.

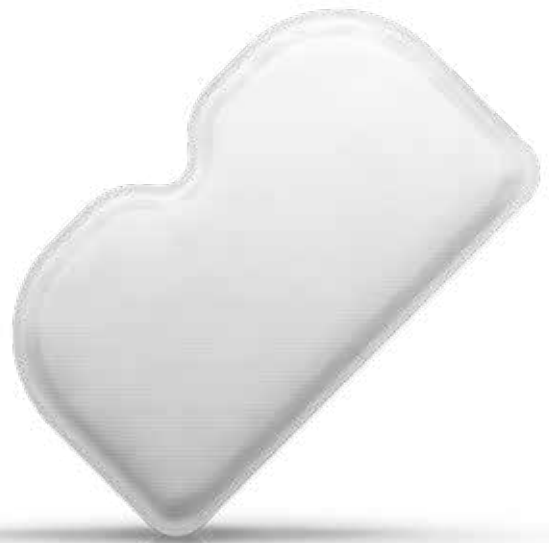

CUTIMED® SORBION® SORBACT®

EEN UNIEKE COMBINATIE

Infectieverschijnselen en hoge mate van wondvocht kunnen de wondgenezing verder verstoren. Om zorgverleners te ondersteunen bij deze uitdagende wonden, heeft BSN medical het eerste superabsorberende verband in de markt ontwikkeld dat infecties effectief bestrijdt: **Cutimed Sorbion Sorbact**. Sorbact technologie bindt bacteriën en verwijdert deze uit de wond. In combinatie met superabsorberende eigenschappen zorgt dit unieke verband voor betrouwbaar exsudaat management en effectieve infectiebestrijding.



HYDRFOBE NON-WOVEN LAAG

- Beschermt kleding en beddengoed tegen lekken
- Bedrukking zorgt voor gebruiksgemak bij applicatie

CUTIMED® SORBACT® WOND CONTACTLAAG

Zorgt voor veilige, onomkeerbare binding van bacteriën en schimmels aan het verband en maakt ze inactief.

- Geen bekend risico op allergieën
- Geen resistentie van bacteriën of schimmels
- Geen vertraging van het genezingsproces als gevolg van dode bacteriën, celdebris of endotoxinen
- Geen cytotoxiciteit
- Geen contra-indicaties

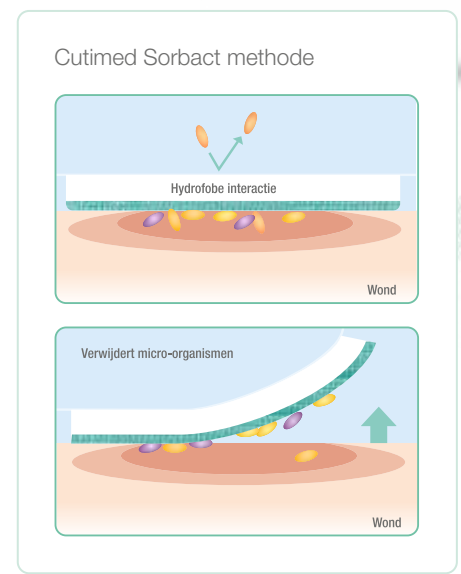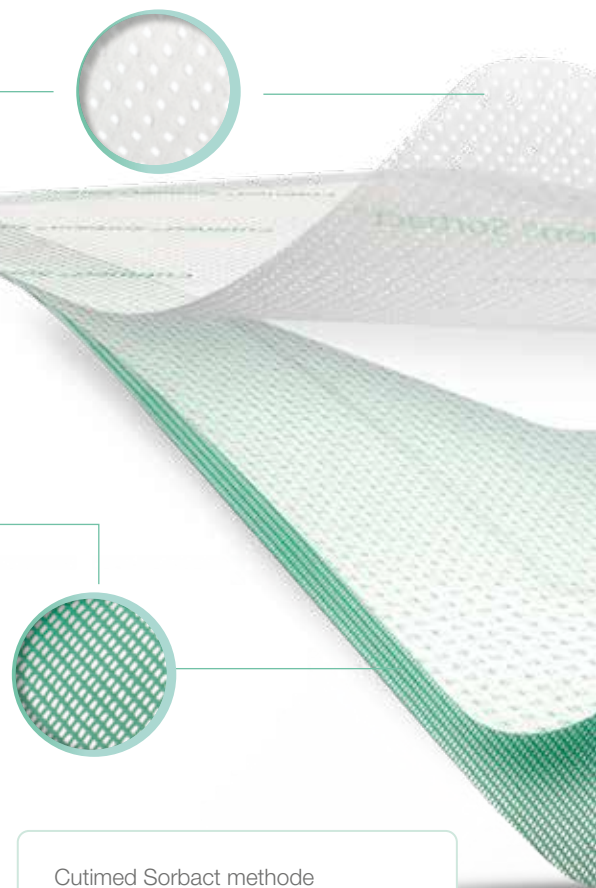

¹ Haycocks S, Chadwick P (2011). Use of a DACC coated antimicrobial dressing in people with diabetes and a history of foot ulceration. Wounds UK Vol 6 No 4
² Ljungh et al (2006) Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. Journal of Wound Care, 15 (4): 175 80