

Leukomed[®] T plus

Waterdichte en transparante eilandpleister

Eigenschappen en functies

Leukomed T plus is een steriele eilandpleister op basis van een flexibele en waterdichte folie. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de patiënt zonder extra bescherming onder de douche kan.

De huid krijgt de kans om te ademen en past zich aan de contouren van het lichaam aan. In combinatie met de huidvriendelijke kleefmassa geeft dit Leukomed T plus een huidvriendelijk karakter. Ook patiënten met een gevoelige huid verdragen Leukomed T plus probleemloos.

Het wondkussen van Leukomed T plus is voorzien van een polypropyleenlaag, die verkleving aan de wond tegengaat. Omdat Leukomed T plus geen stralingsabsorberende bestanddelen bevat, hoeft de hechtpleister niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics.

Leukomed T plus is makkelijk aan te brengen. Bij verwijderen laat Leukomed T plus bovendien geen lijmresten achter. Zie ommezijde voor aanbreng- en verwijder-instructies.

Dragermateriaal

Extra dunne en flexibele polyurethaanfolie

Kleefmassa

Huidvriendelijk polyacrylaat

Wondkussen

Vochtopnemend viscosevlies

Toepassingen

- Post-operatieve wondpleister
- Bij behandeling van o.a. snij- en schaafwonden
- Ideaal als bescherming tegen externe factoren als vocht en vuil



Leukoplast[®]

Wound care in best hands

Assortiment

Leukomed® T plus				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Leukomed T plus - per 5				
7,2 x 5 cm	72382-06	1	1 x 38 (38)	15273334
10 x 20 cm	72382-15	1	1 x 36 (36)	15281221
Leukomed T plus - per 50				
7,2 x 5 cm	72382-00	1	1 x 8 (8)	15102998
8 x 10 cm	72382-01	1	1 x 6 (6)	15103005
8 x 15 cm	72382-02	1	1 x 6 (6)	15103013
10 x 25 cm	72382-03	1	1 x 8 (8)	15103021
10 x 30 cm	72382-04	1	1 x 8 (8)	15103048
10 x 35 cm	72382-05	1	1 x 8 (8)	15103056

Aanbrenginstructie


Leukomed® T plus

1.




Verwijder het grootste schutblad.

2.

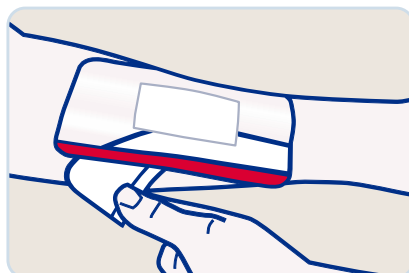


Plaats de eilandpleister op de huid en verwijder het tweede schutblad.

3.

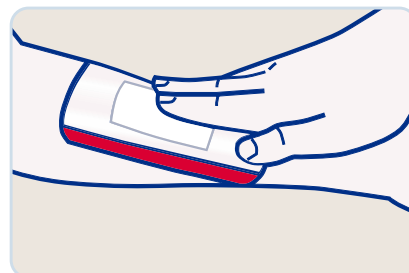


Wrijf de eilandpleister aan.

4.

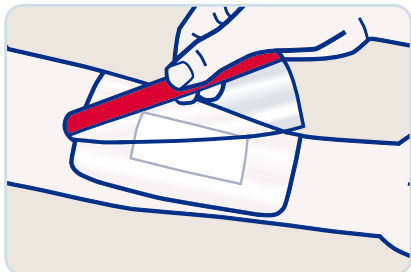

Pak de transparante toplaag vast bij de rode strip en verwijder deze voorzichtig.

5.

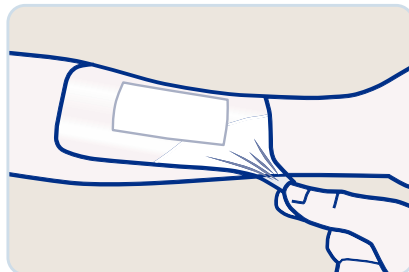

Verwijderen: maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwijdig aan de huid uit te rekken is de folie patiëntvriendelijk te verwijderen.