

JOBST® FARROWWRAP®

AANPASBAAR
KLITTENBANDSYSTEEM



N I E T S H O U D T J E T E G E N



COMPRESSIE ONTWORPEN OM ZELFMANAGEMENT TE KUNNEN FACILITEREN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE COMPRESSIEPRODUCTEN STIMULEREN ZELFMANAGEMENT

Compressietherapie is een onmisbaar onderdeel bij de behandeling van oedeem als gevolg van veneuze en lymfatische aandoeningen. In de initiële fase zijn zwachtels de eerste logische keuze, en voor sommige patiënten blijft dit ook in de consolidatiefase naast therapeutische elastische kousen een goede optie om het oedeem te stabiliseren.

Voor bepaalde patiënten kan deze behandelwijze echter moeilijk zijn om zelfstandig vol te houden. Het is daarom belangrijk om deze patiënten geschikte compressie-oplossingen te bieden die efficiënt en gemakkelijk te gebruiken zijn, de therapie bevorderen en patiënten het zelfvertrouwen geven om de regie in eigen hand te nemen.



KIES DE JUISTE COMPRESSIE¹:



Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen



Comfortabel voor de patiënt en blijft goed op zijn plek zitten



Geeft therapeutische compressie en heeft een hoge stiffness

¹ Harding, K., Dowsett, C., Flas, L et al. Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations. Wounds International, 2015. <https://tinyurl.com/jrxfcvj> (bekeken op 26 februari 2017). Properties of an ideal compression system.

JOBST®

AANPASBAAR KLITTENBANDSYSTEEM



EEN INNOVATIEVE OPLOSSING ONTWORPEN OM ZELFMANAGEMENT TE KUNNEN FACILITEREN

Geef uw patiënten de middelen om de regie in eigen handen te nemen en betere therapieresultaten te behalen met een aanpasbaar klittenbandsysteem.

Een aanpasbaar klittenbandsysteem kan als alternatief worden ingezet voor korte-rek zwachtels om het oedeem onder controle te krijgen. Beiden hebben een lage rustdruk en een hoge werkdruk. Hierdoor geeft een klittenbandsysteem de benodigde compressie.

Een klittenbandsysteem is ontworpen voor een hoog gebruiksgemak waardoor de patiënt zelfstandig de druk aan kan aanpassen.

JOBST® FARROWWRAP®

Ontworpen om
gemakkelijk aan
te brengen en te
verwijderen dankzij
de klittenbanden



Eenvoudig
aanbrengen

Korte-rek
eigenschappen voor
een lage rust- en
hoge werkdruk



Korte-rek
eigenschappen

Aanpasbaar aan
de mate van
compressiebehoefte



Aanpasbaar

Compact ontwerp dat
onder normale kleding
gedragen kan worden



Compact

¹ Overlappende banden niet op JOBST® FarrowWrap® 4000


² Observational Study JOBST® FarrowWrap® 2019, data on file

DE EENVOUDIGE KEUZE DIE ZELF-MANAGEMENT KAN ONDERSTEUNEN

Geef uw patiënt een hulpmiddel om zelfstandig en met zelfvertrouwen oedeem te managen en in te spelen op fluctuerend oedeem.

JOBST FarrowWrap is een aanpasbaar klittenbandsysteem, gemaakt van duurzaam materiaal en ontworpen om oedeemafname te handhaven, evenals de genezing van veneuze beenulcera te bevorderen. Het klittenbandsysteem is ontworpen om dezelfde stevige ondersteuning te bieden als zwachtels maar met een intuïtief design. JOBST FarrowWrap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

INTUÏTIEF DESIGN

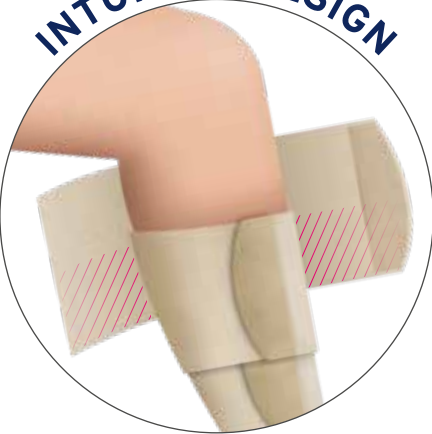

VOL VERTROUWEN AANBRENGEN EN AFSTELLEN

JOBST FarrowWrap is ontworpen met het oog op eenvoudige toepassing. Na een korte instructie is de patiënt of mantelzorger meestal zelf in staat om het verband aan te leggen. Het overlappende materiaal* ondersteunt een correcte drukverdeling en voorkomt plooivorming. Ook voor patiënten met een grote omvangsmaat zijn geschikte uitvoeringen beschikbaar.

BEWEZEN PATIËNTTEVREDENHEID²

Uit recent onderzoek naar de werking van JOBST FarrowWrap bleek dat 85% van de patiënten het klittenbandsysteem gemakkelijk kon aanpassen aan hun individuele behoeften. 73% van de patiënten gaf een goede tot zeer goede beoordeling met betrekking tot inzetbaarheid, waardoor JOBST FarrowWrap ook voor complexe veneuze en lymfatische problematiek een geschikte keuze kan zijn.

85 %
VAN DE
PATIËNTEN



JOBST® FARROWWRAP® STRONG BEENVERBAND

Aanbevolen voor patiënten met **matig tot ernstig** oedeem.

- Betrouwbare stevigheid voor fluctuerend oedeem
- Gemaakt van duurzaam materiaal met een zachte binnenvoering
- Ook geschikt voor grote omvangsvormen of benen met kleine huidplooien




KLEUREN



Beige

UITVOERINGEN (CONFECTIE)

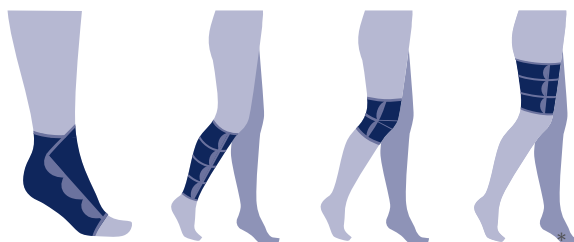

* Dijbeengedeelte wordt bij voorkeur gedragen in combinatie met het meegeleverde kniestuk

COMPRESSIE

30 - 40 mmHg

VERZORGING



Wasmachine
op 30° wassen,
gebruik een
waszak



Niet
bleken



Niet
centrifugeren



Plat leggen
om te drogen



Niet
strijken



Niet chemisch
reinigen

JOBST® FARROWWRAP® LITE BEENVERBAND

Aanbevolen voor patiënten met **mild tot matig** oedeem.

- Kan ook geschikt zijn voor patiënten met een gevoelige huid
- Ontworpen voor patiënten met benen met een normale omvangsvorm




KLEUREN



Beige

UITVOERINGEN (CONFECTIE)

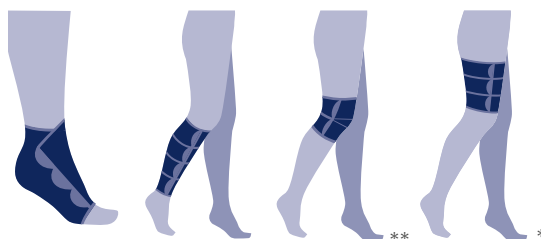

* Dijbeengedeelte wordt bij voorkeur gedragen in combinatie met het meegeleverde kniestuk

** Het kniestuk kan eventueel worden gecombineerd met een therapeutische elastisch kous

COMPRESSIE

20-30 mmHg

VERZORGING



Wasmachine
op 30° wassen,
gebruik een
waszak



Niet
bleken



Niet
centrifugeren



Plat leggen
om te drogen



Niet
strijken



Niet chemisch
reinen

JOBST® FARROWWRAP® 4000 BEENVERBAND

Aanbevolen voor patiënten met mild tot matig veneus oedeem.

JOBST FarrowWrap 4000 is een compleet korte-rek klittenbandsysteem en bestaat uit een FarrowHybrid compressiekous die druk geeft op de voet en de enkel, gecombineerd met een klittenbandverband voor het onderbeen.

- De geïntegreerde sleeve faciliteert een hoog gebruiksgemak
- Ontworpen om gemakkelijk op spanning te brengen dankzij de 4 banden
- Kan de genezing van een veneus ulcus cruris bevorderen



KLEUREN



Beige

UITVOERINGEN (CONFECTIE)



COMPRESSIE

30 - 40 mmHg

VERZORGING



Wasmachine
op 30° wassen,
gebruik een
waszak



Niet
bleken



Niet
centrifugeren



Plat leggen
om te drogen



Niet
strijken



Niet chemisch
reinigen

JOBST® FARROWWRAP® LITE ARMVERBAND

Aanbevolen voor patiënten met **mild tot matig** oedeem.

- Ontworpen met ingenaaide liner om eenvoudig aan en uit te trekken
- Kan ook geschikt zijn voor patiënten met een gevoelige huid



KLEUREN




Beige

Zwart*

*Zwart alleen beschikbaar als armverband

UITVOERINGEN (CONFECTIE)

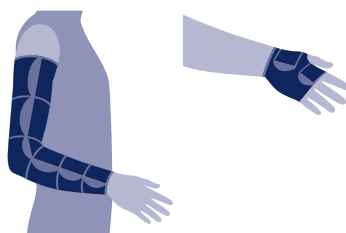

COMPRESSIE

20-30 mmHg

VERZORGING



Wasmachine
op 30° wassen,
gebruik een
waszak



Niet
bleken



Niet
centrifugeren



Plat leggen
om te drogen



Niet
strijken



Niet chemisch
reinen

JOBST® FARROWWRAP® ACCESSOIRES



JOBST® FARROWWRAP® VINGERVERBAND

Het JOBST FarrowWrap vingerverband biedt 20-30 mmHg compressie voor patiënten met licht tot matig oedeem. Het vingerverband is eenvoudig aan te passen aan de gewenste vingerlengtes.



JOBST® FARROWWRAP® TEENVERBAND

Het JOBST FarrowWrap teenverband geeft 20-30 mmHg compressie en is geschikt voor patiënten met licht tot matig oedeem. Het teenverband kan ook gecombineerd worden met therapeutische elastische kousen. De teen- en voetlengtes zijn eenvoudig aan te passen.



JOBST® FARROWWRAP® LINER ONDERBEEN

Deze liners zijn speciaal ontwikkeld als beschermlaag onder een JOBST FarrowWrap voet- en onderbeenverband. Hier overheen wordt JOBST FarrowWrap aangebracht. De liners zijn ontworpen om de huid te beschermen.

Bij een JOBST FarrowWrap boven- of onderbeenverband worden standaard twee liners geleverd. Het JOBST FarrowWrap armverband heeft een ingenaaide liner.



FARROWHYBRID ADI LINER MET VOETCOMPRESSIE

JOBST FarrowHybrid ADI liner met voetcompressie is geschikt voor mild tot matig oedeem. De liner biedt compressie van 20-30 mmHg op de voet en enkel. Boven de enkel geeft de FarrowHybrid geen compressie. De FarrowHybrid kan gecombineerd worden met een onderbeenverband.



JOBST® FARROWWRAP® ANTISLIPVERBAND

Het JOBST FarrowWrap antislipverband is een korte-rek verband dat ingezet kan worden om JOBST FarrowWrap verbanden te fixeren. Aan de binnenzijde is een speciale antislip laag aangebracht, welke voor extra grip zorgt. Het antislipverband wordt met overlap over het beenverband aangebracht en is verkrijgbaar in diverse maten.



JOBST® FARROWWRAP® ONDERBEENVERLENGER

De JOBST FarrowWrap onderbeenverlenger is bedoeld als extra band om aan het onderbeenverband te bevestigen.

MAATTABELLEN



JOBST® FARROWWRAP® TEENVERBAND

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L
Ⓐ	Omvang voorvoet	20-22	22-24	24-26	26-28



JOBST® FARROWWRAP® VOETVERBAND

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓐ	Omvang voorvoet	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
I Ⓐ	Voetlengte normaal	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
I Ⓐ	Voetlengte lang	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25



JOBST® FARROWWRAP® ONDERBEENVERBAND LITE EN STRONG

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓒ	Kuitomvang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
Ⓑ	Enkelomvang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
I Ⓐ-Ⓓ	Normaal	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
I Ⓐ-Ⓓ	Lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47



JOBST® FARROWWRAP® 4000

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L
Ⓒ	Kuitomvang	25-38	32-48	37-56	43-60
Ⓑ	Enkelomvang	17-23	19-28	25-37	29-43
I Ⓑ-Ⓓ	Normaal	30-33	30-33	30-33	30-33
I Ⓑ-Ⓓ	Lang	34-37	34-37	34-37	34-37

JOBST® FARROWHYBRID® ADI VOETCOMPRESSIE

cA' 20-27 cm (standaard)	S	M	L	XL
Schoenmaat	35-38	38-41	41-44	44-46

Maximale kuitomvang 60 cm.

JOBST® FARROWWRAP® LINER ONDERBEEN

Beschikbare maten	S	L
Omvang	15-58	52-72



JOBST® FARROWWRAP® KNEEVERBAND

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L	XL	XXL
Ⓔ	Omvang knie	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
Ⓒ	Kuitomvang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73



JOBST® FARROWWRAP® BOVENBEENVERBAND (INCL. KNEEVERBAND)

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓖ	Omvang bovenbeen	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100
Ⓔ	Omvang knie	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
Lengte (cm)		Kort		Normaal		Lang
Ⓔ-Ⓖ		16-20		21-26		27-31



JOBST® FARROWWRAP® ARMVERBAND

Meetpunt (cm)		S	M	L
Ⓖ	Oksel	22-31	29-39	32-45
Ⓔ	Elleboog	20-27	25-34	30-40
Ⓒ	Pols	14-18	16-21	19-25
Lengte (cm)		Kort	Normaal	Lang
Ⓒ-Ⓖ		40-43	44-47	48-51



JOBST® FARROWWRAP® HANDVERBAND

Meetpunt (cm)		XS	S	M	L
Ⓐ	Omvang aanzet vingers	16-18	18-20	20-22	22-24
Ⓑ	Omvang handpalm	17-19	19-21	21-23	23-26
Ⓒ	Pols	15-18	17-20	19-22	22-24




JOBST® FARROWWRAP® VINGERVERBAND

Meetpunt (cm)		1	2	3	4	5	6	7	8
Ⓐ	Omvang aanzet vingers	16,6-18,0	16,6-18,0	18,0-19,5	18,0-19,5	18,0-19,5	19,5-21,5	19,5-21,5	21,5-23,1
Ⓒ	Pols	15,6-16,7	16,7-18,1	15,9-17,0	17,0-18,5	18,5-20,4	17,2-18,7	18,7-20,6	18,3-20,1

MEETPUNTEN

ONDERSTE LEDEMATEN


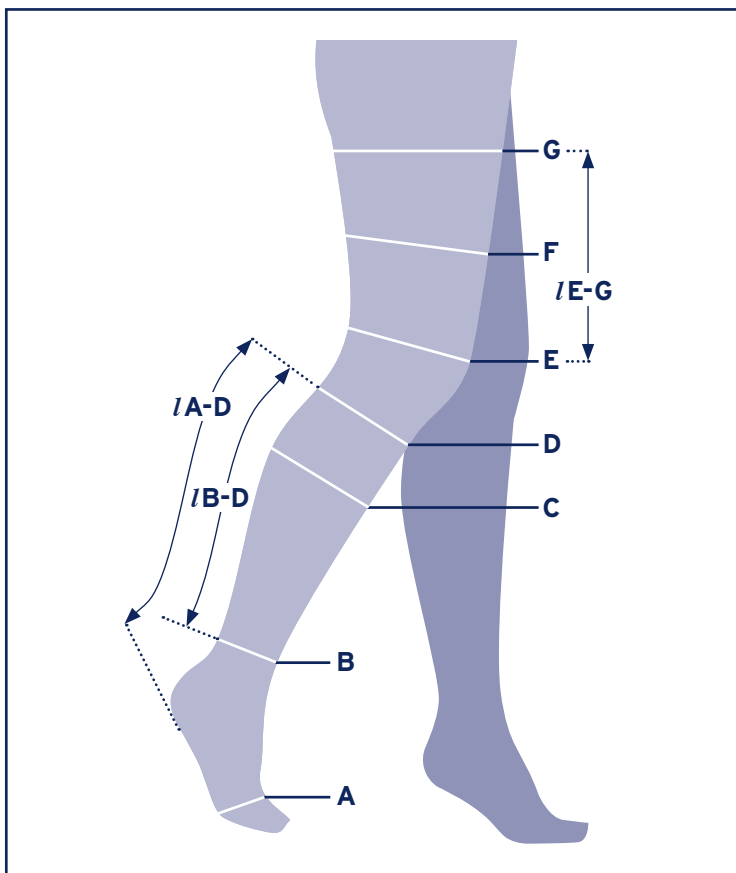


E moet 10 cm boven de patella gemeten worden.
Plaats de voet in 90° om de I A-D en I B-D te meten.

Lengte I A-D voor FarrowWrap Lite en Strong.



Lengte I B-D voor FarrowWrap 4000.

BOVENSTE LEDEMATEN

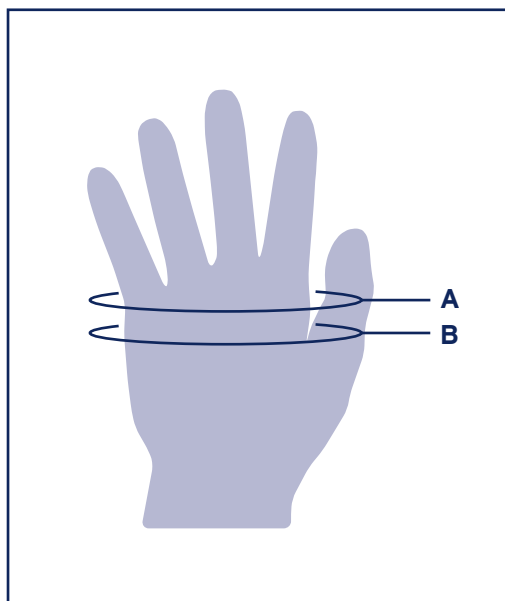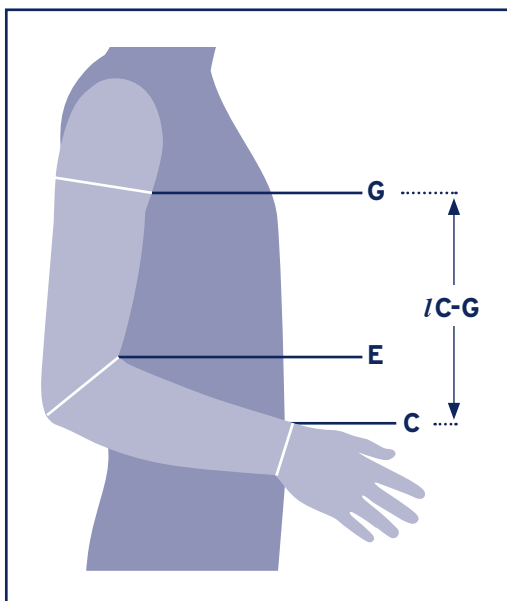

FARROWWRAP® KEUZEHULP

HOE MAAKT U DE JUISTE KEUZE?

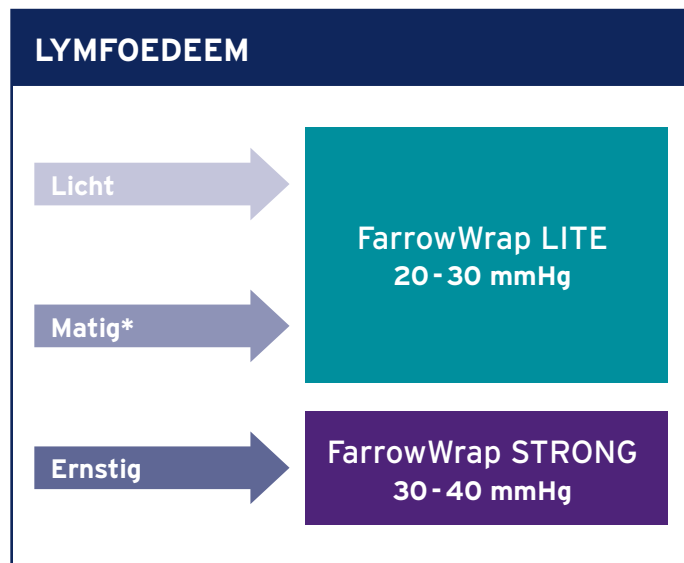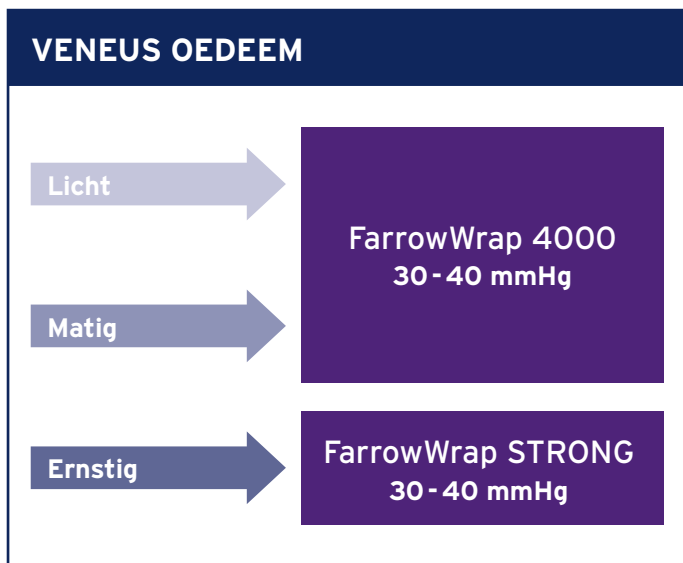

*Kies bij diepe huidplooiën voor FW Strong



TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK



HET KLITTENBANDSYSTEEM WASSEN

Sluit de klittenbanden om het vastkleven van de klittenbanden te voorkomen. Gebruik altijd een waszak om het klittenbandsysteem te beschermen.



LET OP WONDEN

Voordat JOBST FarrowWrap wordt aangebracht, moeten alle open wonden in het behandelgebied met een geschikt wondverband worden bedekt.



DE JUISTE SCHOENEN

Veilig schoeisel is belangrijk om het risico op vallen te verminderen en om JOBST FarrowWrap te beschermen tegen onnodige slijtage.



ONDERHOUD

JOBST FarrowWrap moet op de juiste manier worden behandeld om een langere levensduur te garanderen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.