

JOBST® FARROWWRAP® 4000



COMPLEET KORTEREK KLITTENBANDSYSTEEM

Een compleet korterek klittenbandsysteem voor patiënten met mild tot matig oedeem. JOBST FarrowWrap 4000 bestaat uit een FarrowHybrid compressiekous die druk geeft op de voet en de enkel, gecombineerd met een klittenbandverband voor het onderbeen.

- Hoog gebruiksgemak door de geïntegreerde sleeve
- De 4 banden zijn makkelijk aan te leggen en eenvoudig op spanning te brengen
- Faciliteert mobiliteit, doordat het dragen van schoenen mogelijk is en bevordert daarmee het effect van de voetspierpomp

Voor elke indicatie de juiste keuze

VENEUS OEDEEM

Mild

FarrowWrap 4000
30 - 40 mmHg

Matig

Ernstig

FarrowWrap STRONG
30 - 40 mmHg

LYMFOEDEEM

Mild

FarrowWrap LITE
20 - 30 mmHg

Matig*

Ernstig

FarrowWrap STRONG
30 - 40 mmHg

*Kies bij diepe huidplooiën voor FW Strong


TIPS

- Wanneer er sprake is van **veel oedeem in de voorvoet** door bijvoorbeeld immobiliteit, combineer het **FarrowWrap 4000** verband dan met het dragen van stevige schoenen, bij voorkeur met veters.
- Wanneer de **omvang van de kuit groter is dan 60 cm**, kunt u beter kiezen voor een **FarrowWrap Strong**.
- FarrowWrap 4000 kan ook worden gecombineerd met de FarrowWrap Lite onderbeenverlenger. Deze brengt u (na sluiten van de banden) met minimaal 50% overlap aan over de bovenste band van het FarrowWrap 4000 verband.

AANTREKINSTRUCTIE



KLEUR

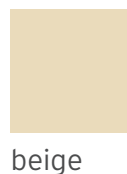


beige

COMPRESSIE

30-40 mmHg

MAATTABEL

Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L
Ⓒ	Omvang kuit	25-38	32-48	37-56	43-60
Ⓑ	Omvang enkel	17-23	19-28	25-37	29-43
Ⓘ Ⓑ - Ⓓ	Normaal	30-33	30-33	30-33	30-33
Ⓘ Ⓑ - Ⓓ	Lang	34-37	34-37	34-37	34-37

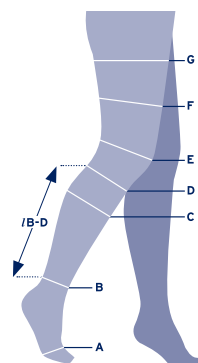

BESTELINFORMATIE

JOBST® FarrowWrap 4000 onderbeenverband	Artikel-nummer	Z-index nummer	Inhoud
Normaal XS	76661-00	16870964	1 stuk incl. 1 liner
Normaal S	76661-01	16870980	1 stuk incl. 1 liner
Normaal M	76661-02	16870999	1 stuk incl. 1 liner
Normaal L	76661-03	16871006	1 stuk incl. 1 liner
Lang XS	76661-04	16871022	1 stuk incl. 1 liner
Lang S	76661-05	16871030	1 stuk incl. 1 liner
Lang M	76661-06	16871049	1 stuk incl. 1 liner
Lang L	76661-07	16871057	1 stuk incl. 1 liner