



# Fixatiewijzer








**Leukoplast®**

Wound care in best hands

	Artikelnr.	Afmeting	Inhoud	ZI-nr.
<b>Leukoplast®</b>	01521-00	5 m x 1,25 cm	1	12200948
Sterk klevende hechtpleister 	01522-00	5 m x 2,50 cm	1	12200956
	01536-00	9,2 m x 1,25 cm	24	13933531
	01537-00	9,2 m x 2,50 cm	12	13933558
	<b>Leukoplast® hospital</b>	01756-00	9,2 m x 1,25 cm	24
Sterk klevende en scheurbare hechtpleister 	01757-00	9,2 m x 2,50 cm	12	13947524
	01758-00	9,2 m x 5,00 cm	6	13947532
	<b>Leukoplast® Pro LF</b>	72212-00	5 m x 1,25 cm	1
Sterk klevende latexvrije hechtpleister 	72212-01	5 m x 2,5 cm	1	15011402
	72213-00	9,2 m x 1,25 cm	1	15011429
	72213-01	9,2 m x 2,5 cm	1	15011437
	<b>Leukoplast® skin sensitive</b>	76173-00	2,6 m x 1,25 cm	1
Siliconen hechtpleister 	76173-01	2,6 m x 2,5 cm	1	17076633
	76173-06	1 m x 2,5 cm	1	17076641
	76175-00	2,6 m x 2,5 cm - zonder klemring	1	17076668
	<b>Leukosilk®</b>	01021-00	5 m x 1,25 cm	1
Kunstzijde hechtpleister 	01022-00	5 m x 2,50 cm	1	12201049
	09566-00	9,2 m x 1,25 cm	24	13932659
	09567-00	9,2 m x 2,50 cm	12	13932667
	<b>Leukopor®</b>	02471-00	5 m x 1,25 cm	1
Non woven hechtpleister 	02472-00	5 m x 2,50 cm	1	12200972
	02453-00	9,2 m x 1,25 cm	24	13900005
	02454-00	9,2 m x 2,50 cm	12	13856049
	<b>Fixomull® skin sensitive</b>	79965-01	5 m x 5 cm	1
Volvlakfixatie met siliconen kleeflaag 	79965-02	5 m x 10 cm	1	16781708
	79965-03	5 m x 15 cm	1	16781716
	79965-04	2 m x 10 cm	1	16781724
	<b>Fixomull® stretch</b>	79992-00	10 m x 5 cm	1
Volvlakfixatie met polyacrylaat kleeflaag 	79992-02	10 m x 10 cm	1	16551508
	02038-00	10 m x 15 cm	1	12355127
	02039-00	10 m x 20 cm	1	12355135
	<b>Fixomull® transparent</b>	72216-00	10 m x 5 cm	1
Onsteriele folie op rol 	72216-01	10 m x 10 cm	1	15044734
	72216-02	10 m x 15 cm	1	15044742
	72217-00	2 m x 10 cm	1	15044718





Wat wil je doen?	Soort product	<b>Zeer gevoelige, kwetsbare huid</b> Bijvoorbeeld: baby's, ouderen, chronisch zieken, extreem droge huid
Kritische fixatie van sondes, tubes etc. - op de huid	<b>Hechtpleister</b>	Leukoplast Pro LF Leukoplast (Hospital)
Niet kritische fixatie - op de huid	<b>Hechtpleister</b>	Leukoplast skin sensitive
Vastzetten zwachtel/windsel	<b>Hechtpleister</b>	Leukopor
Groot oppervlak of wondverband fixeren	<b>Volvlakfixatie non-woven</b>	Fixomull skin sensitive
		Fixomull skin sensitive
	<b>Volvlakfixatie Folie</b>	Fixomull transparent
		Leukomed T skin sensitive
		Leukomed T skin sensitive
Fixeren op bewegend lichaamsdeel (als volvlakfixatie geen optie is)	<b>FIXATIEWindsels</b>	Elastomull
		Elastomull Haft
	<b>Buisverband</b>	Elastofix
		Tensofast double stretch
		Tensogrip

<b>Gevoelige huid</b>	<b>Gezonde huid</b>	<b>Eigenschappen</b>
Bijvoorbeeld: langdurig zieken, kinderen, droge huid	Bijvoorbeeld: jongeren, volwassenen, kortdurend ziek	
Leukoplast Pro LF	Leukoplast Pro LF	Latexvrije zinkoxide kleeflaag
Leukoplast (Hospital)	Leukoplast (Hospital)	Zinkoxide-rubber kleeflaag (bevat latex)
		Siliconen kleeflaag
Leukopor	Leukopor	Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag (non-woven)
Leukosilk	Leukosilk	Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag (kunstzijde)
Leukopor	Leukopor	Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag - uitwasbaar
Fixomull stretch	Fixomull stretch	Behandelperiode < 2 tot 3 weken
Fixomull skin sensitive	Fixomull stretch	Behandelperiode > 2 tot 3 weken
Fixomull transparent	Fixomull transparent	Onsteriel
Leukomed T	Leukomed T	Steriel behandelperiode < 2 tot 3 weken
Leukomed T skin sensitive	Leukomed T	Steriel behandelperiode > 2 tot 3 weken
Elastomull	Elastomull	Niet klevend, fixeren met hechtpleister
Elastomull Haft	Elastomull Haft	Op zichzelf klevend
Elastofix	Elastofix	Zeer elastisch
Tensofast double stretch	Tensofast double stretch	Licht elastisch
Tensogrip	Tensogrip	Geeft steun





	Artikelnr.	Afmeting	Inhoud	ZI-nr.	
<b>Leukomed* T skin sensitive</b>	76464-00	5 x 7,2 cm	5	16869966	
Transparante folie met siliconen kleeflaag		76464-01	8 x 10 cm	5	16869974
		76464-02	8 x 15 cm	5	16869990
<b>Leukomed* T</b>	72381-03	7,2 x 5 cm	5	15280918	
Steriele transparante folie		72381-04	8 x 10 cm	5	15280926
		72381-05	11 x 14 cm	5	15280934
		72381-12	15 x 20 cm	5	15293394
		72381-13	15 x 25 cm	5	15297950
<b>Elastomull*</b>	02094-00	4 m x 4 cm	20	12345652	
Elastisch fixatiewindsel		02095-00	4 m x 6 cm	20	12345660
		02096-00	4 m x 8 cm	20	12345679
		02097-00	4 m x 10 cm	20	12345687
<b>Elastomull* haft</b>	45470-00	4 m x 4 cm	10	13299530	
Op zichzelf klevend fixatiewindsel		45471-00	4 m x 6 cm	10	13299549
		45472-00	4 m x 8 cm	10	13299557
		45473-00	4 m x 10 cm	10	13299565
<b>Elastofix*</b>	02140-00	A 25 m (vingers - kleine ledematen)	1	12353434	
Elastisch netverband		02141-00	B 25 m (ledematen - kleine hoofden)	1	12353442
		02142-00	C 25 m (hoofd - kleine romp)	1	12353450
		02143-00	D 25 m (romp)	1	12353469
<b>Tensofast* double stretch</b>	73447-00	rood 10 m x 3,5 cm	1	15260291	
Licht elastisch buisverband		73447-01	groen 10 m x 5 cm	1	15260305
		73447-02	blauw 10 m x 7,5 cm	1	15260313
		73447-03	geel 10 m x 10,75 cm	1	15260321
		73447-04	beige 10 m x 17,5 cm	1	15260348
<b>Tensogrip*</b>	09831-00	maat B - 1 m x 6,25 cm	1	15323978	
Elastisch buisverband		09833-01	maat C - 1 m x 6,75 cm	1	14808390
		09838-01	maat D - 1 m x 7,50 cm	1	14808404
		09835-01	maat E - 1 m x 8,75 cm	1	14808412
		09840-01	maat F - 1 m x 10,0 cm	1	14808420

## Tips voor aanbrengen





- Klevende producten altijd aanbrengen op de droge huid.
- Polyacrylaat en siliconen kleeflagen kleven sneller en beter door aanwrijven (warmte).
- Een siliconen kleeflaag behoudt zijn werking dus kleeft bij losmaken opnieuw.
- Gebruik voor verwijderen van zinkoxide kleeflagen Leukotape Remover.
- Let op de richting van rek in het product bij aanbrengen, Fixomull rekt in de breedte.
- Breng een fixatieproduct niet onder rek aan (met name bij Elastomull Haft).
- Knip hoeken rond voor betere hechting op bewegende lichaamsdelen bij volvlakfixatie.
- Breng onder zinkoxide kleeflagen een huidbeschermmer (Cutimed Protect) aan.
- Verwijder na aanbrengen van Leukomed T (skin sensitive) en Fixomull transparent het bovenste schutblad met behulp van de rode rand.

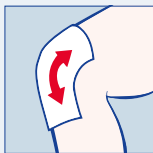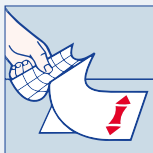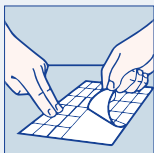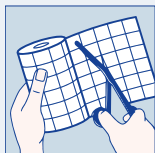

**Fixomull stretch en Fixomull skin sensitive**

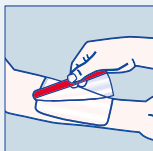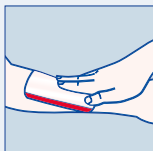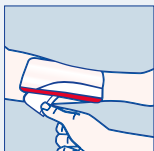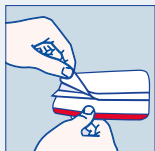

**Leukomed T en Leukomed T skin sensitive**

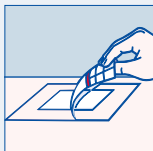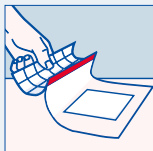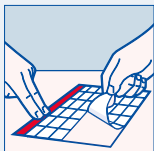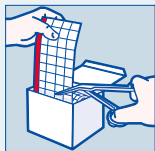

**Fixomull transparent**

## Tips voor verwijderen

- Polyacrylaat is oplosbaar in water: natmaken (lauw water) vereenvoudigt verwijderen.
- Door warmte gaan kleeflagen harder plakken: verwijderen tijdens douchebeurt raden we af.
- Siliconen kleeflagen zijn te verwijderen zonder de huid te beschadigen.
- Verwijder een fixatieproduct dat kleeft altijd in de groeirichting van de haren.
- Een folie is eenvoudig te verwijderen door deze evenwijdig aan de huid en in de groeirichting van de haren uit te rekken. Zie foto.



De bovenstaande tips kun je gebruiken bij het verwijderen van Leukomed T, Leukomed T skin sensitive en Fixomull transparent.

## Fixatietips (voorbeelden) Elastofix

### Hoofd




### Romp




### Arm / Pols




### Hand / Vinger

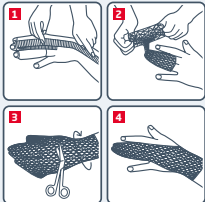

### Been / Knie

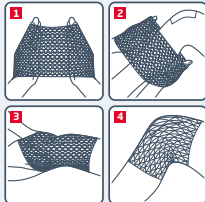

### Voet / Teen

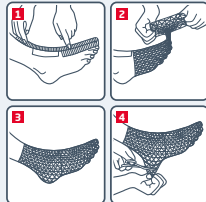



## *Leukoplast® - De keuze van de professional*

---

Al meer dan 120 jaar vertrouwen professionals op de expertise en hoogwaardige producten van Leukoplast®.



Bekijk onze website voor alle beschikbare producten en afmetingen:



Leukoplast®,  
an Essity brand



06066860M

**Leukoplast®**  
Wound care in best hands