

Algemeen Wondprotocol Complexe Wonden



essity

				M O I S T U R E			
Protocol wondbehandeling				☐☐☐☐ Droog	☐☐☐ Vochtig	☐☐☐ Nat	Opmerking
T I S U E		Granulatiweefsel beschermen	Oppervlakkig & Diep	Leukomed T Plus skin sensitive	Cutimed Gelling Fiber + Cutimed Siltec + fixatie	Leukoplast compress absorberent soft + fixatie	Een rode wond (granulatiweefsel) waarin de wondgenezing stagneert en/of die (plotseling) veel meer wondvocht produceert: neem contact op met de wondverpleegkundige.
		Reinigen van fibrine / debris (geel beslag)	Oppervlakkig & Diep	Cutimed Gel + Cutimed Siltec + fixatie	Cutimed Alginate + Cutimed Siltec + fixatie	Cutimed Alginate + Leukoplast compress absorberent soft + fixatie	
		Lokaal infectie voorkomen of behandelen Wond met kenmerken van of risico op infectie	Oppervlakkig & Diep	Cutimed Gel + Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie	Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie	Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Leukoplast compress absorberent soft + fixatie	Als er sprake is van pus, koorts, algehele malaise ("griepig gevoel") en/of als er 2 weken na ontstaan van de wond sprake is van warmte, zwelling, pijn en roodheid (toenemend tot > 2cm rondom de wond).
		Niet vitaal weefsel (o.a. necrose, biofilm) verwijderen (en lokaal infectie bestrijden)	Oppervlakkig & Diep	Droog verbinden als geen infectie-kenmerken zijn	Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie	Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Leukoplast compress absorberent soft + fixatie	Necrose is risico op infectie en dient zo snel als mogelijk verwijderd te worden. Bij voorkeur door scherp debridement. Let op bij necrose (dood weefsel) door vaatlijden: in principe droog verbinden en arts informeren.
			Een diepe wond maximaal 2/3 deel opvullen met Cutimed Alginate of Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook / gel	Wissel-frequentie: 1 à 2x per week	Wissel-frequentie: 3x per week	Wissel-frequentie: 1x per dag. Indien secundaire verband verzadigd, eerder wisselen	EDGE Overweeg bij natte/zeer natte wond wondrandbeschermer: Cutimed Protect
				☐☐☐☐ Bij zeer natte wonden kan Cutimed Sorbion een goede keuze zijn. Overleg met wondverpleegkundige.			

Cutimed - moderne wondverbanden	Cutimed® Sorbact® / Sorbact® gel	Cutimed® Siltec® (standaard)	Cutimed® Sorbion® Border®	Cutimed® Sorbion® Sachet S	Cutimed® Alginate
Product-omschrijving	Behandelt en voorkomt wondinfecties zonder het natuurlijke wondgenezingsproces nadelig te beïnvloeden: • Kompres • Gaasstrook • Gelverband.	Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag zonder border. Ook dunne variant (L) beschikbaar. Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid.	Superabsorberend verband met zelfklevende, siliconen border voor atraumatische verbandwissels. Geschikt voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven.	Superabsorberend, hypo-allergeen wondverband voor wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven.	Calcium-natrium alginaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het geleerend verband is stabiel door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
Eigenschappen en functies	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Geen risico op ontwikkeling van resistente bekend • Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond • Geen contra-indicaties bekend • Laag risico op allergieën • Kompressen: max 4 lagen aanbrengen • Gaasstroken: voor bijv. diepe wonden (fistels), bij smetten en tussen tenen • Sorbact gel: voor droge tot matig vochtige wonden en bij geel beslag, binnen de wondranden aanbrengen.	• Niet verklevende siliconen wondcontactlaag • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu • Siltec (standaard) • Ook anatomische vorm hiel (3D): extra dik voor polsterend effect.	• Huidvriendelijk klevende siliconen border • Waterdichte folie toplaag • Superabsorberende kern • Hypoallergeen wondcontactlaag (soft debridement) • Geen secundaire fixatie nodig.	• Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie • Verwijderd op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat • Geen secundair verband nodig • Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband.	• Sterk absorberend en geleerend • Creëert een vochtig wondmilieu • Gemaakt van natuurlijk zeewier • In zijn geheel te verwijderen • Mag op maat geknipt worden • Zacht en plooibaar • Licht hemostatisch effect.
Toepassing	Ja, mits uiteinden buiten wond blijven (dit geldt voor de gaasstrook)	Ja	Ja	Nee	Ja
Indicaties	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven.	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven.	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven.	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven. Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht.	Voor oppervlakkige en diepe wonden die matig tot veel wondvocht afgeven.
Maten & bestelinformatie	Cutimed® Sorbact® kompres 4 x 6 cm 72164-17 7 x 8 cm 72165-15 Cutimed® Sorbact® gaasstrook 2 x 50 cm 72166-11 5 x 200 cm 72167-07 Cutimed® Sorbact® gel 7,5 x 7,5 cm 72611-20 7,5 x 15 cm 72611-21 15 x 20 cm 72611-28	Cutimed® Siltec® 5 x 6 cm 73285-00 10 x 10 cm 73285-01 Ook verkrijgbaar: Cutimed Siltec Heel 3D.	Cutimed® Sorbion® Border® Afmeting wondkussen 10 x 10 cm 71010-00 15 x 15 cm 71010-02 20 x 20 cm 71010-03 10 x 23 cm 71010-04	Cutimed® Sorbion® Sachet S 7,5 x 7,5 cm 73232-00 10 x 10 cm 73232-06 15 x 15 cm 73232-12 Cutimed® Sorbion® Sachet XL 45 x 25 cm 73240-00	Cutimed® Alginate 5 x 5 cm 72634-08 10 x 10 cm 72634-09 Streng 30 cm 72634-11

Cutimed - moderne wondverbanden	Cutimed® Gel	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® DebricClean	Cutimed® Protect	Cutimed® Acute	TENA ProSkin Barrier Cream
Product-omschrijving	Transparante en vormloze hydrogel. Ondersteunt het autolytisch debridement.	Een gevormd fiber verband gemaakt van natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende vezels.	Debridement pad (met handlus) voor mechanisch debridement. Verwijderd op patiëntvriendelijke wijze niet-vitaal weefsel (debris, necrose) en biofilm en helpt optimale omstandigheden voor wondgenezing te creëren.	Duurzame bescherming van de huid tegen invloed van wondvocht en andere lichaamsvocht. Gaat vochtverlies van de huid tegen.	Huidverzorgende mousse op basis van urea. Bindt vocht, hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies. Eenvoudig toe te passen, trekt snel in en maakt de huid niet vet.	Zachte en transparante crème met natuurlijke oliën en vitamine E. Kalmerend en verzorgend.
Eigenschappen en functies	• Effectief debridement van necrotisch weefsel en fibrineus (geel) beslag • Zonder conserveermiddelen om het risico van allergische reacties tot een minimum te beperken • Transparant • Eenvoudig aan te brengen (met applicator).	Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen.	• Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvoestof (hier kan de blisterverpakking voor worden gebruikt) • Twee soorten vezels voor optimaal debridement • Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, ook als er sprake is van huidkeratosen.	• Alcoholvrij • Vormt gelijkmatige en waterdichte film die waterdamp- en zuurstofdoorlatend is • Bescherming wondranden en huid rondom de wond. Voorkomt verwerking.	• Brengt balans in het vochtgehalte van de huid • Maakt huid zacht en soepel • Stabiliseert de natuurlijke werking van de huid • Stimuleert regeneratie van de opperhuid • Vermindert jeuk • Niet aanbrengen in het gezicht.	• Zorgt voor een waterafstotende barrière • Ideaal voor mensen met een kwetsbare en gevoelige huid • Voor preventief gebruik op plaatsen die roodheid en irritatie vertonen • Zonder parfum en conserveermiddelen.
Toepassing	Niet van toepassing	Ja, maar mag over de wondranden worden aangebracht	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Indicaties	Voor oppervlakkige en diepe droge wonden.	Voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven, die oppervlakkig of diep zijn.	Patiëntvriendelijk en snel debridement.	Voor het beschermen van kwetsbare wondranden en de huid.	Geschikt voor de zeer droge en kwetsbare huid.	Geschikt voor de kwetsbare en gevoelige huid.
Maten & bestelinformatie	Cutimed® Gel 8 gr 72610-00 15 gr 72610-01 25 gr 72610-02	Cutimed® Gelling Fiber 5 x 5 cm 71218-00 10 x 10 cm 71218-01 15 x 15 cm 71218-02 2 x 45 cm 71218-06	Cutimed® DebricClean 9 x 13 cm 76170-00	Cutimed® Protect Spray 28 ml 72653-00 Cutimed® Protect Swab 1 ml per 5 72654-00 3 ml per 5 72654-02	Cutimed® Acute 40 ml 72644-14 125 ml 72641-05	TENA ProSkin Barrier Cream 150 ml 4419

Leukoplast - fixatie producten	Leukoplast® Fixomull® stretch / Fixomull® skin sensitive	Leukoplast® Fixomull® transparent	Leukomed® skin sensitive / Leukomed® T plus skin sensitive	Leukopor® / Leukosilk® / skin sensitive	Leukoplast® Elastomull® / Elastomull® Haft
Productomschrijving	Leukoplast® Fixomull® stretch Volvlakfixatie (non-woven) met polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® Fixomull® skin sensitive Volvlakfixatie (non-woven) met siliconen kleeflaag.	Leukoplast® Fixomull® transparent Volvlakfixatie (folie) met polyacrylaat kleeflaag.	Leukomed® skin sensitive / Leukomed® T plus skin sensitive Eilandpleisters voor de zeer gevoelige of kwetsbare huid.	Leukopor® Hechtpleister non-woven (papier) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukosilk® Hechtpleister acetata (kunstzijde) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® skin sensitive Hechtpleister acetata (kunstzijde) drager. Siliconen kleeflaag.	Leukoplast® Elastomull® Fixatiewindsel. Leukoplast® Elastomull® Haft Op zichzelf klevend fixatiewindsel.
Eigenschappen en functies	Non-woven toplaag. Breedterek. Voor fixeren van wondverband. Op rol en voor gebruik op maat te knippen. Leukoplast® Fixomull® stretch Voor normale, gevoelige huid. Leukoplast® Fixomull® skin sensitive Voor zeer gevoelige of kwetsbare huid.	Folie toplaag. Breedte- en lengterek. Voor fixeren van wondverband. Voor normale en gevoelige huid. Op rol en voor gebruik op maat te knippen. Geschikt om mee te douchen.	Leukomed® skin sensitive Steriele, zachte, non-woven eilandpleister met siliconen kleeflaag. Leukomed® T plus skin sensitive Steriele, waterdichte, absorberende eilandpleister voor licht en matig exsuderende acute wonden.	Leukopor® Non-woven hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukosilk® Acetaat hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukoplast® skin sensitive Acetaat hechtpleister voor zeer gevoelige of kwetsbare huid.	Leukoplast® Elastomull® Elastisch, comfortabel fixatiewindsel. Leukoplast® Elastomull® Haft Elastisch, comfortabel, op zichzelf klevend fixatiewindsel. Latexvrij.
Toepassing	Ja	Ja	Ja	Ja, ook scheurbaar	Ja
Maten & bestelinformatie	Leukoplast® Fixomull® stretch 10 m x 5 cm 79992-00 10 m x 10 cm 79992-02 10 m x 15 cm 02038-00 10 m x 20 cm 02039-00 2 m x 10 cm 79992-05 Leukoplast® Fixomull® skin sensitive 5 m x 5 cm 79965-01 5 m x 10 cm 79965-02 5 m x 15 cm 79965-03 2 m x 10 cm 79965-04	Leukoplast® Fixomull® transparent 10 m x 5 cm 72216-00 10 m x 10 cm 72216-01 10 m x 15 cm 72216-02 2 m x 10 cm 72217-00	Leukomed® skin sensitive 5 x 7,2 cm 71239-04 8 x 10 cm 71239-05 8 x 15 cm 71239-06 Leukomed® T plus skin sensitive 5 x 7,2 cm 76178-00 5 x 10 cm 76178-01 8 x 15 cm 76178-02 10 x 25 cm 76178-03	Leukopor® Met kleerm 5 m x 1,25 cm 02471-00 5 m x 2,50 cm 02472-00 Leukosilk® Met kleerm 5 m x 1,25 cm 01021-00 5 m x 2,50 cm 01022-00 Leukoplast® skin sensitive Met kleerm 1,25 cm x 2,6 m 76173-00 2,5 cm x 2,6 m 76173-01 2,5 cm x 1 m 76173-06	Leukoplast® Elastomull® Geëlofaneerd 4 m x 4 cm 02094-00 4 m x 6 cm 02095-00 4 m x 8 cm 02096-00 4 m x 10 cm 02097-00 Leukoplast® Elastomull® Haft Per stuk verpakt 4 m x 4 cm 45470-00 4 m x 6 cm 45471-00 4 m x 8 cm 45472-00 4 m x 10 cm 45473-00

Wondbedekker	Leukoplast® compress non-woven	Leukoplast® compress absorberent soft	Cuticell® Contact	Cuticell®
Productomschrijving	Huidvriendelijk non-woven kompres. Gemaakt van 100% katoen. Dit absorberend gaaskompres is geschikt voor de bescherming, reiniging en afdekking van wonden. Huidvriendelijk en ademend.	Absorberend verband. Het waterafstotende wondkussen is ontworpen om te beschermen tegen druk, schokken en water. Geschikt voor de behandeling van matig tot veel vochtafgeevende wonden.	Huidvriendelijke siliconen wondcontactlaag. Bescherm het wondbed en zorgt ervoor dat het wondgenezingsproces niet wordt verstoord. Heeft een open structuur voor het doorlaten van wondvocht. Geschikt voor acute en complexe wonden met matig tot veel wondvocht.	Niet-verklevend synthetisch zelfgaas. Werkt verzachtend en voorkomt ingroeven van weefsel, waardoor de pijn bij het verwisselen minimaal is. Geschikt voor mensen met een gevoelige huid.
Eigenschappen en functies	Zacht en comfortabel non-woven kompres. Verkrijgbaar in steriele en niet-steriele varianten. Voor het gebruik bij sondes, drains en katheters (steriel) en deppers (niet steriel).	Met antiodorleeklaag. Zachte randen. Verkleeft niet aan het wondbed. Verkrijgbaar in steriele en niet-steriele varianten. (Let op: blauwe zijde = bovenkant.)	Transparante, flexibele folie met siliconen wondcontactlaag. Enzijdig klevend. Pijnloos aanbrengen en verwijderen mogelijk. Eerst keuze bij skin tears.	Drager van glad synthetisch weefsel geïmpregneerd met neutrale zelf op basis van Eucel®. Voorkomt ingroeven van granulatiweefsel en hierdoor pijn bij verbandwissel. Laat wondvocht door naar secundair verband.
Toepassing	Ja	Nee	Ja	Ja
Maten & bestelinformatie	Leukoplast® compress non-woven Per 100 (nonsteriel) 5 x 5 cm 71287-00 10 x 10 cm 71287-03 Per 50 x 2 (steriel) 5 x 5 cm 71288-00 10 x 10 cm 71288-09	Leukoplast® compress absorberent soft 10 x 10 cm 71280-00 10 x 20 cm 71280-01 20 x 20 cm 71280-03 20 x 40 cm 71280-04	Cuticell® Contact 5 x 7,5 cm 72680-00 7,5 x 10 cm 72680-01 10 x 18 cm 72680-02 15 x 25 cm 72680-03	Cuticell® 7,5 x 7,5 cm 72539-00 7,5 x 10 cm 72539-01 20 x 20 cm 72539-02

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie ontvangen over onze producten en/of de toepassing in wondbehandeling? Neem dan contact op met de medisch adviseur in jouw regio.

Je kunt ook mailen naar wondzorg.nl@medical.essity.com. Wij zullen ervoor zorgen dat een medisch adviseur uit jouw regio contact met je opneemt.

Onze medisch adviseurs hebben een verpleegkundige achtergrond en kennis over wondgenezing en wondbehandeling.

Benieuwd naar ons complete assortiment op het gebied van wondzorg? Scan dan nu de QR code!

Ons aanbod van educatie en events voor zorgprofessionals

Hoogwaardige trainingen, scholingen en inspirerende evenementen, speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals ter ondersteuning van Essity's brede productportfolie. **Scan de QR code voor meer informatie over het uitgebreide programma van onze Cutimed Academy!**

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose (dood weefsel)
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus (geel) beslag
- Wond met necrose (rode vorming)
- Epithelialiserende wond (huidvorming)

Hoeveelheid wondvocht

- Geen tot weinig wondvocht
- Weinig tot matig wondvocht
- Matig tot veel wondvocht
- Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep