

Algemeen Wondprotocol Complexe Wonden



| | | | | M O I S T U R E | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Protocol wondbehandeling | | | | ☐☐☐☐ Droog | ☐☐☐ Vochtig | ☐☐☐ Nat | Opmerking |
| T I S U E | Rood | Granulatieweefsel beschermen | Oppervlakkig & Diep | Leukomed T Plus skin sensitive | Cutimed Gelling Fiber + Cutimed Siltec + fixatie | Leukoplast compress absorberend soft + fixatie | Een rode wond (granulatieweefsel) waarin de wondgenezing stagneert en/of die (plotseling) veel meer wondvocht produceert: neem contact op met de wondverpleegkundige. |
| | Geel | Reinigen van fibrine / debris (geel beslag) | Oppervlakkig & Diep | Cutimed Gel + Cutimed Siltec + fixatie | Cutimed Alginate + Cutimed Siltec + fixatie | Cutimed Alginate + Leukoplast compress absorberend soft + fixatie | |
| | Met infectieverschijnselen | Lokaal infectie voorkomen of behandelen Wond met kenmerken van of risico op infectie | Oppervlakkig & Diep | Cutimed Gel + Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie | Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie | Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Leukoplast compress absorberend soft + fixatie | Als er sprake is van pus, koorts, algehele malaise ("griepig gevoel") en/of als er 2 weken na ontstaan van de wond sprake is van warmte, zwelling, pijn en roodheid (toenemend tot > 2cm rondom de wond). |
| | Zwart | Niet vitaal weefsel (o.a. necrose, biofilm) verwijderen (en lokaal infectie bestrijden) | Oppervlakkig & Diep | Droog verbinden als geen er infectie-kenmerken zijn | Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Cutimed Siltec + fixatie | Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook + Leukoplast compress absorberend soft + fixatie | Necrose is risico op infectie en dient zo snel als mogelijk verwijderd te worden. Bij voorkeur door scherp debridement. Let op bij necrose (dood weefsel) door vaatlijden: in principe droog verbinden en arts informeren. |
| | | | Een diepe wond maximaal 2/3 deel opvullen met Cutimed Alginate of Cutimed Sorbact kompres / gaasstrook / gel | Wissel-frequentie: 1 à 2x per week | Wissel-frequentie: 3x per week | Wissel-frequentie: 1x per dag. Indien secundaire verband verzadigd, eerder wisselen | EDGE Overweeg bij natte/zeer natte wond wondrandbeschermers: Cutimed Protect |
| | | | | Bij zeer natte wonden kan Cutimed Sorbion een goede keuze zijn. Overleg met behandelaar. | | | |

| Cutimed - moderne wondverbanden | Cutimed® Sorbact®/Sorbact® gel | Cutimed® Siltec® (standaard) | Cutimed® Sorbion® Border® | Cutimed® Sorbion® Sachet S | Cutimed® Alginate |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | |
| Productomschrijving | Behandelt en voorkomt wondinfecties zonder het natuurlijke wondgenezingsproces nadelig te beïnvloeden: • Kompres • Gaasstrook • Gelverband. | Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag zonder border. Ook dunne variant (L) beschikbaar. Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid. | Superabsorberend verband met zelfklevende, siliconen border voor traumatische verbandwissels. Geschikt voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven. | Superabsorberend, hypo-allergeen wondverband voor wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven. Gelurende kern na absorptie van wondvocht. Creëert een vochtig wondmilieu. | Calcium-natrium alginaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het gelurende verband is stabiel door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen). |
| Eigenschappen en functies | Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Geen risico op ontwikkeling van resistente bacteriën • Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond • Geen contra-indicaties bekend • Laag risico op allergieën • Kompres: max 4 lagen aanbrengen • Gaasstrook: voor bijv. diepe wonden (fistels), bij smetten en tussen tenen • Sorbact gel: voor droge tot matig vochtige wonden en bij geel beslag, binnen de wondrand aanbrengen. | • Niet verklevende siliconen wondcontactlaag • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu • Siltec (standaard) • ook anatomische vorm (3D): extra dik voor polsterend effect. | • Huidvriendelijk klevende siliconen border • Waterdichte folie toplaag • Superabsorberende kern • Hypoallergene wondcontactlaag (soft debridement) • Geen secundaire fixatie nodig. | • Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie • Verwijderd op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat • Geen secundair verband nodig • Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband. | • Sterk absorberend en gelierend wondmilieu • Creëert een vochtig wondmilieu • Gemaakt van natuurlijk zeewier • In zijn geheel te verwijderen • Mag op maat geknipt worden • Zacht en plooibaar • Licht hemostatisch effect. |
| Toepassing | Ja, mits uiteinden buiten wond blijven (dit geldt voor de gaasstrook) | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Indicaties | Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven. | Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven. | Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven. | Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven. Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht. | Voor oppervlakkige en diepe wonden die matig tot veel wondvocht afgeven. |
| Maten & bestelinformatie | Cutimed® Sorbact® kompres 4 x 6 cm 72164-17 7 x 9 cm 72165-15 Cutimed® Sorbact® gaasstrook 2 x 50 cm 72166-11 5 x 200 cm 72167-07 Cutimed® Sorbact® gel 7,5 x 7,5 cm 72611-20 7,5 x 15 cm 72611-21 15 x 20 cm 72611-28 | Cutimed® Siltec® 5 x 5 cm 73285-00 10 x 10 cm 73285-01 Ook verkrijgbaar: Cutimed Siltec Heel 3D. | Cutimed® Sorbion® Border® Afmeting wondkussen 5 x 5 cm 71010-00 10 x 10 cm 71010-01 15 x 15 cm 71010-02 20 x 20 cm 71010-03 10 x 23 cm 71010-04 | Cutimed® Sorbion® Sachet S 7,5 x 7,5 cm 73232-00 10 x 10 cm 73232-06 15 x 15 cm 73232-12 Cutimed® Sorbion® Sachet XL 45 x 25 cm 73240-00 | Cutimed® Alginate 5 x 5 cm 72634-08 10 x 10 cm 72634-09 Streng 30 cm 72634-11 |

| Cutimed - moderne wondverbanden | Cutimed® Gel | Cutimed® Gelling Fiber | Cutimed® Debriclean | Cutimed® Protect | Cutimed® Acute | TENA ProSkin Barrier Cream |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | |
| Productomschrijving | Transparante en vormloze hydrogel. Ondersteunt het autolytisch debridement. | Een gevormd fiber verband gemaakt van natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende vezels. | Debridement pad (met handlus) voor mechanisch debridement. Verwijderd op patiëntvriendelijke wijze niet-vitaal weefsel (debris, necrose) en biofilm en helpt optimale omstandigheden voor wondgenezing te creëren. | Duurzame bescherming van de huid tegen invloed van wondvocht en andere lichaamsvocht. Gaat vochtverlies van de huid tegen. | Huidverzorgende mousse op basis van urea. Bindt vocht, hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies. Eenvoudig toe te passen, trekt snel in en maakt de huid niet vet. | Zachte en transparante crème met natuurlijke oliën en vitamine E. Kalmerend en verzorgend. |
| Eigenschappen en functies | • Effectief debridement van necrotisch weefsel en fibrineus (geel) beslag • Zonder conserveermiddelen om het risico van allergische reacties tot een minimum te beperken • Transparant • Eenvoudig aan te brengen (met applicator). | Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen. | • Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvoestof (hier kan de blisterverpakking voor worden gebruikt) • Twee soorten vezels voor optimaal debridement • Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, ook als er sprake is van huidkeratosen. | • Alcoholvrij • Vormt gelijkmatige en waterdichte film die waterdamp- en zuurstofdoorlatend is • Bescherming wondranden en huid rondom de wond. Voorkomt verwerking. | • Brengt balans in het vochtgehalte van de huid • Maakt huid zacht en soepel • Stabiliseert de natuurlijke werking van de huid • Stimuleert regeneratie van de opperhuid • Vermindert jeuk • Niet aanbrengen in het gezicht. | • Zorgt voor een waterafstotende barrière • Ideaal voor mensen met een kwetsbare en gevoelige huid • Voor preventief gebruik op plaatsen die roodheid en irritatie vertonen • Zondar parfum en conserveermiddelen. |
| Toepassing | Niet van toepassing | Ja, maar mag over de wondranden worden aangebracht | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Indicaties | Voor oppervlakkige en diepe droge wonden. | Voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven, die oppervlakkig of diep zijn. | Patiëntvriendelijk en snel debridement. | Voor het beschermen van kwetsbare wondranden en de huid. | Geschikt voor de zeer droge en kwetsbare huid. | Geschikt voor de kwetsbare en gevoelige huid. |
| Maten & bestelinformatie | Cutimed® Gel 8 gr 72610-00 15 gr 72610-01 25 gr 72610-02 | Cutimed® Gelling Fiber 5 x 5 cm 71218-00 10 x 10 cm 71218-01 15 x 15 cm 71218-02 2 x 45 cm 71218-06 | Cutimed® Debriclean 9 x 13 cm 76170-00 | Cutimed® Protect Spray 28 ml 72653-00 Cutimed® Protect Swab 1 ml per 5 72654-00 3 ml per 5 72654-02 | Cutimed® Acute 125 ml 72641-05 | TENA ProSkin Barrier Cream 150 ml 4419 |

| Leukoplast - fixatie producten | Leukoplast® Fixomull® stretch / Fixomull® skin sensitive | Leukoplast® Fixomull® transparant | Leukomed® skin sensitive / Leukomed® T plus skin sensitive | Leukopor® / Leukosilk® / skin sensitive | Leukoplast® Elastomull® / Elastomull® Haft |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| Productomschrijving | Leukoplast® Fixomull® stretch Volvulfixatie (non-woven) met polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® Fixomull® skin sensitive Volvulfixatie (non-woven) met siliconen kleeflaag. | Leukoplast® Fixomull® transparant Volvulfixatie (folie) met polyacrylaat kleeflaag. | Leukomed® skin sensitive / Leukomed® T plus skin sensitive Eilandpleisters voor de zeer gevoelige of kwetsbare huid. | Leukoplast® Leukopor® Hechtpleister non-woven (papier) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® Leukosilk® Hechtpleister acetata (kunstzijde) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® skin sensitive Hechtpleister acetata (kunstzijde) drager. Siliconen kleeflaag. | Leukoplast® Elastomull® Fixatiwindsel. Leukoplast® Elastomull® Haft Op zichzelf klevend fixatiwindsel. |
| Eigenschappen en functies | Non-woven toplaag. Breedterek. Voor fixeren van wondverband. Op rol en voor gebruik op maat te knippen. Leukoplast® Fixomull® stretch Voor normale, gevoelige huid. Leukoplast® Fixomull® skin sensitive Voor zeer gevoelige of kwetsbare huid. | Folie toplaag. Breedte- en lengterek. Voor fixeren van wondverband. Voor normale en gevoelige huid. Op rol en voor gebruik op maat te knippen. Geschikt om mee te douchen. | Leukomed® skin sensitive Steriele, zachte, non-woven eilandpleister met siliconen kleeflaag. Leukomed® T plus skin sensitive Steriele, waterdichte, absorberende eilandpleister voor licht en matig exuderende acute wonden. | Leukoplast® Leukopor® Non-woven hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukoplast® Leukosilk® Acetaat hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukoplast® skin sensitive Acetaat hechtpleister voor zeer gevoelige of kwetsbare huid. | Leukoplast® Elastomull® Elastisch, comfortabel fixatiwindsel. Leukoplast® Elastomull® Haft Elastisch, comfortabel, op zichzelf klevend fixatiwindsel. Latexvrij. |
| Toepassing | Ja | Ja | Ja | Ja, ook scheurbaar | Ja |
| Maten & bestelinformatie | Leukoplast® Fixomull® stretch 10 m x 5 cm 79992-00 10 m x 10 cm 79992-02 10 m x 15 cm 02038-00 10 m x 20 cm 02039-00 2 m x 10 cm 79992-05 Leukoplast® Fixomull® skin sensitive 5 m x 5 cm 79965-01 5 m x 10 cm 79965-02 5 m x 15 cm 79965-03 2 m x 10 cm 79965-04 | Leukoplast® Fixomull® transparant 10 m x 5 cm 72216-00 10 m x 10 cm 72216-01 10 m x 15 cm 72216-02 2 m x 10 cm 72217-00 | Leukomed® skin sensitive 5 x 7,2 cm 71239-04 8 x 10 cm 71239-05 8 x 15 cm 71239-06 Leukomed® T plus skin sensitive 5 x 7,2 cm 76178-00 8 x 10 cm 76178-01 8 x 15 cm 76178-02 10 x 25 cm 76178-03 | Leukoplast® Leukopor® Met klemming 5 m x 1,25 cm 02471-00 5 m x 2,50 cm 02472-00 Leukoplast® Leukosilk® Met klemming 5 m x 1,25 cm 01021-00 5 m x 2,50 cm 01022-00 Leukoplast® skin sensitive Met klemming 1,25 cm x 2,6 m 76173-00 2,5 cm x 2,6 m 76173-01 2,5 cm x 1 m 76173-06 | Leukoplast® Elastomull® Geceflofanerd 4 m x 4 cm 02094-00 4 m x 6 cm 02095-00 4 m x 8 cm 02096-01 4 m x 10 cm 02097-00 Leukoplast® Elastomull® Haft Per stuk verpakt 4 m x 4 cm 45470-00 4 m x 6 cm 45471-00 4 m x 8 cm 45472-00 4 m x 10 cm 45473-00 |

| Wondbedekker | Leukoplast® compress non-woven | Leukoplast® compress absorberend soft | Cuticell® Contact | Cutimed® Cuticell® |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | |
| Productomschrijving | Absorberend gaaskompres voor o.a. afdekken, reinigen en behandeling van wonden. Zacht en comfortabel. | Absorberend wondverband voor het bedekken en beschermen van wonden met matig tot veel exsudaat of vocht. Bevat hydrofobe lagen om de wond te beschermen tegen vocht van buitenaf. | Huidvriendelijke siliconen wondcontactlaag. Bescherm het wondbed en zorgt ervoor dat het wondgenezingsproces niet wordt verstoord. Heeft een open structuur voor het doorlaten van wondvocht. Geschikt voor acute en complexe wonden met matig tot veel wondvocht. | Niet-verklevend synthetisch zelfgaas. Werkt verzachtend en voorkomt ingroeven van weefsel, waardoor de pijn bij het verwisselen minimaal is. Geschikt voor mensen met een gevoelige huid. |
| Eigenschappen en functies | 70% viscoso en 30% polyester, met een gladde, zeer hechtende structuur, waardoor er minimale hechting aan de wond ontstaat. | Non-woven wondcontactlaag. Met antidorlek-laag. Verkleeft niet aan het wondbed. Uitsluitend steriel te verkrijgen. (Let op: blauwe zijde = bovenkant.) | Transparante, flexibele folie met siliconen wondcontactlaag. Verwijdering mogelijk. Pijnloos aanbrengen en verwijderen mogelijk. Eerste keuze bij skin tears. | Drager van glad synthetisch weefsel geïmpregneerd met neutrale zelf op basis van Eucel®. Voorkomt ingroeven van granulatieweefsel en hierdoor pijn bij verbandwissel. Laat wondvocht door naar secundair verband. |
| Toepassing | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Maten & bestelinformatie | Leukoplast® compress non-woven Per 100 (non-steriel) 5 x 5 cm 71287-00 10 x 10 cm 71287-03 Per 50 x 2 (steriel) 5 x 5 cm 71288-00 10 x 10 cm 71288-09 | Leukoplast® compress absorberent soft 10 x 10 cm 71280-00 10 x 20 cm 71280-01 20 x 20 cm 71280-03 20 x 40 cm 71280-04 | Cuticell® Contact 5 x 7,5 cm 72680-00 7,5 x 10 cm 72680-01 10 x 18 cm 72680-02 15 x 25 cm 72680-03 | Cutimed® Cuticell® 7,5 x 7,5 cm 71007-00 7,5 x 10 cm 71007-01 20 x 20 cm 71007-04 |

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie ontvangen over onze producten en/of de toepassing in wondbehandeling? Neem dan contact op met de medisch adviseur in jouw regio.

Je kunt ook mailen naar wondzorg.nl@medical.essity.com. Wij zullen ervoor zorgen dat een medisch adviseur uit jouw regio contact met je opneemt.

Onze medisch adviseurs hebben een verpleegkundige achtergrond en kennis over wondgenezing en wondbehandeling.

Benieuwd naar ons complete assortiment op het gebied van wondzorg? Scan dan nu de QR code!

Ons aanbod van educatie en events voor zorgprofessionals

Hoogwaardige trainingen, scholingen en inspirerende evenementen, speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals ter ondersteuning van Essity's brede productportfolio. **Scan de QR code voor meer informatie over het uitgebreide programma van onze Cutimed Academy!**

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose (dood weefsel)
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus (geel) beslag
- Wond met necrose (rode vorming)
- Epithelialiserende wond (huidvorming)

Hoeveelheid wondvocht

- Geen tot weinig wondvocht
- Weinig tot matig wondvocht
- Matig tot veel wondvocht
- Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep