

Skin tear	
	Reinig de skin tear altijd met lauw stromend water en dep droog. Stelp evt bloeding en leg, indien aanwezig, de huidflap terug. Gebruik geen kleeflagen van polyacrylaat en geen hechtstrips of hechtingen.
Optie 1	Optie 2
Fixeer huidflap en bescherm wondbed: Cutimed Cuticell Contact (met kleefrand).	Fixeer huidflap en bescherm wondbed: Cutimed Siltec B
Bedek met Leukoplast compress absorberent soft (<i>absorberend verband</i>)	Geef met een pijl op het schuimverband aan in welke richting het verband verwijderd moet worden.
Fixeer met Elastomull (<i>fixatiewindndsel</i>) en zet vast met hechtpleister zoals Leukopor	Cutimed Siltec B max. 7 dagen laten zitten
Cutimed Cuticell Contact max. 14 dagen laten zitten. Leukoplast compress absorberent soft zo nodig eerder vervangen	
Bij volledig verlies huidflap, zeer veel wondvocht of vermoeden van wondinfectie: zie algemeen advies bij stap 3.	
Definitie wondinfectie	

STAP 2

Behandelen of verwijzen?

Verwijzen algemeen:
Zie NHG standaarden voor verwijscriteria - NB deze wijken soms af van Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg Nederland 2018
Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg Nederland (2018) adviseert te verwijzen naar expert team (wond expertise centrum) als wond na 3 weken geen genezingstendens vertoont. Dat kan dus ook bij ulcus cruris (venosum) of andere wonden zinvol zijn.
Patiënten met diabetes en een wond onder de enkel? Zie “verwijzen diabetische voet”.
Snel advies wondbehandeling skin tear? Zie behandeladvies in apart kader.

Verwijzen diabetische voet (Criteria volgens richtlijn Diabetische Voet NIV 2017):	
Uitsluitend een niet-plantair gelegen, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder tekenen van perifeer vaatlijden, dat met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing volledig drukvrij gelegd kan worden, kan door de huisarts worden behandeld, bij voorkeur in samenwerking met een podotherapeut	
Verwijscriteria naar voetenteam	
Acuut	Bij algehele malaise / koorts
	Bij verdenking van bedreigende situatie = ≥ 1 van volgende kenmerken: ischemie en/of infectie
< 24 uur	Diep ulcus
	Tekenen van infectie
	Aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
	Verdenking Charcot: elke rode, gezwollen, warme voet is een Charcotvoet tot het tegendeel bewezen is
< 7 dagen	Plantair ulcus zonder tekenen van infectie of perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Na 2 weken	Elk ulcus dat niet genezen is
Patiënt komt retour 1e lijn	Na genezing van het ulcus en als er geen dwingende reden is de patiënt in 2e lijn te vervolgen

M O I S T U R E		Doel wondbehandeling		T		I		S		S		U		E	
Droog ○○○○		Cuttimed Siltec		Cuttimed Siltec		Cuttimed Siltec		Cuttimed Siltec		Cuttimed Siltec		Cuttimed Siltec of Leukomed of Leukoplast + Leukoplast		Cuttimed Sorbact Hydro + Cutimed Siltec	
Vochtig ○○○		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbact + Cutimed Contact/Ribbon		Cuttimed Sorbact Hydro + Cutimed Siltec	
Nat ○○○		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbact + Cutimed Contact/Ribbon		Cuttimed Sorbact Hydro + Cutimed Siltec	
Zeer Nat ○○○		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbion Sachet S		Cuttimed Sorbact + Cutimed Contact/Ribbon		Cuttimed Sorbact Hydro + Cutimed Siltec	
Verband- wissel		1-3 x per week		1-3 x per week		1-3 x per week		1-3 x per week		1-3 x per week		3 x per week		1-4 x per week, afhankelijk van wondvocht	
Opmerking		Een wond met granulatieweefsel waarin de wondgenezing stagneert en/of die plotseling veel meer exsudaat produceert: overweeg verwijzen naar een expert team.		Niet vitaal weefsel kan de wondgenezing belemmeren: overweeg ondersteunen autolytisch debridement door een mechanisch debridement met een katoenen gaas (Leukoplast compress cotton).		Altijd overwegen een wondinfectie systemisch te behandelen en dit lokaal ondersteunen met wondverband. (scherp) debridement overwegen om wondbed te reinigen (verwijderen biofilm). Als scherp debridement niet kan is mechanisch debridement met een katoenen gaas een goede optie (Leukoplast compress cotton)		Lokaal infectie voorkomen of behandelen		Niet vitaal weefsel (o.a. necrose, biofilm) verwijderen (en lokaal infectie bestrijden)		Bij (zeer) natte wonden gebruik van Cutimed Protect (wondrandbescherm) overwegen.		Aandachtspunten: - Diepe wond opvullen (max 2/3e) met Cutimed Sorbact - Contact/Ribbon/Hydro of Cutimed Alginate - Cutimed Sorbact Hydro & Cutimed Alginate wondranden aanbrengen.	

STAP 3

Een wondverband kiezen

essity

08/2025

09240688M

08/2025

09240688M

essity

Cutimed®, an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.medical.essity.nl

Legenda

Type weefsel

■

Wond met necrose (dood weefsel)

■

Geïnfecteerde wond

■

Wond met fibrineus (geel) beslag

■

Granulerende wond (rode wond)

■

Epithelialiserende wond (huidvorming)

Hoeveelheid wondvocht

○○○○ - ●○○○

Geen tot weinig wondvocht

●○○○ - ●●○○

Weinig tot matig wondvocht

●●○○ - ●●●○

Matig tot veel wondvocht

●●●○ - ●●●●

Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

🪶

Oppervlakkig

🪶

Diep

🪶

Oppervlakkig + diep

essity

08/2025

09240688M

08/2025

09240688M

essity

Cutimed®, an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.medical.essity.nl

Secundair en complex genezende wonden

Basisadvies voor veilig starten wondbehandeling

08/2025

09240688M

Producten & indicaties		Generiek	
Schuimverband		Indicatie	
Met niet verkleurende siliconen wond- contactaag zonder border		Droge / vochtige wond (dunner)	
Met huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactaag met of zonder border		Droge / vochtige wond (zonder border)	
Absorberend verband		Leukoplast compress absorberent soft	
Suprabsorberend verband		Matig vochtig tot zeer natte wond	
Alginaat verband		Wond met fibrine / debris of diepe natte wond opvullen	
Bacteriënbindend verband		Lokaal infectie voorkomen of behandelen	
Zalfgaas		Cutimed Cuticell	
Siliconen wondcontactaag		Beschermen wondbed (<i>siliconen kleeflaag</i>) en fixeren huidflap bij Contact	
Huid-/wondrand- bescherm		Natte of zeer natte wond (zo nodig, afhankelijk van keuze wondverband)	
Hechtpleister		Leukopor of Leukosilk	
Volvalafixatie		Zeer gevoelige huid (<i>siliconen kleeflaag</i>)	
Fixatiewindndsel (op zichzelf klevend)		Als niet klevende fixatie nodig is Elastomull (haft)	

STAP 4

Informatie wondverband & fixatie

Anamnese wond ALTIS & TIME	
ALTIS	TIME
A = Aard van de wond	T = Tissue (weefsel)
L = Locatie van de wond	I = Infectie / Inflammatie (infectie of -verlengde- inflammatiefase)
T = Hoe lang bestaat de wond	M = Moisture (exsudaat)
I = Intensiteit, classificatie	E = Edge (wondranden: wel/niet vitaal, ondermijnd)
S = Beloop, behandeling, bijkomende klachten	

Dit protocol geldt niet voor:		
Brandwonden		
Oncologische wonden en - ulcera		
Bij diabetische voet gelden bijzondere aandachtspunten: zie NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 en richtlijn NIV Diabetische Voet 2017		

Contactgegevens

Mijn contactpersonen bij Essity

Naam:	Telefoonnummer:	E-mailadres:

Mijn contactpersonen in de regio

Naam:	Telefoonnummer:	E-mailadres:

Cutimed - moderne wondverbanden								
Product-omschrijving	Bacteriënbindend wondverband. Behandelt wondinfecties zonder het natuurlijke wondgenezingsproces nadelig te beïnvloeden dankzij de effectieve Sorbact technologie: • Kompres • Gaasstrook.	Bacteriënbindend kompres met hydrogel. Behandelt wondinfecties zonder het natuurlijke wondgenezingsproces nadelig te beïnvloeden dankzij de effectieve Sorbact technologie.	Schuimverband met superabsorbers en <u>niet verklevende</u> wondcontactlaag zonder border. Ook dunne variant (L) beschikbaar. Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid.	Schuimverband met superabsorbers en <u>huidvriendelijk klevende</u> siliconen wondcontactlaag (PLUS). Ook met siliconen border (B) beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid.	Calcium-natrium alginaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het gelerend verband is stabiel door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).	Een gevormend fiber verband gemaakt van natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende vezels.	Suparbsorberend, hypo-allergeen wondverband voor wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven. Gelerende kern na absorptie van wondvocht. Creëert een vochtig wondmilieu.	Superabsorberend verband met zelfklevende, siliconen border voor atraumatische verbandwissels. Geschikt voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven.
Eigenschappen en functies	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend • Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond • Geen contra-indicaties bekend • Laag risico op allergieën • Kompressen: max 4 lagen aanbrengen • Gaasstroken: voor bijv. diepe wonden (fistels), bij smetten en tussen tenen.	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend • Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond • Geen contra-indicaties bekend • Laag risico op allergieën • Ondersteunt het autolytisch debridement.	• Niet verklevende siliconen wondcontactlaag • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu • Siltec (standaard) - ook anatomische vorm hiel (3D); extra dik voor polsterend effect.	• Huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag (en border) • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu • Siltec PLUS - ook anatomische vorm hiel (2D); extra dik voor polsterend effect • Siltec B (Border) - douchebestendig - ook ovaal - ook anatomische vorm Sacrum; extra dik voor polsterend effect.	• Sterk absorberend en gelerend • Creëert een vochtig wondmilieu • Gemaakt van natuurlijk zeewier • In zijn geheel te verwijderen • Mag op maat geknipt worden • Zacht en plooibaar • Licht hemostatisch effect.	Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen.	• Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie • Verwijdt op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of klefmiddelen bevat • Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht • Geen secundair verband nodig • Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband.	• Huidvriendelijk klevende siliconen border • Waterdichte folie toplaag • Superabsorberende kern • Hypoallergene wondcontactlaag (soft debridement) • Geen secundaire fixatie nodig.
Toepassing	 Ja, mits uiteinden buiten wond blijven	 Ja, mits uiteinden buiten wond blijven	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja maar mag over de wond-randen worden aangebracht	 Nee	 Ja, alleen de borderrand
Maten & bestelinformatie	Cutimed® Sorbact Contact® (kompres) 4 x 6 cm 72164-33 7 x 9 cm 72165-63 Cutimed® Sorbact Ribbon® (gaasstrook) 2 x 50 cm 72166-17 5 x 200 cm 72167-11 Ook verkrijgbaar: Cutimed Siltec Sorbact & Cutimed Sorbion Sorbact.	Cutimed® Sorbact Hydro® (gel) 7,5 x 7,5 cm 72611-44 7,5 x 15 cm 72611-45 15 x 20 cm 72611-46	Cutimed® Siltec® 5 x 6 cm 73285-00 10 x 10 cm 73285-01 15 x 15 cm 73285-03 Heel 3D 73286-01 Cutimed® Siltec® L 5 x 6 cm 73283-00 10 x 10 cm 73283-01 15 x 15 cm 73283-02	Cutimed® Siltec® PLUS 5 x 6 cm 73288-00 10 x 10 cm 73288-01 15 x 15 cm 73288-03 Heel 2D 73286-00 Cutimed® Siltec® B 7,5 x 7,5 cm 73284-00 12,5 x 12,5 cm 73284-01 7 x 10 cm (ovaal) 73284-14 13 x 16 cm (ovaal) 73284-21 17,5 x 17,5 cm 73284-03	Cutimed® Alginate 5 x 5 cm 72634-12 10 x 10 cm 72634-13 Streng 30 cm 72634-15	Cutimed® Gelling Fiber 5 x 5 cm 71218-00 10 x 10 cm 71218-01 15 x 15 cm 71218-02 2 x 45 cm 71218-06	Cutimed® Sorbion® Sachet 7,5 x 7,5 cm 73232-00 10 x 10 cm 73232-06 15 x 15 cm 73232-12 MultiStar Ø 8 cm 73237-01 Ook verkrijgbaar: Cutimed Sorbion Sorbact	Cutimed® Sorbion® Border 10 x 10 cm 71010-00 15 x 15 cm 71010-02 20 x 20 cm 71010-03 10 x 23 cm 71010-04

Huidreiniging, -verzorging en -bescherming	
Product-omschrijving	Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen vochtverlies van de huid.
Eigenschappen en functies	• Alcoholvrij • Vormt gelijkmatige en waterdichte film die waterdamp- en zuurstofdoorlatend is.
Maten & bestelinformatie	Spray 28 ml 72653-00 Swab 1 ml per 5 72654-00 3 ml per 5 72654-02 Crème 28 gr 72652-00

Huidverzorging

Ter preventie van huidbeschadiging en verzorging van de huid in het algemeen, gebruik een verzorgend product zoals Cutimed Acute. Dit kan ook icm elastische kousen worden gebruikt. Bij vochtletsel kies voor TENA ProSkin Barrier Cream en bij geïrriteerde of beschadigde huid kies voor TENA ProSkin Zinc Cream.

Cutimed® Acute
125 ml 72641-05

TENA ProSkin Barrier Cream
150 ml 4419

TENA ProSkin Zinc Cream
150 ml 4294

Compressietherapie

Kies het juiste compressieproduct bij de juiste indicatie en passend bij de patiënt. Gebruik hiervoor het JOBST Compressie stroomschema.



Meer informatie?

Ook in het Cutimed assortiment: Cutimed gel (hydrogel), Cutimed Hydro L/B (hydrocolloid), Cutimed Epiona (collageen), Cutimed Cavity, Cutimed Acute (huidverzorgende mousse met 5% urea).



Zie www.medical.essity.nl

Leukoplast - fixatie producten							
Product-omschrijving	Volvlakfixatie (non-woven) met polyacrylaat kleeflaag.	Volvlakfixatie (non-woven) met siliconen kleeflaag.	Volvlakfixatie (folie) met polyacrylaat kleeflaag.	Leukomed® skin sensitive / Leukomed® T plus skin sensitive Eilandpleisters voor de zeer gevoelige of kwetsbare huid.	Leukopor® Hechtpleister non-woven (papier) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukosilk® Hechtpleister acetaat (kunstzijde) drager. Polyacrylaat kleeflaag. Leukoplast® skin sensitive Hechtpleister acetaat (kunstzijde) drager. Siliconen kleeflaag.	Fixatiewindsel.	Op zichzelf klevend fixatiewindsel.
Eigenschappen en functies	Non-woven toplaag. Breedterek. Voor fixeren van wondverband of vilt. <u>Voor normale en gevoelige huid.</u> Op rol en voor gebruik op maat te knippen.	Non-woven toplaag. Breedterek. Voor fixeren van wondverband of vilt. <u>Voor zeer gevoelige of kwetsbare huid.</u> Op rol en voor gebruik op maat te knippen.	Folie toplaag. Breedte- en lengterek. Voor fixeren van wondverband. Voor normale en gevoelige huid. Op rol en voor gebruik op maat te knippen. Geschikt om mee te douchen.	Leukomed® skin sensitive Steriele, zachte, non-woven eilandpleister met siliconen kleeflaag. Leukomed® T plus skin sensitive Steriele, waterdichte, absorberende eilandpleister voor licht en matig exsuderende acute wonden.	Leukopor® Non-woven hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukosilk® Acetaat hechtpleister voor normale en gevoelige huid. Leukoplast® skin sensitive Acetaat hechtpleister voor zeer gevoelige of kwetsbare huid.	Elastisch, comfortabel fixatiewindsel.	Elastisch, comfortabel, op zichzelf klevend fixatiewindsel. Latexvrij.
Toepassing	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja, ook scheurbaar	 Ja	 Ja
Maten & bestelinformatie	Leukoplast® Fixomull® stretch 10 m x 5 cm 79992-00 10 m x 10 cm 79992-02 10 m x 15 cm 02038-00 10 m x 20 cm 02039-00 2 m x 10 cm 79992-05	Leukoplast® Fixomull® skin sensitive 5 m x 5 cm 79965-01 5 m x 10 cm 79965-02 5 m x 15 cm 79965-03 2 m x 10 cm 79965-04	Leukoplast® Fixomull® transparent 10 m x 5 cm 72216-00 10 m x 10 cm 72216-01 10 m x 15 cm 72216-02 2 m x 10 cm 72217-00	Leukomed® skin sensitive Per 5 5 x 7,2 cm 71239-04 8 x 10 cm 71239-05 8 x 15 cm 71239-06 Leukomed® T plus skin sensitive Per 5 5 x 7,2 cm 76178-00 8 x 10 cm 76178-01 8 x 15 cm 76178-02 10 x 25 cm 76178-03	Leukopor® Met klemring 5 m x 1,25 cm 02471-00 5 m x 2,50 cm 02472-00 Leukosilk® Met klemring 5 m x 1,25 cm 01021-00 5 m x 2,50 cm 01022-00 Leukoplast® skin sensitive Met klemring 1,25 cm x 2,6 m 76173-00 2,5 cm x 2,6 m 76173-01 2,5 cm x 1 m 76173-06	Leukoplast® Elastomull® Per stuk verpakt in cellofaan 4 m x 4 cm 02094-00 4 m x 6 cm 02095-00 4 m x 8 cm 02096-00 4 m x 10 cm 02097-00 Per stuk zonder cellofaan 4 m x 4 cm 02099-00 4 m x 6 cm 02100-00 4 m x 8 cm 02101-00 4 m x 10 cm 02102-00 4 m x 12 cm 02103-00	Leukoplast® Elastomull® haft 4 m per rol 4 m x 4 cm 45470-00 4 m x 6 cm 45471-00 4 m x 8 cm 45472-00 Ook in rood en blauw beschikbaar 20 m per rol 20 m x 4 cm 45475-00 20 m x 6 cm 45476-00 20 m x 8 cm 45477-00

Traditionele wondverbanden					
Product-omschrijving	Huidvriendelijk non-woven kompres. Gemaakt van 100% katoen. Dit absorberend gaaskompres is geschikt voor de bescherming, reiniging en afdekking van wonden. Huidvriendelijk en ademend.	Absorberend verband. Het waterafstotende wondkussen is ontworpen om te beschermen tegen druk, schokken en water. Geschikt voor de behandeling van matig tot veel vochtafgevende wonden.	Steriele eilandpleister met polyacrylaat kleeflaag.	Hygiënische onsteriele pleister met polyacrylaat kleeflaag.	Huidvriendelijke siliconen wondcontactlaag. Bescherm het wondbed en zorgt ervoor dat het wondgenezingsproces niet wordt verstoord. Heeft een open structuur voor het doorlaten van wondvocht. Geschikt voor acute en complexe wonden met matig tot veel wondvocht.
Eigenschappen en functies	Zacht en comfortabel non-woven kompres. Verkrijgbaar in steriel en niet-steriele varianten. Voor het gebruik bij sondes, drains en katheters (steriel) en deppers (niet steriel).	Met antidoorleklaag. Zachte randen. Verkleeft niet aan het wondbed. Verkrijgbaar in steriele en niet-steriele varianten. (Let op: blauwe rand = bovenkant.)	Non-woven per stuk verpakte steriele eilandpleister. Met klevende boderrand en afgeronde hoeken. Voor normale en gevoelige huid.	Zachte, plooibare wondpleister met laag risico op verkleven en polyacrylaat kleeflaag. Voor normale en gevoelige huid.	Transparante, flexibele folie met siliconen wondcontactlaag. Eenzijdig klevend. Pijnloos aanbrengen en verwijderen mogelijk. Eerste keuze bij skin tears.
Toepassing					
Maten & bestelinformatie	 Ja	 Nee	 Ja (alleen in klevende rand)	 Ja	 Ja
Maten & bestelinformatie	Leukoplast® compress non-woven Per 100 (onsteriel) 5 x 5 cm 71287-00 10 x 10 cm 71287-03 Per 50 x 2 (steriel) 5 x 5 cm 71288-00 10 x 10 cm 71288-09	Leukoplast® compress absorbent soft 10 x 10 cm 71280-00 10 x 20 cm 71280-01 20 x 20 cm 71280-03 20 x 40 cm 71280-04	Leukoplast® Leukomed® Per 5 7,2 x 5 cm 72380-07 Per 50 7,2 x 5 cm 72380-00 8 x 10 cm 72380-01	Leukoplast® soft white Op rol 5 m x 4 cm 76450-00 5 m x 6 cm 76450-01 5 m x 8 cm 76450-02 Strips 1,9 x 7,2 cm 76450-03	Cutimed® Cuticell® Contact 5 x 7,5 cm 72680-00 7,5 x 10 cm 72680-01 10 x 18 cm 72680-02 15 x 25 cm 72680-03