

# Cutimed® Siltec®

Schuimverband

Betrouwbaar  
exsudaat-  
management

EXSUDAATMANAGEMENT




 **Cutimed®**  
Your Power to Heal

# Cutimed® Siltec® schuimverbanden

## Betrouwbare resultaten in alle situaties

Voor een goede wondgenezing en het welzijn van de patiënt is betrouwbaar exsudaatmanagement van essentieel belang. De hoeveelheid en aard van het exsudaat kan van dag tot dag verschillen tijdens het genezingsproces. Het is daarom belangrijk dat een schuimverband in alle omstandigheden consistente en betrouwbare resultaten levert. Vier hoogwaardige componenten maken van **Cutimed® Siltec®** het optimale wondverband voor de verzorging van chronische wonden: gemakkelijk en tijdbesparend voor u in gebruik, atraumatisch en betrouwbaar voor de patiënt.


## Zekerheid voor de patiënten Betrouwbaar voor de gebruiker

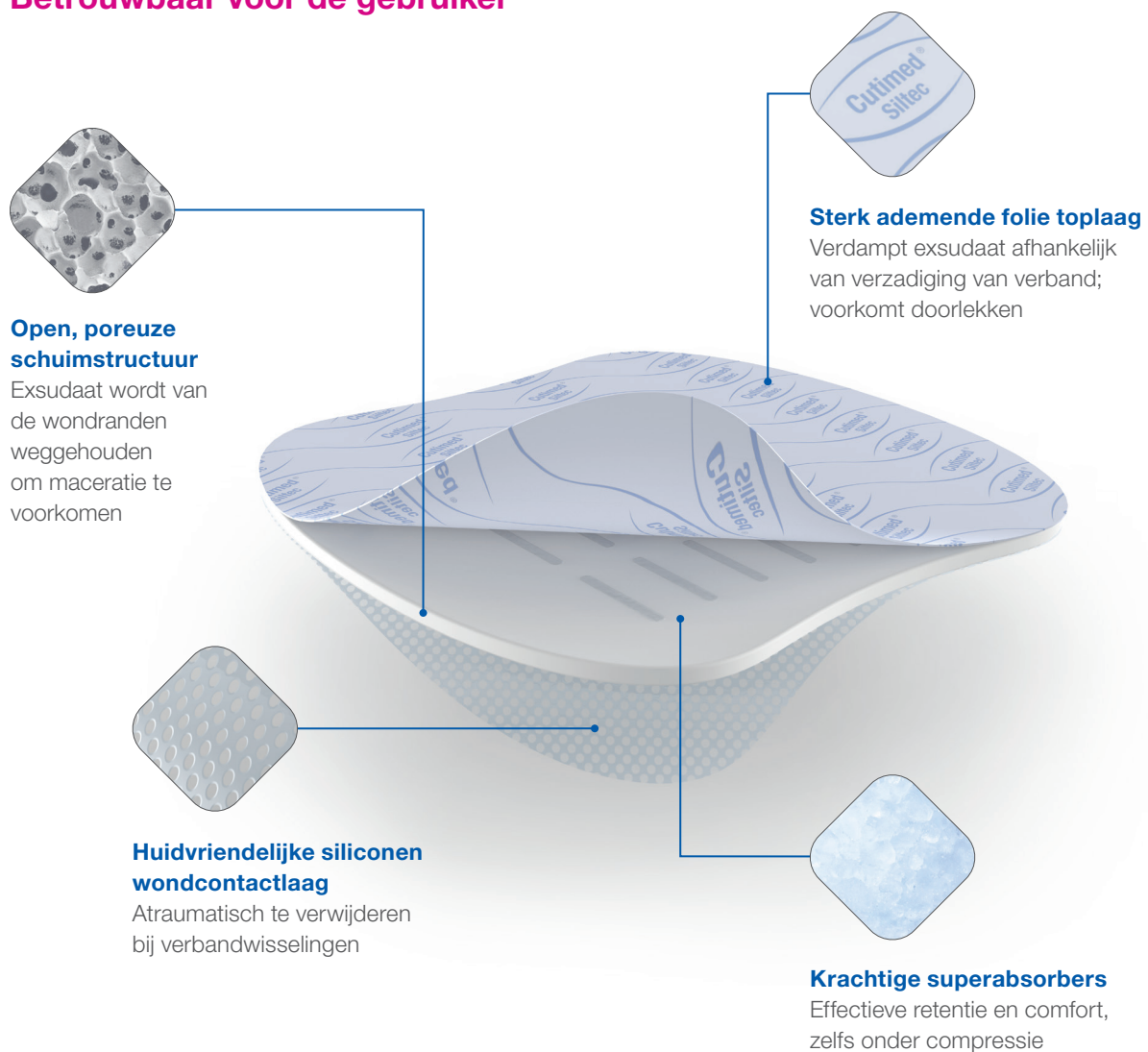

## Een belangrijk werkingsprincipe van Cutimed® Siltec® schuimverbanden is verticale absorptie

Het exsudaat wordt in verticale richting van het wondbed afgevoerd.

- 1 Wanneer exsudaat in aanraking komt met **Cutimed® Siltec®**, trekt het gemakkelijk via de geperforeerde siliconen wondcontactlaag in de schuimkern.
- 2 De schuimkern is ontworpen met een open poriënstructuur die voor snelle verticale absorptie zorgt. Exsudaat wordt dus van het wondbed en de wondranden afgevoerd en vastgehouden in de schuimkern. Ook onder compressie.
- 3 Bovenin de schuimkern absorberen superabsorbers het exsudaat en houden dit vast (retentie), ook onder compressie.
- 4 De sterk ademende folie toplaag past het verdampen aan verzadiging van de schuimkern en superabsorbers aan. Zelfs bij variabele hoeveelheden en sterk viskeus exsudaat blijven wondranden en wondbed beschermd tegen macereren of uitdrogen.

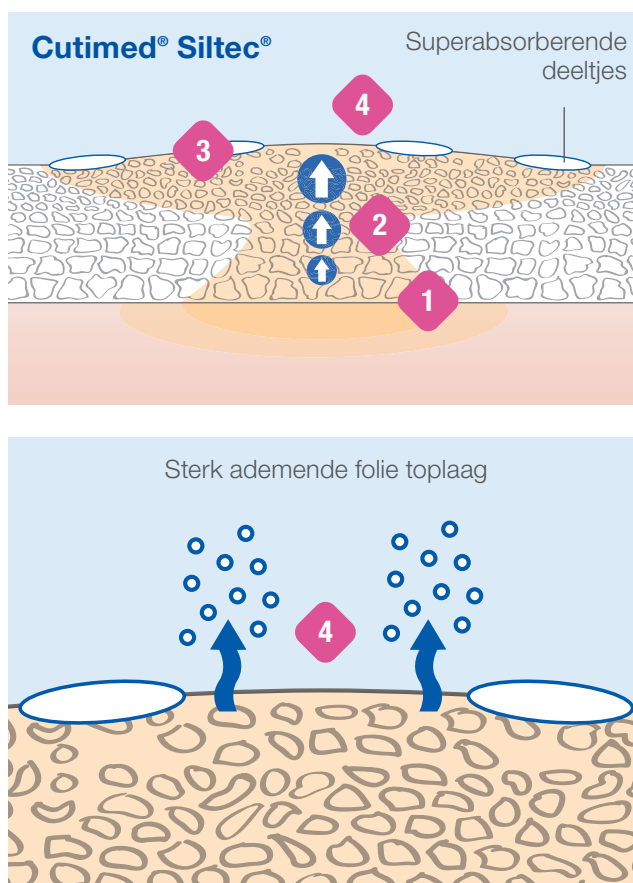
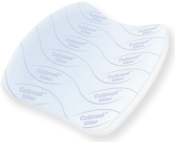










Voor meer informatie over  
**Cutimed® Siltec®** bezoek ons  
**Cutimed®** YouTube kanaal:



# Cutimed® Siltec® schuimverbanden

Kies eenvoudig de juiste Cutimed® Siltec® variant

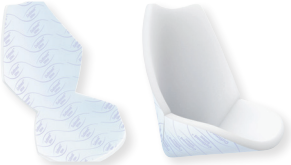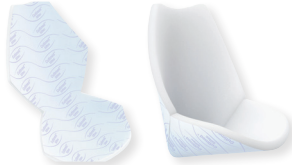Hoeveelheid exsudaat	○○○○ - ●○○○	●○○○ - ●●○○○
<b>Zeer gevoelige huid</b>	Cutimed® Siltec® L 	Cutimed® Siltec® (standaard) 
<b>Normale/ gevoelige huid</b>	Fixatie nodig Cutimed® Siltec® L / Cutimed® Siltec® PLUS 	Cutimed® Siltec® PLUS / Cutimed® Siltec® (standaard) 
Geen fixatie nodig (douchen mogelijk)	Cutimed® Siltec® B 	Cutimed® Siltec® B 
<b>Wond op de stuit</b>	Cutimed® Siltec® Sacrum 	Cutimed® Siltec® Sacrum 
<b>Wond op de hiel</b>	Cutimed® Siltec® Heel 2D / 3D 	Cutimed® Siltec® Heel 2D / 3D 

# Alle voordelen op een rij

## Cutimed® Siltec®



### Superabsorberende technologie

- ◆ Verticaal betrouwbaar absorptievermogen
- ◆ Retentie van exsudaat, ook onder compressie
- ◆ Voorkomt verweking van de wondranden
- ◆ Absorbeert zelfs viskeus exsudaat
- ◆ Minder verbandwissels



### Sterk ademende folie toplaag

- ◆ Exsudaat verdampt via de toplaag
- ◆ Beschermst tegen vocht, vuil en bacteriën



### Anatomisch ontwerp

- ◆ Conformeert goed naar de vormen van het lichaam
- ◆ Patiëntcomfort en gebruiksgemak



### Patiëntvriendelijke siliconen wondcontactlaag en border

- ◆ Beschermst nieuw weefsel en de huid rondom de wond
- ◆ Atraumatische verbandwissels
- ◆ Opnieuw aan te brengen na observatie



### Op maat te knippen

- ◆ Ook geschikt voor anatomisch uitdagende plaatsen

## In aanvulling, voor Cutimed® Siltec® B



### Betrouwbare fixatie

- ◆ Siliconenen border voor betrouwbare en patiëntvriendelijke fixatie



### Douchebestendig

- ◆ Minder verbandwissels
- ◆ Verbetert de kwaliteit van leven

# Voor de normale en gevoelige huid

Schuimverband met huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag en superabsorbers


## Cutimed® Siltec® PLUS

### Gebruiksgemak



- ◆ Klevende siliconen wondcontactlaag (kleeft niet op vochtig wondbed)
- ◆ Het verband blijft op zijn plaats
- ◆ Kan op maat geknipt worden
- ◆ Ook in anatomische vorm: hiel 2D (extra dik voor polsterend effect)
- ◆ Aanvullende fixatie nodig

Cutimed® Siltec® PLUS

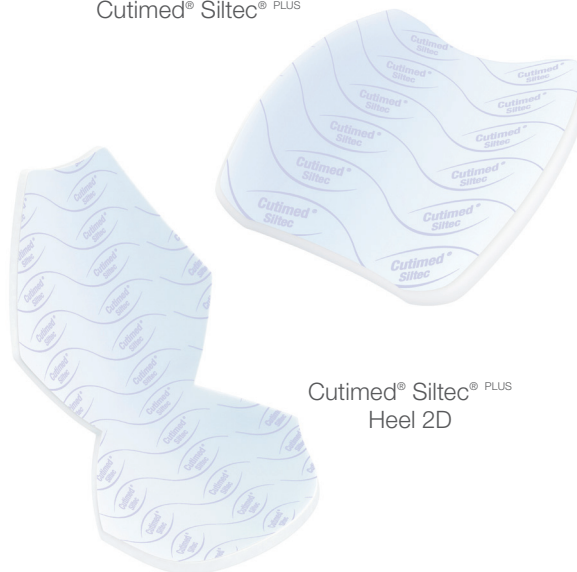

Cutimed® Siltec® PLUS  
Heel 2D


## Cutimed® Siltec® B

### Met huidvriendelijk klevende siliconenborder



- ◆ Met alle voordelen van Cutimed® Siltec® PLUS en:
- ◆ Betrouwbaar en huidvriendelijk klevende siliconen border
- ◆ Douchebestendig
- ◆ Ook in ovale en anatomische vorm: sacrum (met extra brede border)

Cutimed® Siltec® B

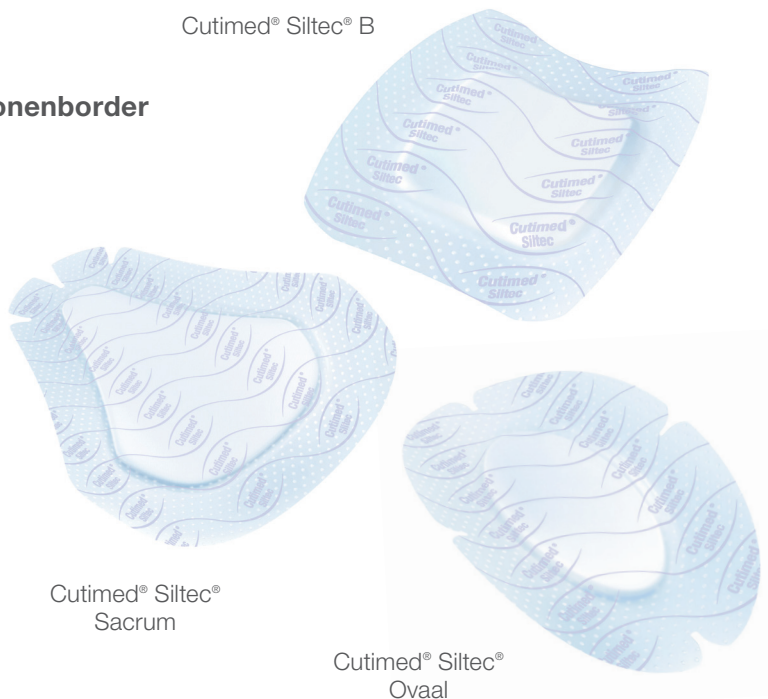

Cutimed® Siltec®  
Sacrum

Cutimed® Siltec®  
Ovaal

# Voor zeer gevoelige en kwetsbare huid

Schuimverband met niet verklevende siliconen wondcontactlaag en superabsorbers


## Cutimed® Siltec® (standaard)

Speciaal voor zeer gevoelige, kwetsbare huid



- ◆ Niet verklevende siliconen wondcontactlaag
- ◆ Voorkomt maceratie in combinatie met compressietherapie
- ◆ Kan op maat geknipt worden
- ◆ Ook in anatomische vorm: heel 3D (extra dik voor polsterend effect)
- ◆ Aanvullende fixatie nodig

Cutimed® Siltec® (standaard)

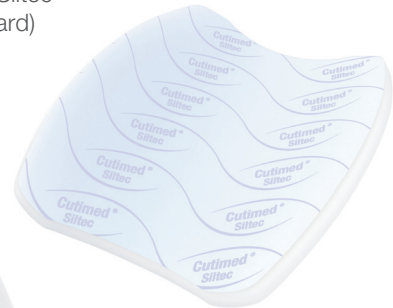

Cutimed® Siltec® Heel 3D




## Cutimed® Siltec® L

Dun en zeer flexibel schuimverband



- ◆ Met alle voordelen van Cutimed® Siltec® (standaard) maar
- ◆ Voor epithelialiserende wonden
- ◆ Voor wonden die geen of weinig exsudaat afgeven
- ◆ Zeer plooibaar

Cutimed® Siltec® L

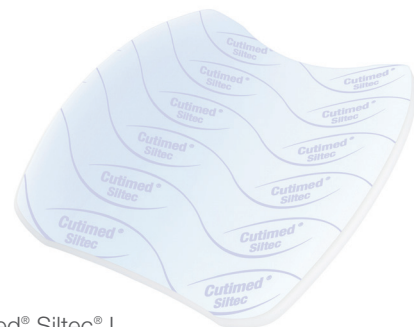






# Productoverzicht

	Artikelnummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	
<b>Cutimed® Siltec® (standaard)</b> Schuimverband met superabsorbers en <u>niet verklevende</u> siliconen wondcontactlaag 	73285-00	5 x 6 cm	10	10	15390527	
	73285-01	10 x 10 cm	10	10	15389847	
	73285-02	10 x 20 cm	10	10	15389863	
	73285-03	15 x 15 cm	10	10	15389901	
	73285-04	20 x 20 cm	5	10	15389936	
Heel 3D	73286-01	voorgevormd	5	6	15730395	
<b>Cutimed® Siltec® L (Light)</b> Dun schuimverband met superabsorbers en <u>niet verklevende</u> siliconen wondcontactlaag 	73283-00	5 x 6 cm	10	10	15389952	
	73283-01	10 x 10 cm	10	10	15389979	
	73283-02	15 x 15 cm	10	10	15390004	
<b>Cutimed® Siltec® Plus</b> Schuimverband met superabsorbers en <u>huidvriendelijk klevende</u> siliconen wondcontactlaag 	73233-00	5 x 6 cm	10	10	15930971	
	73233-03	10 x 10 cm	10	10	15931005	
	73233-04	10 x 20 cm	10	10	15930963	
	73233-06	15 x 15 cm	10	10	15931021	
	73233-07	20 x 20 cm	5	10	15931048	
Heel 2D	73288-05	16 x 24 cm	5	10	15930998	
<b>Cutimed® Siltec® B (Border)</b> Schuimverband met superabsorbers en <u>huidvriendelijk klevende</u> siliconen wondcontactlaag en border 	73284-00	7,5 x 7,5 cm	10	10	15390306	
	73284-01	10 x 12,5 cm	10	10	15390314	
	73284-06	10 x 22,5 cm	10	10	15930726	
	73284-03	17,5 x 17,5 cm	5	10	15390322	
	73284-04	22,5 x 22,5 cm	5	10	15550613	
	Ovaal	73284-14	7 x 10 cm	10	10	16286502
		73284-21	13 x 16 cm	5	10	16813715
	Sacrum	73287-00	17,5 x 17,5 cm	5	10	15517462
	73287-01	23 x 23 cm	5	10	15550621	

## Legenda




### Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond



### Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht

### Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

### Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche