

Advies Cutimed® wondverzorging

- Bij patiënt met diabetes en wond onder de enkel in 1e lijn altijd huisarts en in 2e lijn voetenteam/internist informeren (ook 's avonds en in het weekend).
- Bij alle andere wonden: informeer altijd de huisarts, medisch/verpleegkundig specialist of wondconsulent zodat indien nodig diagnostiek plaats kan vinden.
- Deze richtlijn geldt niet voor brandwonden en oncologische ulcera/wonden.

Kenmerken wond	Doel behandeling	Productadvies	Afdekken met
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Afdekken niet nodig
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Siltec® Sorbact®	Afdekken niet nodig
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® kompres	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutimed® Siltec®
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutisorb®/Multisorb®
	Necrose verwijderen/bacteriële belasting verlagen	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Afdekken niet nodig
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Siltec® Sorbact®	Afdekken niet nodig
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® kompres	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutimed® Siltec®
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutisorb®/Multisorb®
	Infectie behandelen (lokaal)	Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Reinigen van de wond	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Reinigen van de wond	Cutimed® HydroControl	Afdekken niet nodig
	Reinigen van de wond	Cutimed® Alginate	Cutisorb®/Multisorb®
	Reinigen van de wond	Cutimed® Sorbion® Sachet	Afdekken niet nodig
	Reinigen van de wond	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec®
	Reinigen van de wond	Cutimed® Alginate	Cutimed® Siltec®
	Reinigen van de wond	Cutimed® Alginate	Cutisorb®/Multisorb®
	Reinigen van de wond	Cutimed® Alginate	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gel	Cutimed® Siltec®
	Wondbed beschermen	Cutimed® Siltec®	Afdekken niet nodig
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® Siltec®
	Wondbed beschermen	Cutimed® Sorbion® Sana	Afdekken niet nodig
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gel	Cutimed® Siltec®
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® Siltec®
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gelling Fiber	Cutisorb®/Multisorb®
	Wondbed beschermen	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® Sorbion® Sachet
	Wondbed beschermen	Leukomed® T plus (skin sensitive)	Afdekken niet nodig
	Wondbed beschermen	Leukomed® T plus (skin sensitive)	Afdekken niet nodig

Niet vitaal weefsel belemmert de wondgenezing. Voor mechanisch reinigen van de wond kan een debridement pad (Cutimed® DebricClean®) een goede optie zijn.

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose*
- Geïnfecteerde wond*
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond****
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Geen tot weinig wondvocht
- Weinig tot matig wondvocht
- Matig tot veel wondvocht**
- Veel tot zeer veel wondvocht**

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep***

* Bij necrose en/of infectieverschijnselen moet altijd direct de behandelend arts of verpleegkundig specialist worden gewaarschuwd

** Bij wonden die veel tot zeer veel wondvocht produceren eventueel wondranden beschermen met Cutimed® Protect

*** Diepe wonden eventueel opvullen met Cutimed® Gelling Fiber, Cutimed® Cavity of Cutimed® Alginate

**** In een granulerende wond zonder infectie waarin de wondgenezing stagneert, kan stimuleren van de wondgenezing met Cutimed® HydroControl of Cutimed® Epiona een goede optie zijn

Cutimed®

Productinformatie

Cutimed® Gelling Fiber

- Wondverband gemaakt van sodium carboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende vezels met een hoge absorptiecapaciteit. Na verticale absorptie van het exsudaat verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed.
- Ondersteunt het autolytisch debridement
- Mag over de wondranden aangebracht worden.



Cutimed® Siltec®

Schuimverband met superabsorbers dat wondvocht verticaal absorbeert, in diverse varianten:

- Met **niet-verklevende wondcontactlaag zonder border** (standaard en dunne variant L). Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra dik voor polsterend effect
- Met **huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag** (PLUS), ook met siliconen border (B) beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. Siltec® PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec® B (Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum (extra brede border om een goede fixatie te garanderen)
- Mag over wondranden aangebracht worden (minimaal 2 cm overlap) en kan op maat geknipt worden



Cutimed® Sorbact® producten

Algemene principes bij producten met Sorbact® technologie

- Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels en endotoxinen aan zich welke met elke verbandwissel worden verwijderd.
- Werkt alleen in een vochtig wondmilieu
- Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
- Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of achter te laten in de wond
- Geen contra-indicaties bekend
- Laag risico op allergieën

Cutimed® Sorbact® kompres/gaasstrook

- Bacteriënbindend (acetaat) kompres in 2 tot maximaal 4 lagen op de wondbodem aanbrengen
- Gebruik bij smalle, diepe wonden de (katoenen) gaasstrook (ook bij smetten en schimmels zeer geschikt)
- Mag over wondranden aangebracht worden
- Afdekken met een (super) absorberend- of schuimverband
- Mag op maat geknipt worden. Afgeknipt deel buiten de wond laten




Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

- Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact® wondcontactlaag met klevende borderrand
- Creëert een vochtig wondmilieu en stimuleert het autolytisch debridement
- Mag over wondranden aangebracht worden (minimaal 2 cm overlap), niet in knippen



Cutimed® Sorbact® gel

- Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel
- Ondersteunt het autolytisch debridement in droge wonden
- Binnen wondranden aanbrengen en afdekken met een absorberend- of schuimverband

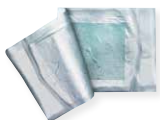

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

- Bacteriënbindend superabsorberend verband met Sorbact® wondcontactlaag
- Creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt het autolytisch debridement
- Mag over wondranden aangebracht worden (minimaal 2 cm overlap), niet in knippen
- Waterafstotende bovenlaag die lekken van wondvocht voorkomt



Cutimed® Siltec® Sorbact®

- Bacteriënbindend schuimverband met Sorbact® wondcontactlaag en siliconenborder
- Creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt het autolytisch debridement
- Mag over wondranden aangebracht worden (minimaal 2 cm overlap), niet in knippen
- Ovale en anatomische vorm (sacrum) beschikbaar



Cutimed® Hydrocontrol

- Hydroactief wondverband (hydropolymeer gelmatrix) met transparante folie-toplaag met hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Flexi-poriën ondersteunen verdamping en maken uitzetten van de gelmatrix mogelijk
- Kan wondvocht absorberen en vocht afgeven aan droge wond
- Osmotische werking stimuleert autolytisch debridement en wondgenezing
- Kan op maat geknipt worden



Cutimed® Epiona

- Collageenverband (90% rundercollageen, 10% algiinaat) dat wondgenezing stimuleert als deze stagneert
- Bindt proteasen (MMP's) welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden en zorgt ervoor dat de vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt
- Volledig resorbeerbaar, mag in meerdere lagen worden aangebracht
- Afdekken met (super) absorberend- of schuimverband
- Kan op maat geknipt of gescheurd worden



Cutimed® Sorbion® Sachet

- Superabsorberend wondverband dat wondvocht verticaal absorbeert en vasthoudt in stabiele gelvormende kern
- Behoudt vochtig wondmilieu, vormt zich naar wondbed
- Verwijderd op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel
- Uitstekende retentie (ook onder compressie)
- Niet in knippen en beide zijden mogen op de wond
- Speciale vormen beschikbaar: Multi Star, XL en drainage (splitverband)



Cutimed® Sorbion® Sana

- Superabsorberend wondverband dat wondvocht verticaal absorbeert en vasthoudt in stabiele gelvormende kern
- Behoudt vochtig wondmilieu, vormt zich naar wondbed
- Wondcontactlaag voorkomt verkleven aan het wondbed
- Uitstekende retentie (ook onder compressie)
- Niet in knippen en beide zijden mogen op de wond
- Speciale vormen beschikbaar: Multi Star, XL



Cutimed® Cavity

- Zacht en plooibaar schuimverband voor diepe wonden
- Minimaliseert kans op verkleefing of ingroeien van weefsel
- De wond maximaal voor 2/3 opvullen, kan op maat geknipt worden
- Afdekken met (super) absorberend- of schuimverband



Cutimed® Alginate

- Calcium-natrium algiinaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het geleidend verband is stabiel door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Aanbrengen binnen wondranden, kan op maat geknipt worden
- Afdekken met (super) absorberend- of schuimverband



Leukoplast® Leukomed®T plus (skin sensitive)

Transparante eilandpleister met een absorberend, niet verklevend wondkussen.

Transparante eilandpleister met een absorberend, niet verklevend wondkussen. Bedekt en beschermt oppervlakkige wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf. Leukomed T plus is geschikt voor de normale en gevoelige huid. Leukomed T plus skin sensitive met siliconen kleeflaag is geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid.



Cutimed® Protect

- Beschermt de wondranden en huid rondom de wond en voorkomt verweking
- 1 x per 2 dagen dun aanbrengen
- Beschikbaar als spray, swabs en crème



Cutimed® Gel

- Transparante en vormloze hydrogel zonder conserveringsmiddelen
- Ondersteunt autolytisch debridement
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Afdekken met absorberend- of schuimverband



Cutimed® DebricClean

- Debridement pad voor mechanisch debridement
- Te gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
- Verwijderd niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond
- Witte en blauwe vezels voor respectievelijk makkelijk loskomend of hardnekkig debris/necrose.
- Handlus ondersteunt gebruik



Cutisorb®/Multisorb®

- Absorberend verband met waterafstotende bovenlaag
- Niet in knippen



**Fixatie: advies en productinformatie nodig?
Vraag onze fixatiewijzer aan.**