

Cutimed® Sorbact®

Bacteriënbindend wondverband


**Cutimed®
Sorbact®**

bindt **bacteriën**,
zo help je antimicrobiële
resistentie te
voorkomen



INFECTIEMANAGEMENT

Uniek en eenvoudig in gebruik

Door te kiezen voor een speciale vorm of door de borderrand in te knippen (knip niet in het schuim), kan **Cutimed Siltec Sorbact** voor alle lichaamsdelen worden gebruikt. Zelfs op de anatomisch meest uitdagende locaties!

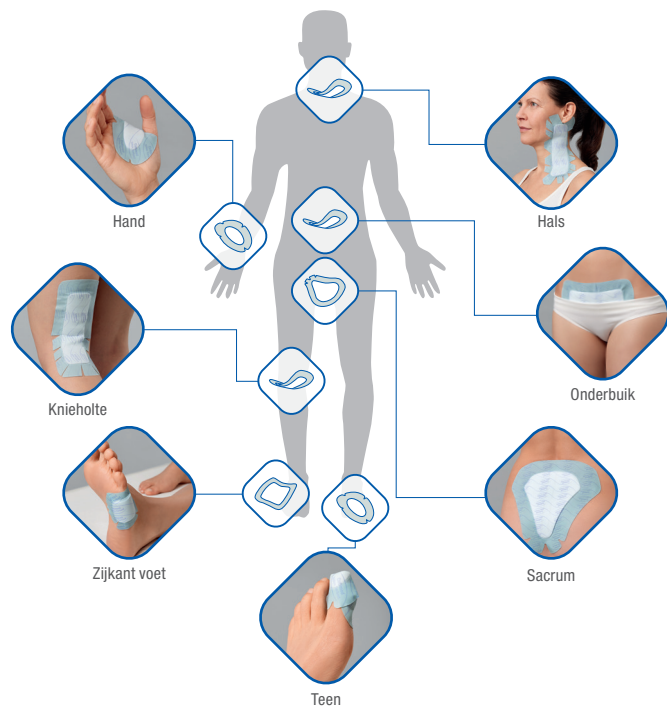

Compleet assortiment voor infectiemanagement

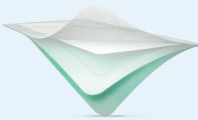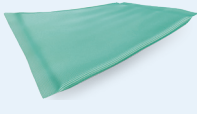	Hoeveelheid wondvocht			
				
 Oppervlakkige wonden		 Cutimed® Sorbact® Hydroactive B		 Cutimed® Sorbion® Sorbact®
		 Cutimed® Siltec® Sorbact®	 Cutimed® Sorbact® absorberend wondverband	
 Oppervlakkige en diepe wonden	 Cutimed® Sorbact® gel*	 Cutimed® Sorbact® gaasstroken		
		 Cutimed® Sorbact® kompres		

* Bevordert autolytisch debridement in wonden met fibrineus (geel) beslag en/of necrose.

Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. Het is tijd om voor **groen** te gaan!

Vanwege het **puur natuurkundige werkingsmechanisme** bindt en verwijdt **Cutimed Sorbact** bacteriën en schimmels zonder gebruik te maken van antibacterieel werkende stoffen. De werking is gebaseerd op **hydrofobe interactie**.

Cutimed Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. **Met iedere verbandwissel worden de gebonden bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd.** Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed Sorbact. **Samen kunnen we infectiemanagement in elk opzicht veiliger maken.**

Makkelijk

Bindt bacteriën en schimmels

Veilig

Geen contra-indicaties bekend

Bewezen klinische resultaten*

Bezoek ons **Cutimed** YouTube-kanaal voor meer informatie over **Cutimed Sorbact's** puur natuurkundig werkingsmechanisme.


 YouTube




* Aantoonbaar vermogen om de bacteriële belasting in kritisch gekoloniseerde wonden tot 73% te verminderen¹

¹ Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7


Cutimed® Sorbact® bindt bacteriën en schimmels veilig aan zich

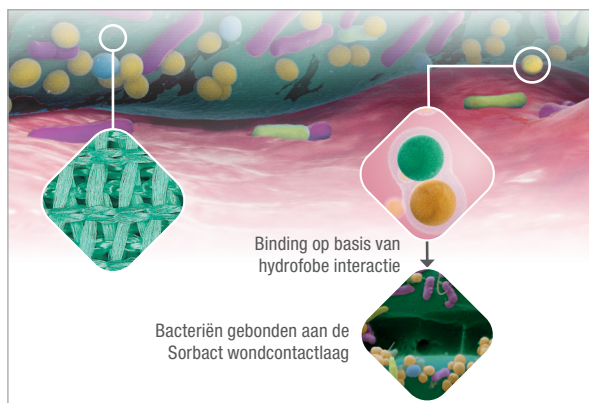

Een **gekoloniseerde, geïnfecteerde** wond

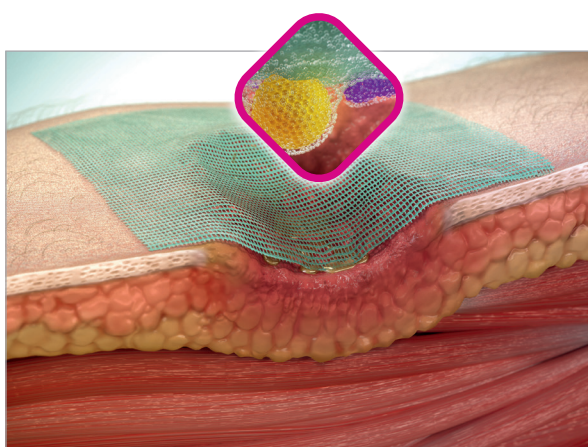

Cutimed Sorbact wordt rechtstreeks toegepast op de wond. Bacteriën en schimmels worden gebonden aan de **Sorbact** wondcontactlaag. (Gebruik in droge wonden Cutimed Sorbact gel)

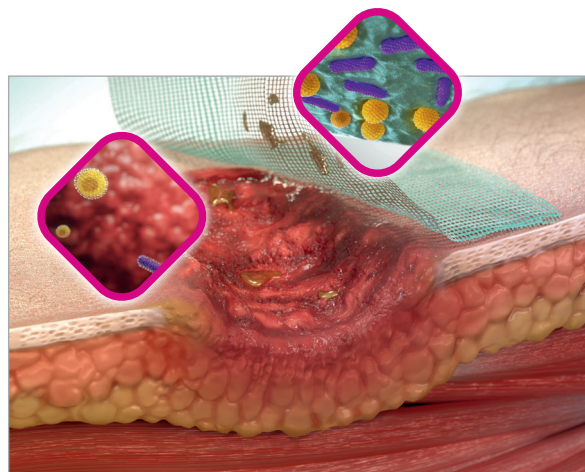

Bacteriën en schimmels worden verwijderd bij **iedere verbandwissel**

Cutimed® Sorbact®		
Werkingsmechanisme	Eigenschappen	Voordelen
Puur natuurlijk werkingsmechanisme (Hydrofobe interactie)	Er komen geen antibacterieel werkende stoffen vrij	Geen verstoring van het normale genezingsproces
	Er komen geen extra endotoxinen vrij ¹	Verkleint de kans op inflammatoire reactie en vertraging van de wondgenezing ²
	Geen opbouw van resistentiemechanisme bekend	Kan het risico op het genereren van resistente bacteriestammen helpen te verlagen

¹ As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

² Ovington L. Bacterial toxins and wound healing. Ostomy Wound Manage. 2003 Jul;49(7A Suppl):8-12. Review.



Bindt veilig bacteriën en schimmels


De effectiviteit van **Cutimed Sorbact** is gebaseerd op een puur natuurkundig werkingsmechanisme. Dit biedt vele voordelen, die jouw dagelijkse werk veilig maken:

- ◆ Geen contra-indicaties bekend*
- ◆ Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter in de wond
- ◆ Laag risico op allergieën
- ◆ Geschikt voor langdurige behandeling



*Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen.

Cutimed® Sorbact® biedt een compleet assortiment voor lokaal infectiemanagement

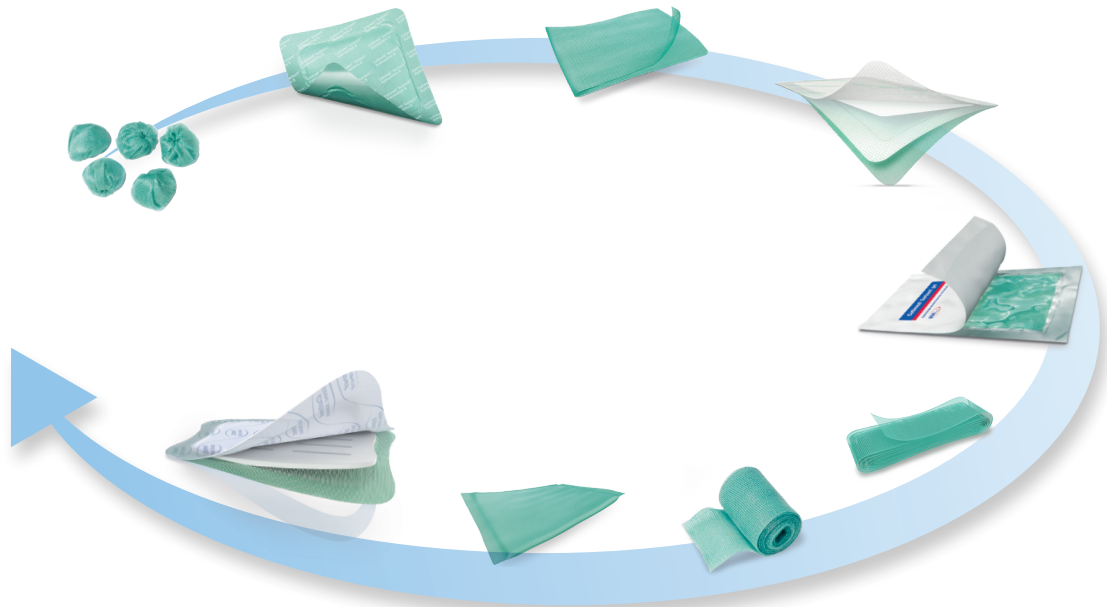

Altijd een passende oplossing voor elk type wond

Kies **Cutimed Sorbact** voor infectiemanagement^{1,2}

- 1** Makkelijk in gebruik
- 2** Altijd veilig inzetbaar bij **acute en complex genezende wonden**, geen contra-indicaties bekend
- 3** Te gebruiken bij **oppervlakkige en diepe wonden** — — —
die droog, vochtig of (zeer) nat zijn ○○○○ ●○○○ ●●○○ ●●●○ ●●●●

¹ Stanifowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

² Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7



Cutimed® Sorbion® Sorbact®

krachtig exsudaatmanagement

Cutimed Sorbion Sorbact zorgt voor veilig infectiemanagement en kan tegelijkertijd zeer grote hoeveelheden wondvocht absorberen door de superabsorberende kern.

Verhoogd patiëntencomfort

doordat de bovenlaag doorlekken voorkomt

Uitstekend exsudaatmanagement

door de superabsorberende kern, die zelfs onder compressie wondvocht vasthoudt


50%

MEER ABSORPTIE-CAPACITEIT*

Optimale distributie van wondvocht door non-woven laag

Behandelt infecties

dankzij de effectieve **Sorbact** wondcontactlaag

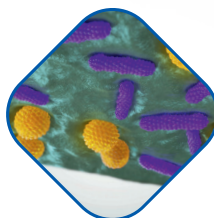


* In vergelijking met concurrerende superabsorbers - data beschikbaar.



Cutimed® Siltec® Sorbact®


bewezen kwaliteit - geen compromissen

Cutimed Siltec Sorbact biedt de voordelen van infectie- en exsudaatmanagement, door een bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag te combineren met het innovatieve **Cutimed Siltec** schuimverband. Het is geschikt om de bacteriële belasting in wonden met matig tot veel wondvocht te beheersen.

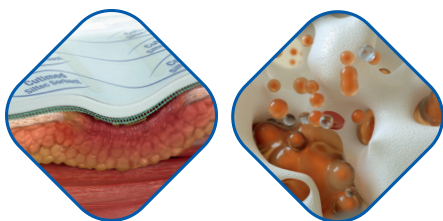

Beschermt wondranden
met verticale absorptie door
polyurethaan schuim

**Ideale genezings-
voorwaarden** dankzij
vochtregulerende en zeer
ademende folie

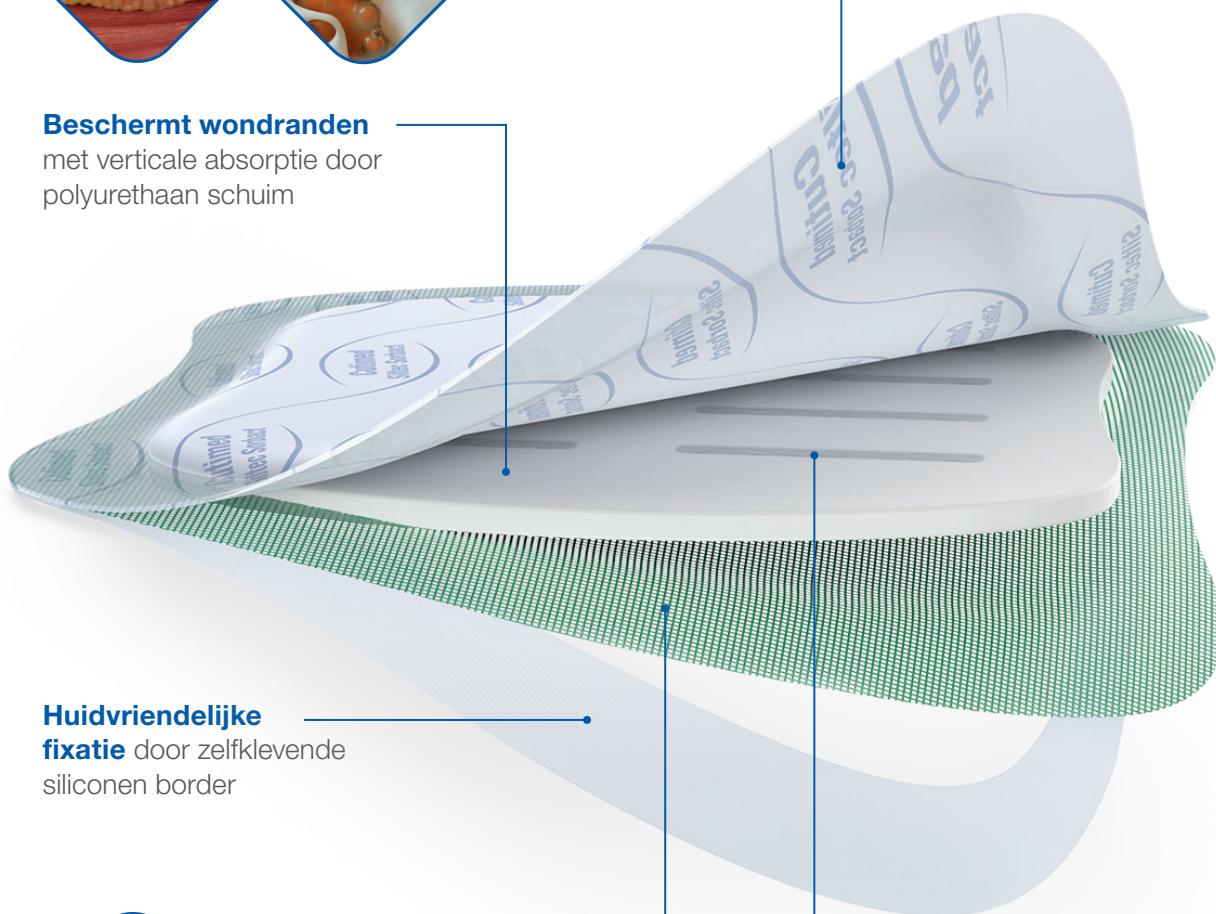

**Huidvriendelijke
fixatie** door zelfklevende
siliconen border



Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact wondcontactlaag

**Verhoogde flexibiliteit
van absorptiecapaciteit**
dankzij superabsorberende
hot-melt stroken



Cutimed® Sorbact® Hydroactive B stimuleert autolytisch debridement

Cutimed Sorbact Hydroactive B richt zich op infectiemanagement en het stimuleren van autolytisch debridement van fibrineus beslag en necrotisch weefsel.

**3-IN-1
OPLOSSING**

Vereenvoudigt de behandeling

door exsudaat- en infectiemanagement te combineren met het stimuleren van een autolytisch debridement

Stimuleert autolytisch debridement


door de hydropolymeerkern (gelmatrix)

Behandelt infecties

dankzij de effectieve **Sorbact** wondcontactlaag



Ondersteunt patiënt-mobilisatie dankzij de veilige fixatie met een hydrogel border

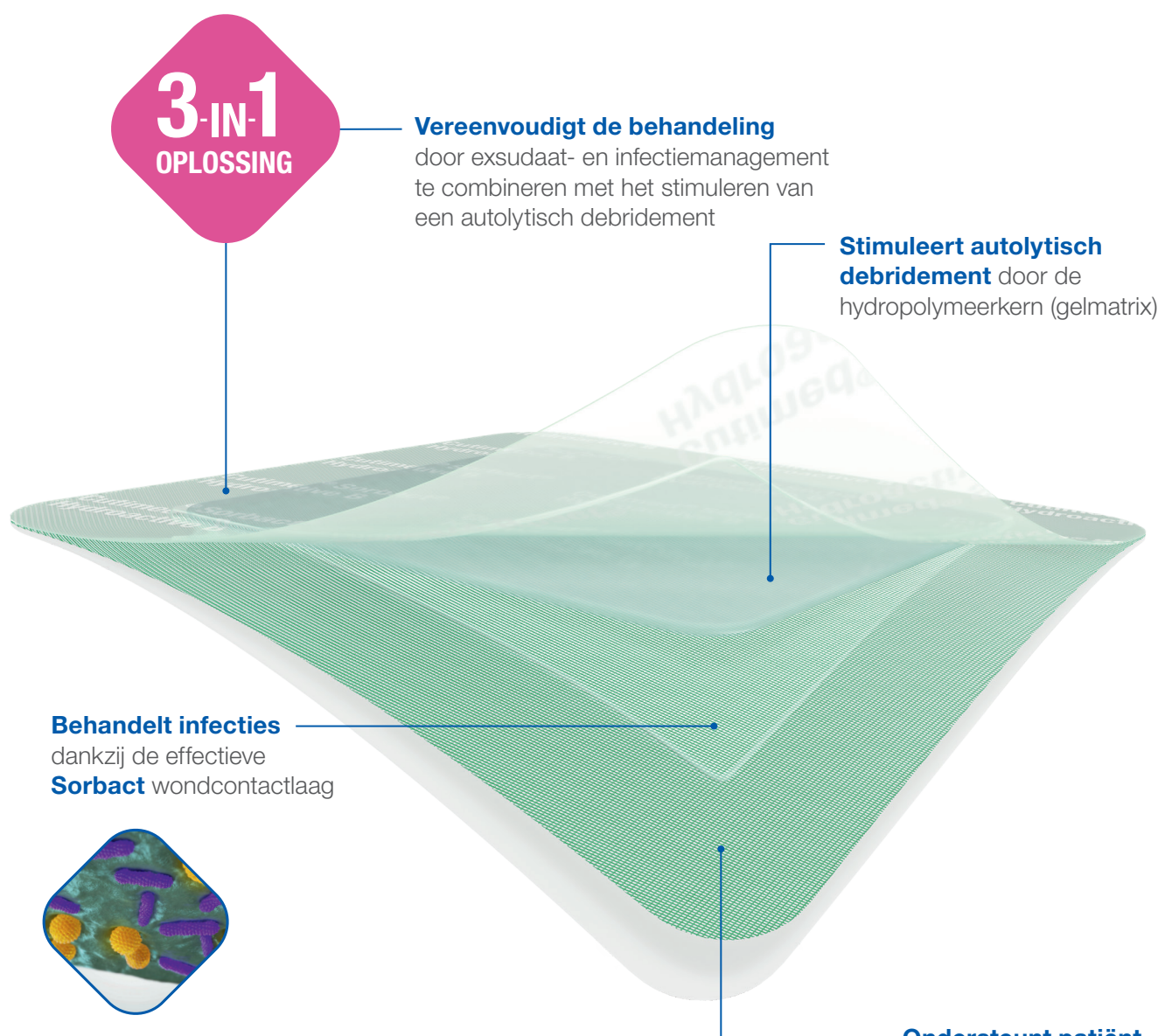

Productoverzicht

	Artikel-nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbact® absorberend wondverband Bacteriënbindend absorberend wondverband 	72161-16	7 x 9 cm		5	16	14982269
	72162-18	10 x 10 cm		5	16	14982277
	72163-10	10 x 20 cm		20	2	14982234
Cutimed® Sorbact® kompres Bacteriënbindend (acetaat) kompres 	72164-17	4 x 6 cm		5	24	14982285
	72165-15	7 x 9 cm		5	24	14982293
Cutimed® Sorbact® gaasstrook Bacteriënbindende (katoen) gaasstrook 	72166-11	2 x 50 cm		20	6	14982242
	72167-07	5 x 200 cm		10	6	14982250
Cutimed® Sorbact® gel Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel 	72611-20	7,5 x 7,5 cm		10	36	15299201
	72611-21	7,5 x 15 cm		10	20	15299228
	72611-28	15 x 20 cm		5	8	16860853
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (Border) Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand 	79933-00	7 x 8,5 cm	5 x 6,5 cm	10	10	15833410
	79933-02	14 x 14 cm	10 x 10 cm	10	10	15833445
	79933-03	19 x 19 cm	15 x 15 cm	10	10	15833488
	79933-04	14 x 24 cm	10 x 20 cm	10	10	15833453
Cutimed® Siltec® Sorbact® Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border 	73251-00	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	10	10	15802205
	73251-14	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	10	10	16595912
	73251-01	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	10	10	15802213
	73251-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	10	15802221
	73251-03	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	5	10	15802248
	73251-04	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	5	10	15802256
	ovaal 73251-18	7 x 10 cm	3 x 6 cm	10	10	16595920
	sacrum 73251-05	17,5 x 17,5 cm		5	10	25802264
	sacrum 73251-06	23 x 23 cm		5	10	15802272
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag 	72698-00	10 x 10 cm		10	12	16187172
	72698-01	10 x 20 cm		10	6	16187180
	72698-02	20 x 20 cm		10	4	16187199
	72698-03	20 x 30 cm		10	4	16187202

Legenda

Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnficeerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht

Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche