

Cutimed® Debriclean

Snel en effectief debridement

Tips
voor
gebruik

REINIGEN & DEBRIDEREN



 **Cutimed®**
Your Power to Heal

Hoe werkt u met Cutimed® Debriclean?

Benodigheden


- ◆ Cutimed Debriclean Handschoenen (onsteriel)
- ◆ Onderlegger
- ◆ Water of spoelvloeistof*
- ◆ Handdesinfectiemiddel

Werkwijze

- ◆ Open de verpakking.
- ◆ Houd water of spoelvloeistof bij de hand.
- ◆ Plaats onderlegger onder te behandelen gebied.
- ◆ Trek handschoenen aan.
- ◆ Kies het juiste deel van Cutimed Debriclean om in te zetten (wit of blauw).
- ◆ Schuif je vingers in goede richting onder de handlus.
- ◆ Haal Cutimed Debriclean uit de verpakking.
- ◆ De blisterverpakking kan je gebruiken om spoelvloeistof of water in te doen (aanbevolen hoeveelheid: ong. 30 ml).
- ◆ Voor gebruik in smalle, diepere wonden: Vouw van het uiteinde een frietzakpuntje, steek wijs- en middelvinger door handlus en houd puntje vast met duim en ringvinger.
- ◆ Doop het te gebruiken deel van Cutimed Debriclean hierin. Zorg ervoor dat de pad helemaal verzadigd is.
- ◆ Debrideer de wond en/of reinig de huid rondom de wond.
- ◆ Gebruik niet dezelfde pad voor debrideeren van de wond en de huid er omheen.
- ◆ Spoel de wond met water, fysiologisch zout of volgens protocol na gebruik van de debridement pad.
- ◆ Denk aan goede handhygiëne vooraf en na gebruik Cutimed Debriclean.

* Gangbare wondspoelmiddelen zijn gebaseerd op PHMB, natriumhypochloriet of onderchlorigzuur, octenidine, 0,9% medische zoutoplossing, water en Ringer oplossing.



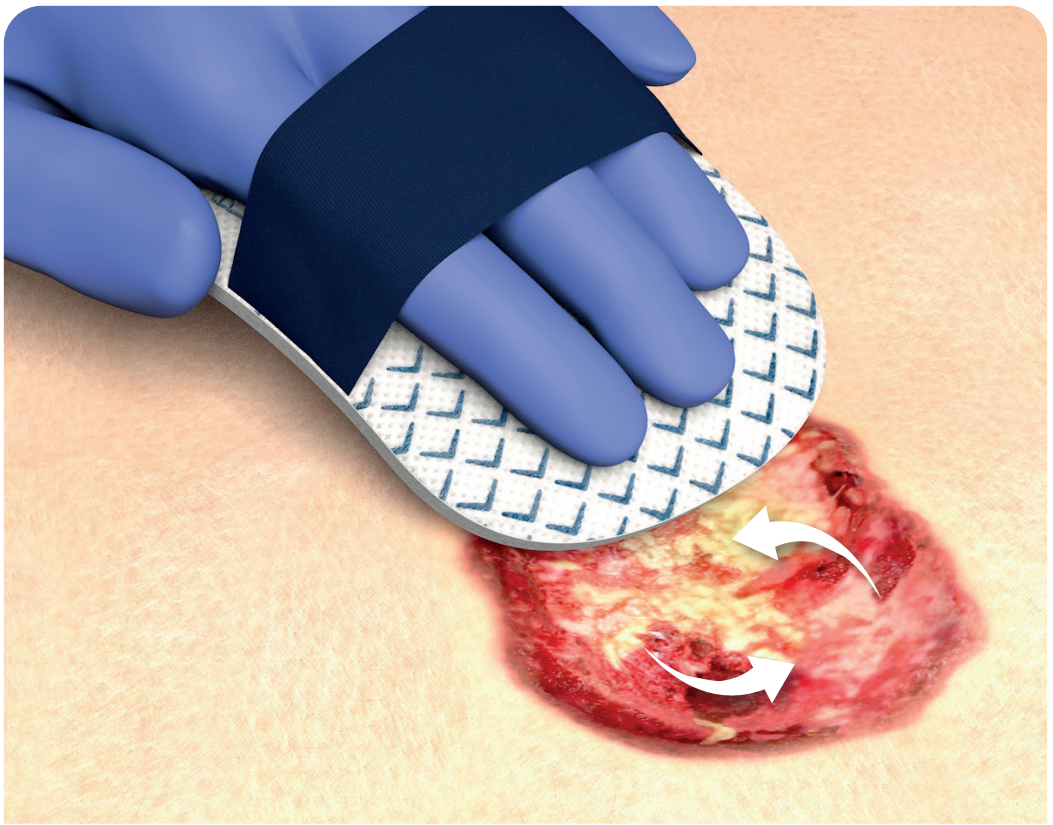

Tips bij gebruik

- ◆ Laat de patiënt bij een eerste keer voelen hoe zacht Cutimed DebriClean is.
- ◆ Maak een ronddraaiende beweging terwijl u zacht druk uitoefent. Druk harder afhankelijk van het resultaat.
- ◆ Stop de behandeling als het niet vitale weefsel verwijderd is (behandelduur hangt af van druk bij wrijfkracht die patiënt aan kan en van mate waarin het niet vitale weefsel makkelijk los komt).
- ◆ Huidkeratosen zijn door de samenstelling moeilijk met water en zeep te verwijderen: ze lossen niet op. Cutimed DebriClean kan deze huidkeratosen probleemloos verwijderen (behandel ook de oorzaak van ontstaan).
- ◆ Er zit voldoende rek in de handlus om eenvoudig van hand te wisselen.
- ◆ Als er na scherp debridement en/of vervolgen van de behandeling van de wond met onder andere Cutimed DebriClean na ongeveer 2 weken geen sprake is van voortuitgang van de wondgenezing, overweeg dan verder onderzoek (diagnostiek) naar de oorzaak van stagneren van de wondgenezing.
- ◆ Voor eenmalig gebruik, niet op de wond achterlaten.

Elimineer snel en effectief vertragende factoren van het wondgenezingsproces³



Effectief debridement^{1,2}



Bindt bacteriën⁴



> 99% verwijdering van biofilm²



Assortiment

	Artikel nummer	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed Debrisoft 9 cm x 13 cm	76170-00	5	12	16779355

Meer informatie vindt u op www.cutimed.nl of neem contact op via medical.cs.nl@essity.com

1 JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® Debrisoft, Debrisoft, and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.

2 JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® Debrisoft, Debrisoft and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.

3 EWMA, EWMA document: Debridement. 2013, European Wound Management Association. p. 1-49.

4 JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® Debrisoft, Debrisoft and Cutisoft Cotton. July 2018, BSN medical data on file.



essity

Cutimed®
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.cutimed.nl

