

LENGTE K BIJ ELVAREX EN ELVAREX SOFT

INVOERING METING LENGTE K BIJ ELVAREX EN ELVAREX SOFT PANTYSTIJLEN PER 1 SEPTEMBER A.S.

Met ingang van 1 september start JOBST met het invoeren van lengte K bij Elvarex en Elvarex Soft maatwerkproducten. Lengte G en lengte K bepalen samen de pasvorm van de bovenzijde van het beendeel en het broekdeel. Voor een goede breicalculatie zijn beide maten nodig.


Het op de juiste wijze opmeten van deze maten is belangrijk en de natuurlijke anatomie is daarbij leidend. De bilplooï bevindt zich normaliter lager dan de liesplooï. Daarmee is de liesplooï altijd het hoogste punt; het is niet mogelijk om het compressiehulpmiddel hoger dan dit punt op te trekken.

LENGTE G

Meet deze lengte in staande positie, aan de achterzijde van het been, in een rechte lijn van vloer tot de bilplooï.


LENGTE K

Meet deze lengte in staande positie, aan de voorzijde van het been, in een rechte lijn van vloer tot de liesplooï.

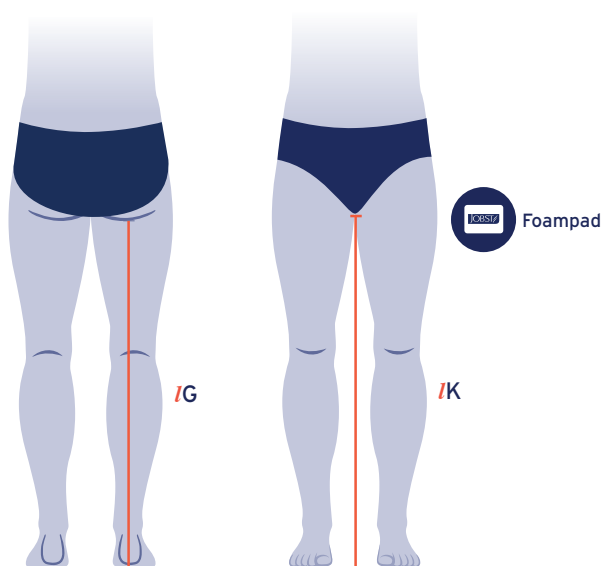

MEETHULP

Gebruik bij voorkeur de **JOBST Foampad** om lengte K makkelijker te kunnen meten. Deze schuift u vanaf de voorzijde zo hoog mogelijk in de liesplooï. De bovenzijde van de Foampad geeft lengte K weer.

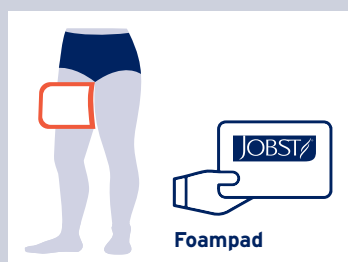

BESTELLING INVOEREN

Voer de lengte K in in het speciaal ervoor bedoelde invulveld, of indien niet aanwezig, in het opmerkingenveld.