

WEGWIJS IN COMPRESSIETHERAPIE

N I E T S H O U D T J E T E G E N



JOBST® compressieproducten voor de initiële fase

Bij Essity begrijpen we de uitdagingen van compressietherapie. Traditionele zwachtels zijn soms noodzakelijk maar kunnen ook tijdrovend zijn om in te zetten. Onze compressieproducten zijn ontworpen voor alle fases van de behandeling, met een focus op comfort en efficiëntie. Daarom bieden wij innovatieve producten die de zelfredzaamheid en mobiliteit van cliënten bevorderen.


Behandelstappen

Het behandelplan verschilt afhankelijk per patiënt en of er sprake is van alleen oedeem of ook wondzorg. De voorschrijver bepaalt het beleid. Daarnaast is het belangrijk om de zelfredzaamheid van de patiënt hierin mee te nemen.

Om je wegwijs te maken in compressietherapie hebben we de verschillende fasen visueel gemaakt in een schema om tot de juiste productkeuze te komen, zie achterzijde. Start altijd met de beoordeling van je patiënt inclusief de conditie van de huid, de aanwezigheid van wonden of infecties en eventuele contra-indicaties voor compressietherapie. Zorg er voor dat contra-indicatie's zoals Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) zijn uitgesloten (door de verwijzer).



Heb je alsnog support of training nodig of heb je nog vragen, neem dan contact op met een van onze medisch adviseurs via wondzorg.nl@medical.essity.com

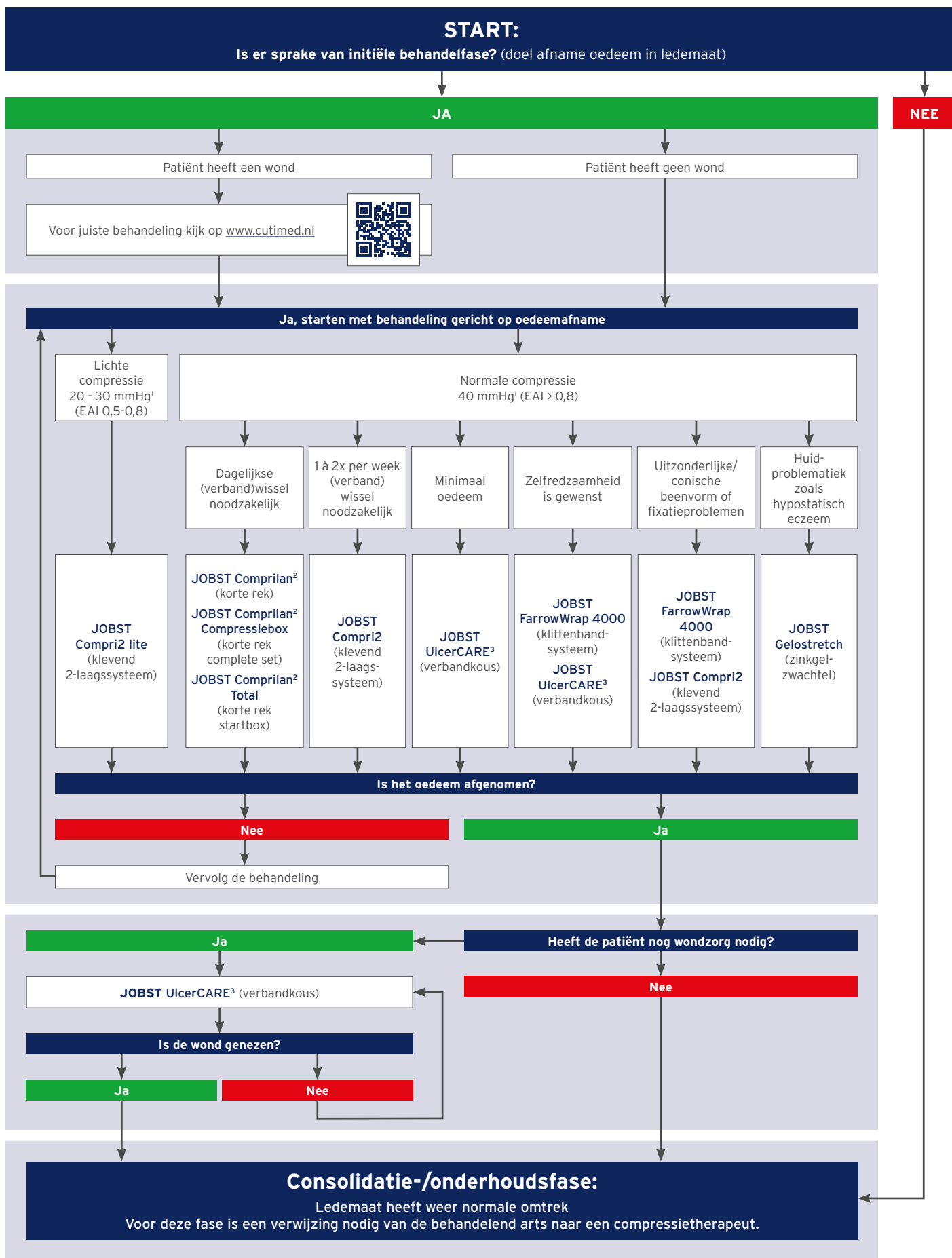

1. Beoogde nominale compressie voor een gemiddelde enkelomvang

2. Overweeg Cutimed Sorbion voor exsudaat-management om verbandwissels te verminderen en stap over op JOBST Compri2

3. JOBST UlcerCARE wordt alleen vergoed in combinatie met wondzorg.

In dit stroomschema zijn adviezen uit de volgende richtlijn meegenomen: [Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland \(V&VN\). \(2025\). Handreiking compressietherapie.](#)