

Cutimed® Gelling Fiber

Gelvormend fiber verband



Eigenschappen en functies

Cutimed Gelling Fiber is een fiber verband gemaakt van natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkte vezels. Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen.

Eigenschappen

- ♦ Verticale absorptie voorkomt maceratie.
- ♦ Behoudt een vochtig wondmilieu, ondersteunt autolytisch debridement.
- ♦ Vormt zich uitstekend naar het wondbed: vermindert dode ruimte.
- ♦ Toepasbaar in combinatie met compressietherapie.
- ♦ Het product kan geknipt worden maar moet wel minimaal 1 cm de wondranden overlappen in verband met krimpen.
- ♦ Beide zijden van het product kunnen op de wond worden aangebracht.
- ♦ Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk in zijn geheel te verwijderen. Atraumatische verwijdering voorkomt schade aan nieuw gevormd weefsel en pijn tijdens de verbandwissel.
- ♦ Bedek het met een vochtregulerend verband zoals Cutimed Siltec of Cutimed Sorbion.

Samenstelling

- ♦ Natriumcarboxymethyl cellulose.
- ♦ Versterkte vezels van polyethyleen met hoge dichtheid van polyethyleentereftalaat (CMC).

Wisselfrequentie

Cutimed Gelling Fiber mag maximaal 7 dagen blijven zitten, behalve bij brandwonden en donorsites, waar het maximaal 14 dagen mag blijven zitten.

Toepassingen ●●○○ - ●●●○ ☹️ 🟡 🟠

Cutimed Gelling Fiber is vezelverband dat wondvocht vasthoudt in wonden die matig tot veel wondvocht afgeven, die oppervlakkig of diep zijn en waarvan de wondbodem bedekt is met granulatieweefsel en/of fibrineus beslag, bijvoorbeeld:

- ♦ Ulcus cruris venosum, decubitus (cat. 2-4) en diabetische voet.
- ♦ Chirurgische wonden (bijv. postoperatief, secundair genezende wonden en donorsites).
- ♦ Tweedegraads brandwonden.
- ♦ Oncologische wonden.
- ♦ Traumatische wonden (bijv. schaafwonden en skin tears).

Contra-indicaties

- ♦ Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld als alternatief voor een chirurgisch kompres tijdens OK.
- ♦ Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld voor gebruik in inwendige lichaamsholtes of in gesloten wonden.
- ♦ Een infectie is geen contra-indicatie voor het gebruik van Cutimed Gelling Fiber. In dit geval dient Cutimed Gelling Fiber wel gecombineerd te worden met een antibacterieel verband, bijvoorbeeld Cutimed Sorbact.

Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Z-index nummer
Cutimed® Gelling Fiber 	5 x 5 cm	71218-00	10 stuks	17034892
	10 x 10 cm	71218-01	10 stuks	17034906
	15 x 15 cm	71218-02	5 stuks	17034914
	2 x 45 cm	71218-06	5 stuks	17034922

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden
- Geschikt voor onder de douche