


Actimove®

Feel good. Move better.

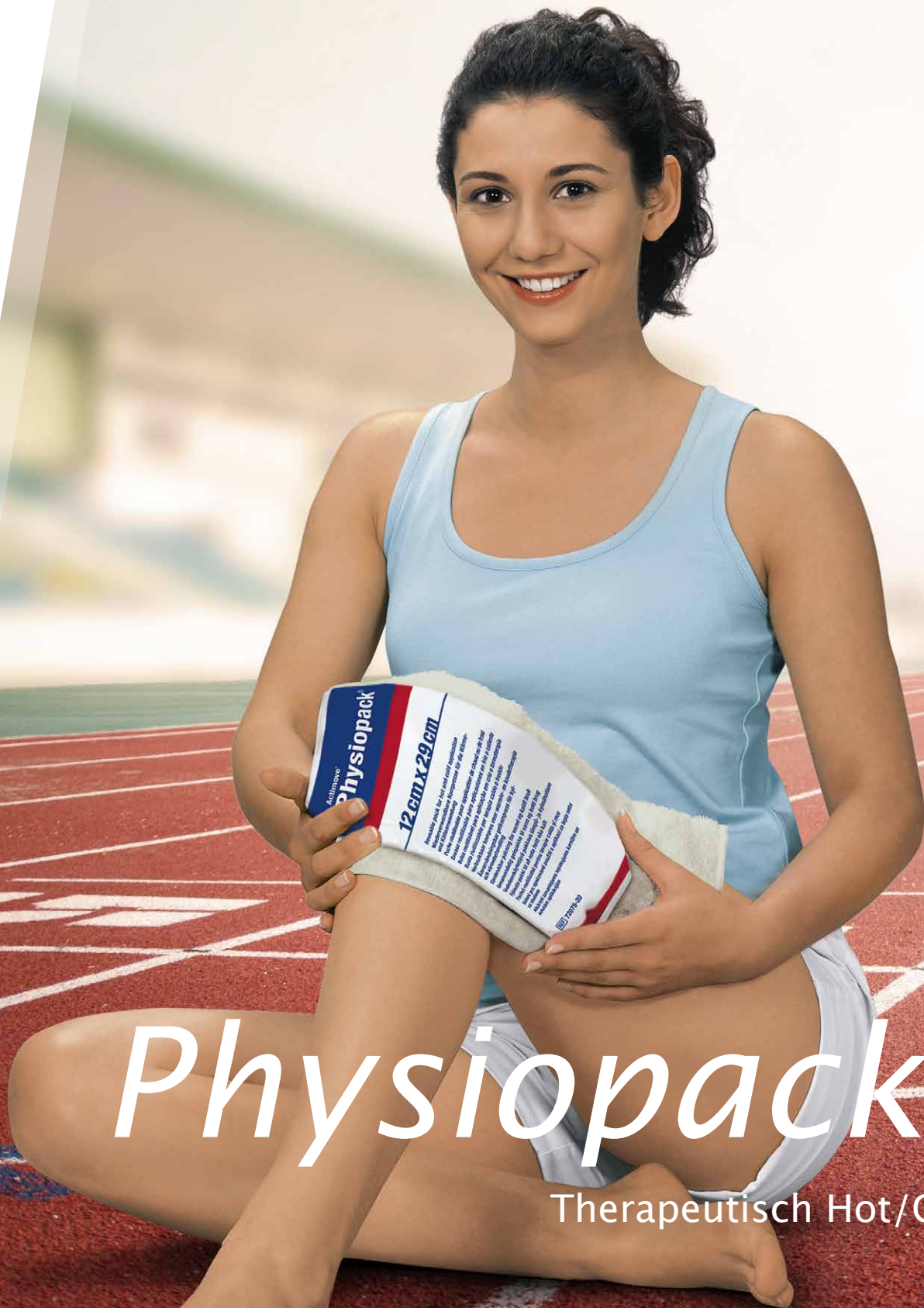

Physiopack®

Therapeutisch Hot/Cold pack

Physiopack®

Therapeutisch Hot/Cold pack

- Gemakkelijk en snel te koelen in de vriezer
- Blijft warm of koud gedurende de aanbevolen behandelingsduur van 20–30 minuten en draagt daardoor bij aan een effectieve behandeling
- Snel op te warmen in de magnetron of in heet water (niet kokend)
- Kan gemakkelijk worden schoongemaakt en gedesinfecteerd
- Geschikt voor thuisgebruik alsmede in een medische omgeving
- Twee soorten verpakkingen beschikbaar waarvan één specifiek voor verkoop in de apotheek
- De kompressen in de verpakking voor de apotheek zijn voorzien van een hoes ter bescherming van de huid
- Geschikt voor zowel warm als koud gebruik
- Bij koud gebruik blijft het kompres flexibel en behoudt het de vorm waarin het is geplaatst voor een gelijkmatige verdeling van de koelgel

- Gebruik altijd een doek onder het kompres om de huid te beschermen
- Gebruik het kompres, zowel warm als koud, niet langer dan 20–30 minuten
- Houd toezicht op het gebruik bij kinderen
- De gel mag niet worden ingeslikt. Raadpleeg een arts mocht dit toch voorvallen
- Let op eventuele contra-indicaties

Toepassingsgebieden:

Koudtherapie:

- Acuut letsel
- Plaatselijke ontstekingen (bijv. tendinitis, bursitis)
- Chronische ziekten (bijvoorbeeld osteoartritis, reumatoïde artritis)
- Spierspanning
- Vermindering van zwelling

Warmtherapie:

- Spierpijn
- Chronische pijn waarbij geen acute ontsteking aanwezig is (inclusief artritis)
- Spierstijfheid



Artikelnr.	ZI-nummer	Afmetingen product	Eenheid
72075-00016-0	16789814	12cm x 29cm	1 stuk
72075-00020-0	16789792	12cm x 29cm	25 in een doos
72075-00021-0	16789806	16cm x 26cm	20 in een doos