

Cutimed® Alginate

Alginaat verband



Eigenschappen en functies

Cutimed Alginate is een calcium-natrium alginaat, gemaakt van natuurlijk zeewier. Het alginaat kan tot 20 keer het eigen gewicht aan exsudaat absorberen. In contact met exsudaat verandert Cutimed Alginate snel van een droog alginaat in een vochtige en zachte gel. Een non-woven tussenlaag biedt een unieke stabiliteit aan het product. De gel creëert een vochtig wondmilieu wat genezing van de wond ondersteunt. Bacteriën en debris worden in de gel ingesloten en tijdens verbandwissels uit de wond verwijderd. Bovendien vermindert de absorptie van exsudaat het risico op lekkage en verweken van de wondranden.

Cutimed Alginate heeft een bloedstelpende werking.

Het gebruiksgemak van Cutimed Alginate is groot. Het is eenvoudig op maat te knippen en flexibele vezels vormen zich na gelering naar het wondbed, waar zij goed contact maken met de wondbodem.

Door de sterke structuur blijft Cutimed Alginate intact als het exsudaat absorbeert en in een gel verandert. Hierdoor is het product eenvoudig in één geheel en met zo min mogelijk partikelverlies uit de wond te halen en vermindert pijn en ongemak voor de patiënt.


Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan Cutimed Alginate tot 7 dagen in de wond blijven.

Samenstelling

- ♦ Calcium-natrium (70% - 30%) alginaat
- ♦ Non-woven laag biedt het voordeel van stabiliteit

Toepassingen

Cutimed Alginate is geschikt voor gemiddeld tot sterk exsuderende wonden die oppervlakkig of diep zijn, zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische ulcera, brandwonden en donor sites. Breng Cutimed Alginate altijd in de wond aan zonder overlap van de wondranden. Afdekken met een secundair verband en, indien nodig, fixeren.

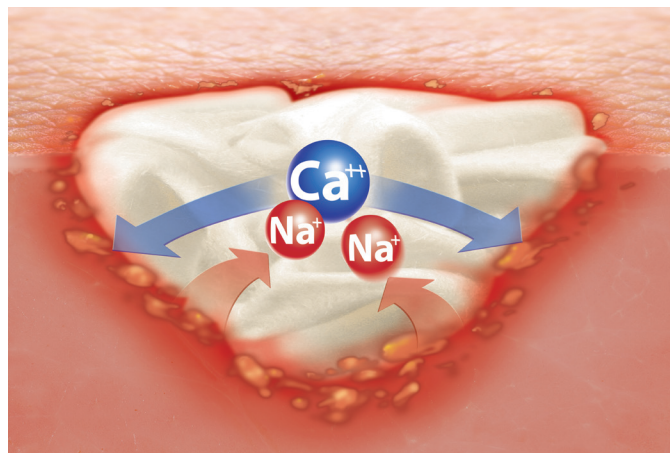

Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Alginate	5 x 5 cm	72634-12	10	60	15390551
••••• - ••••• ☹️ 🟡 🟠	10 x 10 cm	72634-13	10	40	15390578
	10 x 20 cm	72634-14	10	20	15390411
	2,5 x 30 cm (streng)	72634-15	5	80	15390373