

Cutimed® Sorbion®

Uitstekend en kostenefficiënt exsudaatmanagement

**Hét
wondverband
dat elke situatie
aankan**

Cutimed®

Cutimed® Sorbion®: combineert de belangrijkste producteigenschappen ter ondersteuning van wondgenezing

Als pionier in de categorie superabsorberende wondverbanden heeft Cutimed Sorbion zijn effectiviteit bewezen in de behandeling van wonden met matig tot zeer veel wondvocht. Cutimed Sorbion heeft de standaard gezet in modern exsudaatmanagement dankzij de gepatenteerde Hydration Response® Technology.

Het unieke design combineert belangrijke producteigenschappen en creëert daarmee de ideale condities ter ondersteuning van wondgenezing. Dit maakt Cutimed Sorbion een onmisbaar product bij de behandeling van wonden met matig tot zeer veel wondvocht.²

Cutimed® Sorbion®



Matig tot
zeer veel
wondvocht



Absorptie- vermogen

Superieur, verticaal absorptievermogen door de gelvormende kern met unieke Hydration Response® Technology.



Betrouwbare retentie

Door uitstekende retentie van wondvocht wordt lekkage vermeden en worden wondranden beschermd.



Vormt naar het wondbed

Wordt na het absorberen van wondvocht zacht en soepel. Blijft stabiel en in vorm en is comfortabel voor de patiënt.

² Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

Doordachte interactie van alle productonderdelen: Cutimed® Sorbion®

Ultrasonische afdichting

- Zonder gebruik te maken van kleef- en bindmiddelen, waardoor Cutimed Sorbion goed verdragen wordt door de huid

Gelvormende polymeren

- Vochtig wondmilieu
- Vormt zich naar het wondbed

Cellulosevezels


- Blijft stabiel, hoe verzadigd het ook is
- Verticale absorptie, veilig en snel

Kern van superabsorbers (gelvormende polymeren) en cellulosevezels

- Superieur absorptievermogen
- Uitstekende retentie, ook onder druk. Dankzij de hoge retentiegraad **zeer geschikt in combinatie met compressietherapie**
- **Minder frequent verbandwissel nodig**
- Wondvocht wordt gebonden in de kern waardoor lekkage voorkomen wordt
- Beperkt het risico van verweking van de wondranden door verticale absorptie

Ademende wondcontactlaag


- Beide zijden zijn geschikt voor contact met het wondbed
- Ondersteunt autolytisch debridement

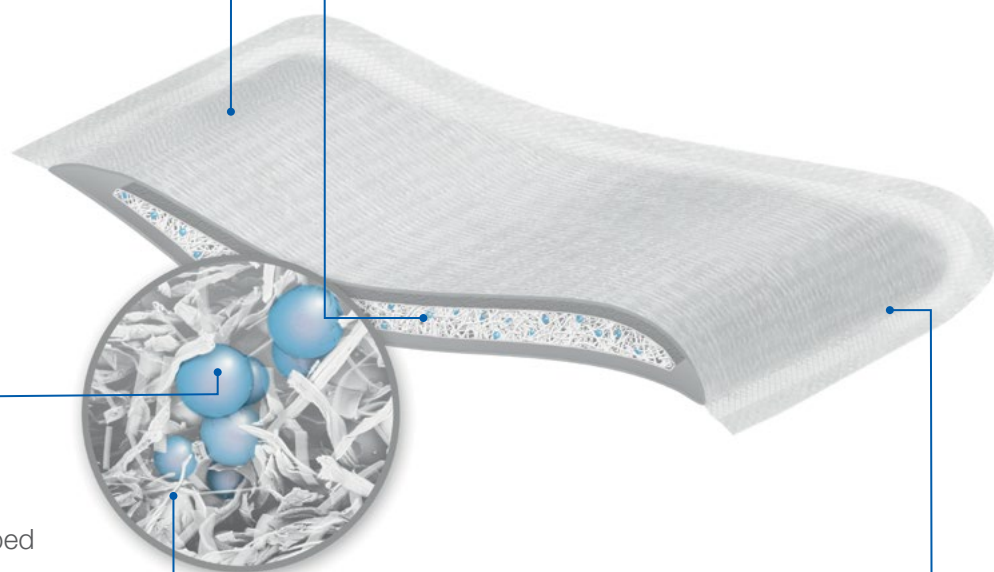

De wondcontactlaag maakt het verschil!

Het assortiment van Cutimed Sorbion biedt twee varianten waarbij de wondcontactlaag het verschil maakt.

- De polypropyleen wondcontactlaag van **Cutimed Sorbion Sachet** verwijdt fibrineus beslag en necrotisch weefsel tijdens de verbandwissel (soft debridement).
- De polyethyleen wondcontactlaag van **Cutimed Sorbion Sana** voorkomt verkleving aan het wondbed bij de behandeling van matig vochtige wonden.

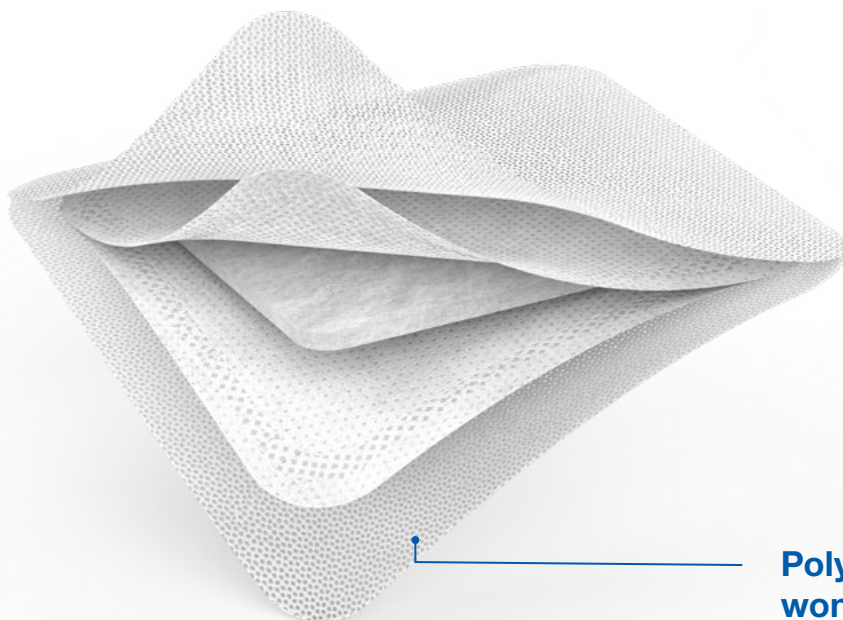


Polyethyleen wondcontactlaag

Cutimed Sorbion Sana heeft een extra polyethyleen wondcontactlaag die verkleving aan het wondbed voorkomt

De unieke Hydration Response® Technology van Cutimed® Sorbion®


Hydration Response® Technology bestaat uit drie componenten die optimaal samenwerken:

- Gelvormende polymeren (superabsorbers)
- Absorberende cellulosevezels
- Wondcontactlaag: polypropyleen (Sachet) en polyethyleen (Sana)

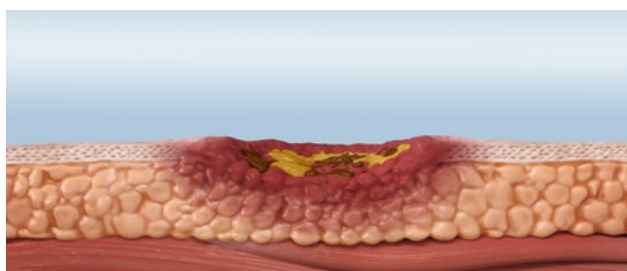


Voor behandeling

- De wond met matig tot (zeer) veel wondvocht en bedekt met fibrineus beslag en/of granulatieweefsel
- De wondrand heeft risico op maceratie

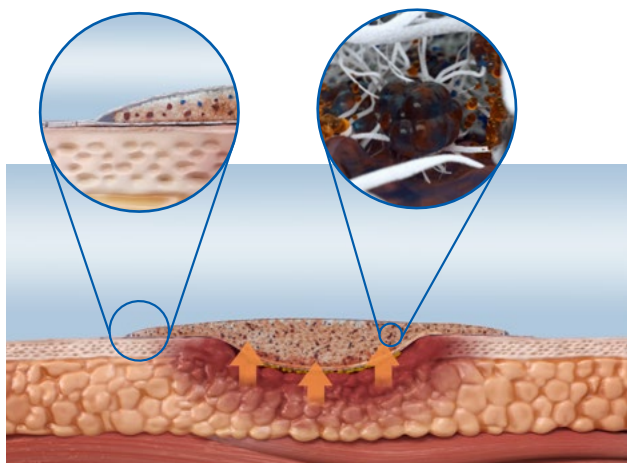


Gedurende de wondbehandeling

- Geabsorbeerd wondvocht wordt samen met micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) gebonden en ingesloten
- De expansierand maakt uitzetten van de absorberende kern mogelijk
- Door uitstekende retentie wordt maceratie van de wondranden en lekkage voorkomen
- De wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sachet ondersteunt soft debridement
- De wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sana voorkomt verkleefing aan het wondbed

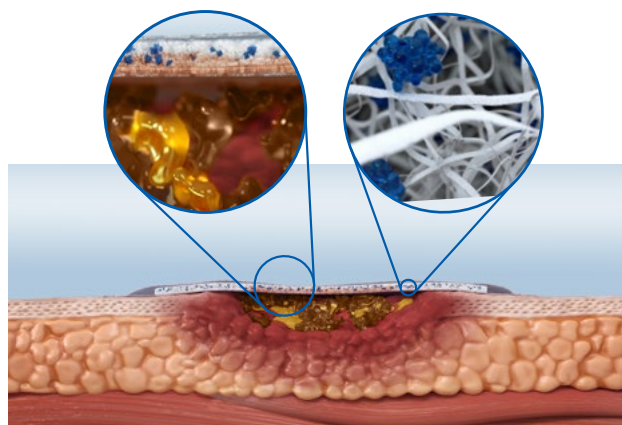

Hydration Response® Technology (HRT)

- De gelvormende kern van superabsorbers en cellulosevezels neemt (zeer grote hoeveelheden) wondvocht verticaal op en houdt dit vast
- Het verband blijft stabiel, hoe verzadigd het ook is
- De gelvormende kern creëert een vochtig wondmilieu en vormt zich naar het wondbed

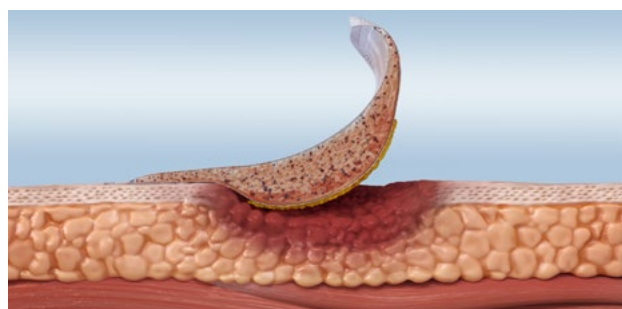

Het resultaat

- De wondranden worden beschermd
- Overtollig wondvocht, micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) worden verwijderd

Optimale vochtbalans en condities voor wondgenezing

Cutimed® Sorbion®:

met **bewezen** toegevoegde waarde

Vochtig wondmilieu

- Creëert optimale omstandigheden voor wondgenezing: behoudt vochtig wondmilieu en absorbeert micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's)




Ultiem gebruiksgemak

- Beiden zijden zijn geschikt voor contact met het wondbed.



Ideaal onder compressietherapie

- Dankzij de hoge retentiegraad bij uitstek geschikt in combinatie met compressietherapie
- Door de ultrasone afdichting en geen gebruikmaking van kleefstoffen en bindmiddelen is het geschikt voor kwetsbare huid

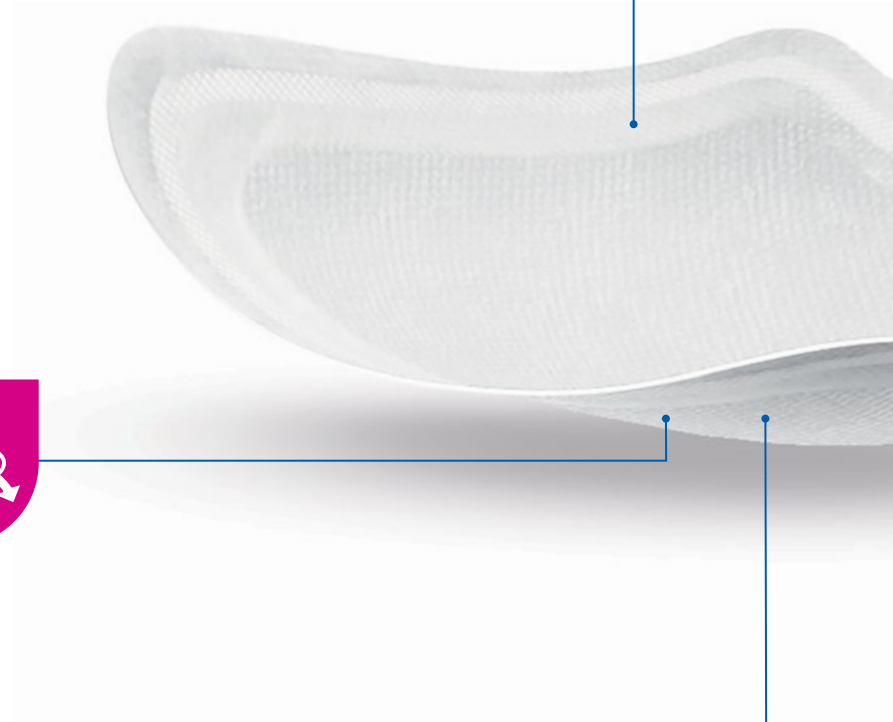



Reinigend effect Cutimed Sorbion Sachet:

- Ondersteunt autolytisch debridement: vermindering van fibrineus beslag



- Bindt debris en ontstekingsfactoren zoals MMP's veilig in de absorberende kern
 - Uitstekende retentieprestaties sluiten geabsorbeerd wondvocht en micro-organismen veilig in waardoor eventuele geur verminderd wordt
- ▶ Creëert optimale condities voor wondgenezing²

² Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

Indicatie: wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht* zoals:

- Decubitus
- Ulcus cruris venosum
- Oncologische ulcera

* Zie verder de indicaties in de IFU/gebruiksaanwijzing



Geweldige prestaties op alle vlakken³

Gemiddeld **44.7%**
hogere opname capaciteit^{1,*}

Gemiddeld **55%**
hogere retentie¹

Tot wel **28%**
kostenbesparing³

Tot wel **87%**
minder onaangename
geur en pijn⁵



Bespaar tijd en geld tot wel 28%

Efficiëntie van de behandeling wordt in toenemende mate een relevant criterium bij het beoordelen van wondzorgproducten. Door een snellere genezingstendens dan bij gebruik van andere superabsorberende verbanden biedt Cutimed Sorbion Sachet S een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Door het gebruik van Cutimed Sorbion Sachet S bij patiënten met ulcus cruris venosum kunnen de kosten per patiënt tot wel 28% verlaagd worden. Betere genezingstendens en minder verbandwissels - door de hoge absorptiecapaciteit - resulteren in lagere personeelskosten. Dit kan leiden tot een significante verlaging van de totale behandelingskosten.

* Comparison of the retention performance: Cutimed® Sorbion® Sachet S: 203 ml average other superabsorber: 131 ml

¹ Compared to comparable dressings (data on file).

³ Panca, M., et al. (2013): "Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLU's", Journal of Wound Care, Volume 22., Number 3.


⁴ Cutting, K. F., "A clinical evaluation of a dressing containing hydrokinetic fibres in ten venous leg ulcers patients attending a complex wound clinic", 2014

⁵ Bronstoring, K., Maassen, A. (2014): "Reduced odour and pain as indicators for quality of life in wound patients – results of an observational study", Poster presented at the Middle East Wounds and Scar Meeting, Dubai.



Past altijd door de verschillende varianten

Behalve twee varianten met verschillende wondcontactlagen (Sachet en Sana) biedt het Cutimed Sorbion assortiment vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant. Daarmee is er altijd een juiste variant beschikbaar!

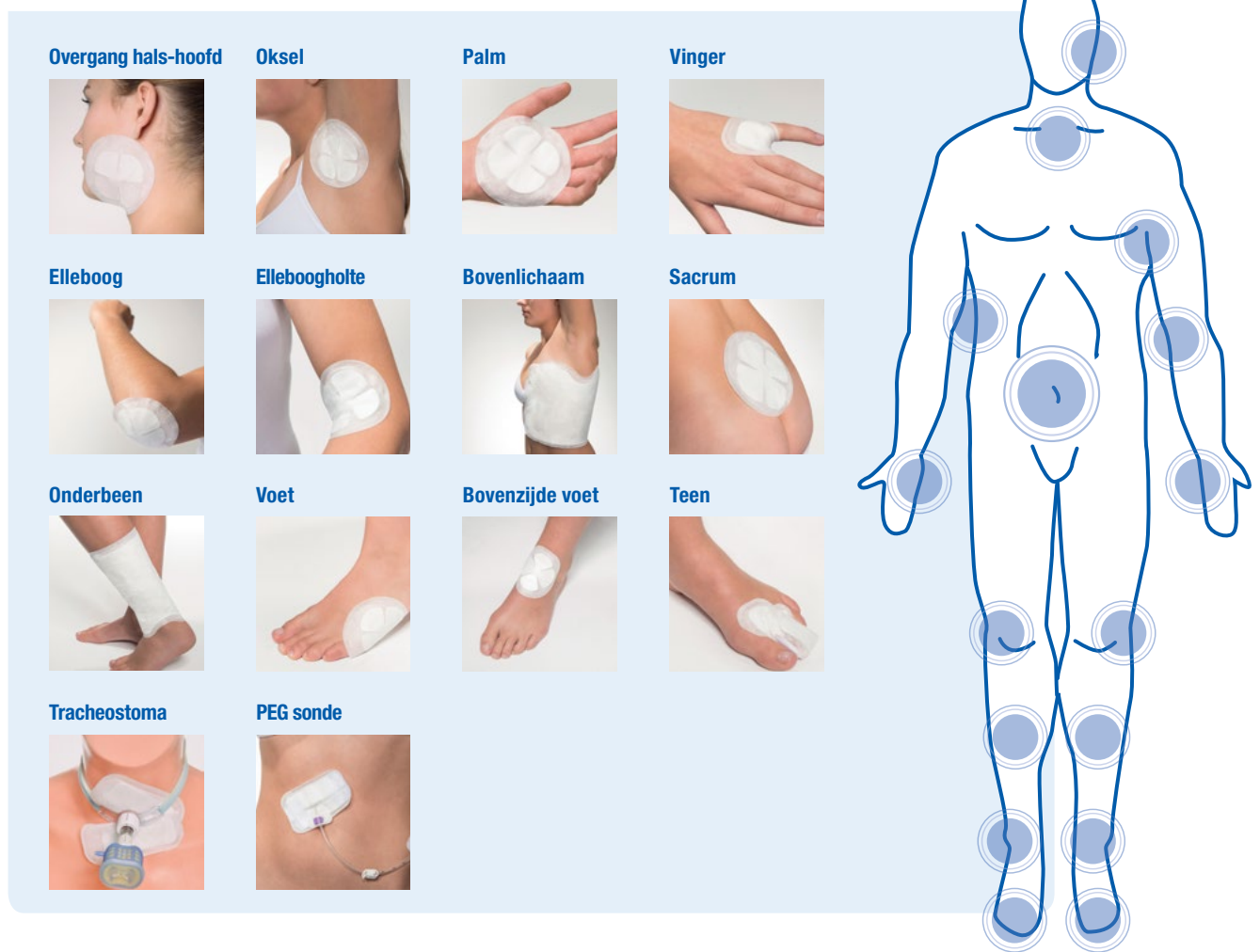

Sachet S



Sana



XL



Multi Star



S Drainage

Let op: alle Cutimed® Sorbion® verbanden hebben aanvullende fixatie nodig.

Veelzijdig toepasbaar

Cutimed® Sorbion® XL

De Grote

- Voor eenvoudige toepassing op wonden op een groot oppervlak, zoals onderbenen
- Met inkeping voor bijvoorbeeld wreef



Cutimed® Sorbion® Multi Star

De Flexibele

- Vormt zich naar het lichaamsdeel





Cutimed® Sorbion® Sachet S en -Sana **De klassiekers**

De klassiekers voor veilige toepassing:

- Sachet S voor soft debridement
- Sana voor het voorkomen van verkleefing aan het wondbed bij matig vochtige wonden



Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage **De 2-delige**

- Splitverband speciaal voor toegangspunten van drains. PEG sonde en voor suprapubis catheter

Productoverzicht

		Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag die op zachte wijze fibrineusbeslag en necrotisch weefsel verwijderd bij iedere verbandwissel (soft debridement) 	 S	7,5 x 7,5 cm	73232-00	10	62	16187962
		7,5 x 7,5 cm	73232-01	25	34	16187970
		7,5 x 7,5 cm	73232-02	50	33	-
		10 x 10 cm	73232-06	10	62	16187989
		10 x 10 cm	73232-07	25	34	16187997
		10 x 10 cm	73232-08	50	18	-
		20 x 10 cm	73232-09	10	34	16188020
		20 x 10 cm	73232-10	25	23	16188039
		20 x 10 cm	73232-11	50	10	-
		15 x 15 cm	73232-12	10	36	16188004
		15 x 15 cm	73232-13	25	14	16188012
		15 x 15 cm	73232-14	50	6	-
		20 x 20 cm	73232-15	10	22	16188047
		20 x 20 cm	73232-16	25	12	16188055
		20 x 20 cm	73232-17	50	6	-
		30 x 20 cm	73232-18	10	17	16188063
		30 x 20 cm	73232-19	25	10	-
		30 x 20 cm	73232-20	50	6	-
 Multi star		ø 8 cm	73237-01	10	76	16188098
		ø 14 cm	73237-03	10	32	16188101
 XL		45 x 25 cm	73240-00	10	10	16188071
 S Drainage		10 x 10 cm	73241-00	10	76	16211723
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag 	 Sana	8,5 x 8,5 cm	73233-00	10	62	16188128
		12 x 12 cm	73233-03	10	62	16188144
		12 x 12 cm	73233-04	25	18	16188152
		22 x 12 cm	73233-06	10	34	16188160
		22 x 12 cm	73233-07	25	10	16188179
		22 x 22 cm	73233-09	10	22	16188187
	 Multi Star	ø 11 cm	73238-01	10	62	16188195
		ø 17 cm	73238-03	10	36	16188209
	 XL	28 x 48 cm	73278-00	5	10	17089549