

Cutimed® Sorbion®

Uitstekend en kostenefficiënt exsudaatmanagement

Hét
wondverband
dat elke situatie
aankan

Cutimed®

Cutimed® Sorbion®: combineert de belangrijkste producteigenschappen ter ondersteuning van wondgenezing

Als pionier in de categorie superabsorberende wondverbanden heeft Cutimed Sorbion zijn effectiviteit bewezen in de behandeling van wonden met matig tot zeer veel wondvocht. Cutimed Sorbion heeft de standaard gezet in modern exsudaatmanagement dankzij de gepatenteerde Hydration Response® Technology.

Het unieke design combineert belangrijke producteigenschappen en creëert daarmee de ideale condities ter ondersteuning van wondgenezing. Dit maakt Cutimed Sorbion een onmisbaar product bij de behandeling van wonden met matig tot zeer veel wondvocht.²

Cutimed® Sorbion®



Matig tot
zeer veel
wondvocht




Absorptievermogen

Superieur, verticaal absorptievermogen door de gelvormende kern met unieke Hydration Response® Technology.



Betrouwbare retentie

Door uitstekende retentie van wondvocht wordt lekkage vermeden en worden wondranden beschermd.

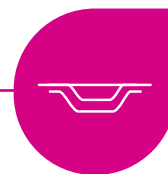

Vormt naar het wondbed

Wordt na het absorberen van wondvocht zacht en soepel. Blijft stabiel en in vorm en is comfortabel voor de patiënt.

² Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

Doordachte interactie van alle productonderdelen: Cutimed® Sorbion® Sachet

Ultrasonische afdichting

- Zonder gebruik te maken van kleef- en bindmiddelen, waardoor Cutimed Sorbion goed verdragen wordt door de huid

Gelvormende polymeren

- Vochtig wondmilieu
- Vormt zich naar het wondbed

Cellulosevezels


- Blijft stabiel, hoe verzadigd het ook is
- Verticale absorptie, veilig en snel

Kern van superabsorbers (gelvormende polymeren) en cellulosevezels

- Superieur absorptievermogen
- Uitstekende retentie, ook onder druk. Dankzij de hoge retentiegraad zeer geschikt in combinatie met compressietherapie
- Minder verbandwissels nodig
- Wondvocht wordt gebonden in de kern waardoor lekkage voorkomen wordt
- Beperkt het risico van verweking van de wondranden door verticale absorptie

Ademende wondcontactlaag


- Beide zijden zijn geschikt voor contact met het wondbed
- Ondersteunt autolytisch debridement

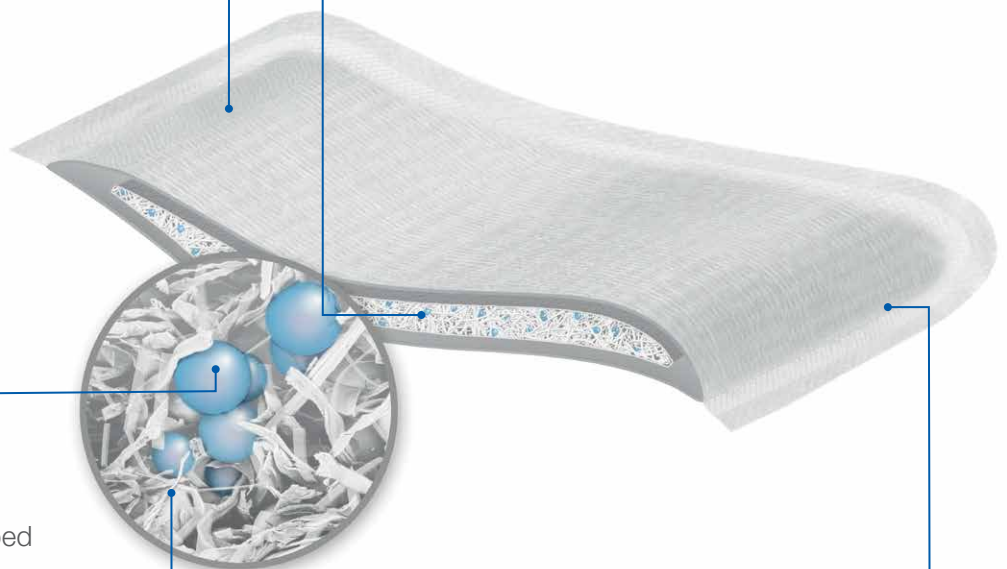

Compleet assortiment voor effectief exsudaatmanagement

Het assortiment van Cutimed Sorbion biedt drie varianten:

- De polypropyleen wondcontactlaag van **Cutimed Sorbion Sachet** verwijdert fibrineus beslag en necrotisch weefsel tijdens de verbandwissel (soft debridement).
- **Cutimed Sorbion Border** heeft dezelfde wondcontactlaag als Cutimed Sorbion Sachet, maar heeft een waterdichte folie toplaag en siliconen kleefrand voor snelle, betrouwbare fixatie en atraumatische verwijdering.
- De polyethyleen wondcontactlaag van **Cutimed Sorbion Sana** voorkomt verkleving aan het wondbed bij de behandeling van matig vochtige wonden.

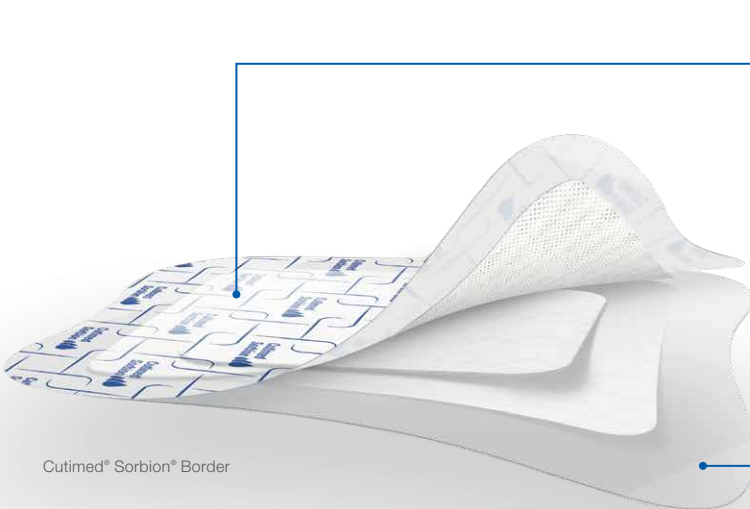

Cutimed® Sorbion® Border



Waterdichte folie toplaag

- Maakt douchen mogelijk
- Voorkomt lekkage van wondvocht en dient als bescherming





Innovatieve siliconen kleeflaag

- Zachte en veilige fixatie
- Atraumatisch te verwijderen

De unieke Hydration Response® Technology van Cutimed® Sorbion®


Hydration Response® Technology bestaat uit drie componenten die optimaal samenwerken:

- Gelvormende polymeren (superabsorbers)
- Absorberende cellulosevezels
- Wondcontactlaag: polypropyleen (Sachet en Border) en polyethyleen (Sana)

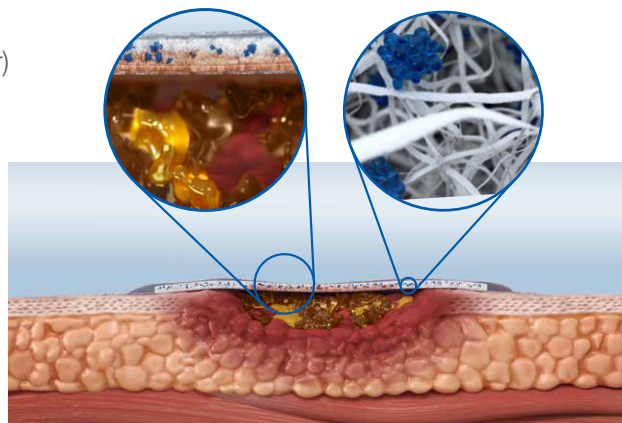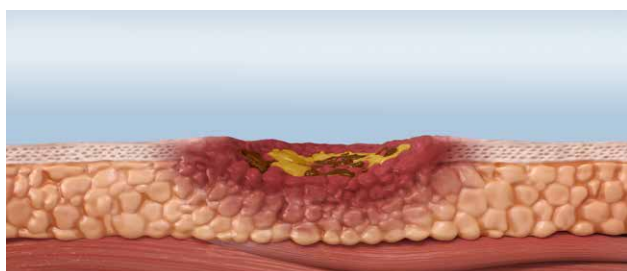

Voor behandeling

- De wond met matig tot (zeer) veel wondvocht en bedekt met fibrineus beslag en/of granulatieweefsel
- De wondrand heeft risico op maceratie

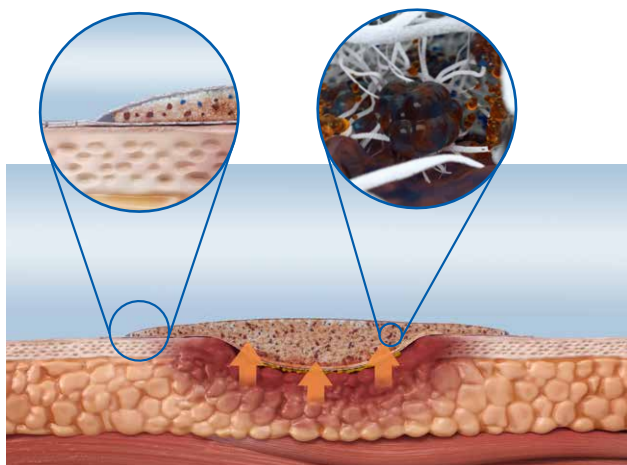


Gedurende de wondbehandeling

- Geabsorbeerd wondvocht wordt samen met micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) gebonden en ingesloten
- De expansierand maakt uitzetten van de absorberende kern mogelijk
- Door uitstekende retentie wordt maceratie van de wondranden en lekkage voorkomen
- De wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sachet ondersteunt soft debridement
- De wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sana voorkomt verkleving aan het wondbed

Hydration Response® Technology (HRT)

- De gelvormende kern van superabsorbers en cellulosevezels neemt (zeer grote hoeveelheden) wondvocht verticaal op en houdt dit vast
- Het verband blijft stabiel, hoe verzadigd het ook is
- De gelvormende kern creëert een vochtig wondmilieu en vormt zich naar het wondbed

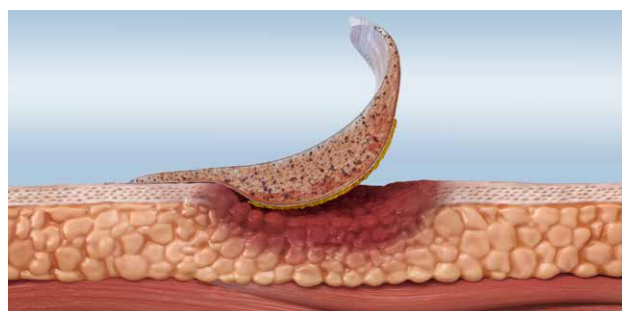

Het resultaat

- De wondranden worden beschermd
- Overtollig wondvocht, micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) worden verwijderd

Optimale vochtbalans en condities voor wondgenezing

 Wondvocht  Fibrineus beslag  Polymeren

Cutimed® Sorbion®:

met **bewezen** toegevoegde waarde

Vochtig wondmilieu

- Creëert optimale omstandigheden voor wondgenezing: behoudt vochtig wondmilieu en absorbeert micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's)



Ultiem gebruiksgemak

- Beiden zijden zijn geschikt voor contact met het wondbed.*



Ideaal onder compressietherapie

- Dankzij de hoge retentiegraad bij uitstek geschikt in combinatie met compressietherapie



* Dit geldt niet voor Cutimed Sorbion Border



Reinigend effect Cutimed Sorbion Sachet en -Border:

- Ondersteunt autolytisch debridement: vermindering van fibrineus beslag



- Bindt debris en ontstekingsfactoren zoals MMP's veilig in de absorberende kern
- Uitstekende retentieprestaties sluiten geabsorbeerd wondvocht en micro-organismen veilig in waardoor eventuele geur verminderd wordt
 - ▶ Creëert optimale condities voor wondgenezing²

² Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

Indicatie: wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht* zoals:

- Decubitus
- Ulcus cruris venosum
- Oncologische ulcera

* Zie verder de indicaties in de IFU/gebruiksaanwijzing



Geweldige prestaties op alle vlakken³

Gemiddeld **44.7%**

hogere opname capaciteit¹

Gemiddeld **55%**

hogere retentie¹

Tot wel **28%**

kostenbesparing³

Tot wel **87%**

minder onaangename
geur en pijn⁵



Bespaar tijd en geld tot wel 28%

Efficiëntie van de behandeling wordt in toenemende mate een relevant criterium bij het beoordelen van wondzorgproducten. Door een snellere genezingstendens dan bij gebruik van andere superabsorberende verbanden biedt Cutimed Sorbion Sachet S een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Door het gebruik van Cutimed Sorbion Sachet S bij patiënten met ulcus cruris venosum kunnen de kosten per patiënt tot wel 28% verlaagd worden. Beter genezingstendens en minder verbandwissels - door de hoge absorptiecapaciteit - resulteren in lagere personeelskosten. Dit kan leiden tot een significante verlaging van de totale behandelingskosten.

* Comparison of the retention performance: Cutimed® Sorbion® Sachet S: 203 ml average other superabsorber: 131 ml

¹ Compared to comparable dressings (data on file).

³ Panca, M., et al. (2013): "Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLU's", Journal of Wound Care, Volume 22., Number 3.

⁴ Cutting, K. F., "A clinical evaluation of a dressing containing hydrokinetic fibres in ten venous leg ulcers patients attending a complex wound clinic", 2014

⁵ Bronstoring, K., Maassen, A. (2014): "Reduced odour and pain as indicators for quality of life in wound patients – results of an observational study", Poster presented at the Middle East Wounds and Scar Meeting, Dubai.



Past altijd door de verschillende varianten

Behalve drie varianten met verschillende top- en wondcontactlagen biedt het Cutimed Sorbion assortiment vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant. Daarmee is er altijd een juiste variant beschikbaar!

Overgang hals-hoofd 	Oksel 	Palm 	Vinger 	
Elleboog 	Elleboogholte 	Bovenlichaam 	Sacrum 	
Onderbeen 	Voet 	Bovenzijde voet 	Teen 	
Tracheostoma 	PEG sonde 			



Sachet S



Sana



XL



Multi Star



S Drainage



Border

Let op: alle Cutimed® Sorbion® verbanden hebben aanvullende fixatie nodig, met uitzondering van Cutimed® Sorbion® Border.

Veelzijdig toepasbaar

Cutimed® Sorbion® XL

De Grote

- Voor eenvoudige toepassing op wonden op een groot oppervlak, zoals onderbenen
- Met inkeping voor bijvoorbeeld wreef



Cutimed Sorbion Border

De zelfklevende

- Geen secundaire fixatie nodig door de siliconen border
- Atraumatisch te verwijderen



Cutimed® Sorbion® Multi Star

De Flexibele

- Vormt zich naar het lichaamsdeel





Cutimed® Sorbion® Sachet S en -Sana De klassiekers

De klassiekers voor veilige toepassing:









- Sachet S voor soft debridement
- Sana voor het voorkomen van verkleving aan het wondbed bij matig vochtige wonden



Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage De 2-delige

- Splitverband speciaal voor insteekopeningen van drains, PEG sonde en voor suprapubis catheter

Productoverzicht

		Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement)	S 	7,5 x 7,5 cm	73232-00	10	62	16187962
		7,5 x 7,5 cm	73232-01	25	34	16187970
		10 x 10 cm	73232-06	10	62	16187989
		10 x 10 cm	73232-07	25	34	16187997
		10 x 20 cm	73232-09	10	34	16188020
		10 x 20 cm	73232-10	25	23	16188039
		15 x 15 cm	73232-12	10	36	16188004
		15 x 15 cm	73232-13	25	14	16188012
		20 x 20 cm	73232-15	10	22	16188047
		20 x 20 cm	73232-16	25	12	16188055
		20 x 30 cm	73232-18	10	17	16188063
Multi Star 	ø 8 cm	73237-01	10	-	16188098	
	ø 14 cm	73237-03	10	-	16188101	
XL 	25 x 45 cm	73240-00	10	-	16188071	
S Drainage 	10 x 10 cm	73241-00	10	76	16211723	
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels		10 x 10 cm	71010-00	10	32	17159814
		15 x 15 cm	71010-02	10	14	17159849
		20 x 20 cm	71010-03	10	12	17159857
		10 x 23 cm	71010-04	10	20	17159865
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag.		8,5 x 8,5 cm	73233-00	10	62	16188128
		12 x 12 cm	73233-03	10	62	16188144
		12 x 12 cm	73233-04	25	18	16188152
		12 x 22 cm	73233-06	10	34	16188160
		12 x 22 cm	73233-07	25	10	16188179
		22 x 22 cm	73233-09	10	22	16188187
Multi Star 	ø 11 cm	73238-01	10	62	16188195	
	ø 17 cm	73238-03	10	36	16188209	
XL 	28 x 48 cm	73278-00	5	10	17089549	

Cutimed Sorbion Sachet S is ook verkrijgbaar per 50 stuks. Scan de QR code voor het volledige assortimentsoverzicht:



NIEUW!