

	Artikelnr.	Afmeting	Aantal	ZI-nr.
Leukomed* T skin sensitive 	76464-00	5 x 7,2 cm	5	16869966
	76464-01	8 x 10 cm	5	16869974
	76464-02	8 x 15 cm	5	16869990
Leukomed* T 	72381-00	7,2 x 5 cm	50	15103064
	72381-01	8 x 10 cm	50	15103072
	72381-02	11 x 14 cm	50	15103080
	72381-14	10 x 25 cm	50	15499715
	72381-13	15 x 25 cm	5	15297950
Elastomull* - gecellofaneerd 	02094-00	4 m x 4 cm	1	12345652
	02095-00	4 m x 6 cm	1	12345660
	02096-00	4 m x 8 cm	1	12345679
	02097-00	4 m x 10 cm	1	12345687
Elastomull* haft 	45470-00	4 m x 4 cm	1	13299530
	45471-00	4 m x 6 cm	1	13299549
	45472-00	4 m x 8 cm	1	13299557
	45473-00	4 m x 10 cm	1	13299565
Elastofix* 	02140-00	A 25 m (vingers - kleine ledematen)	1	12353434
	02141-00	B 25 m (ledematen - kleine hoofden)	1	12353442
	02142-00	C 25 m (hoofd - kleine romp)	1	12353450
	02143-00	D 25 m = romp	1	12353469
Tensofast* double stretch 	73447-00	rood 10 m x 3,5 cm	1	15260291
	73447-01	groen 10 m x 5 cm	1	15260305
	73447-02	blauw 10 m x 7,5 cm	1	15260313
	73447-03	geel 10 m x 10,75 cm	1	15260321
	73447-04	beige 10 m x 17,5 cm	1	15260348
Tensogrip* 	09831-00	maat B - 1 m x 6,25 cm	1	15323978
	09833-00	maat C - 1 m x 6,75 cm	1	14808390
	09835-00	maat D - 1 m x 7,50 cm	1	14808404
	09834-00	maat E - 1 m x 8,75 cm	1	14808412
	09836-00	maat F - 1 m x 10,0 cm	1	14808420



Leukoplast® - De keuze van de professional

Al meer dan 100 jaar vertrouwen professionals op de expertise en hoogwaardige producten van Leukoplast®. Ook Fixomull® skin sensitive zal daarom onder het merk Leukoplast® beschikbaar zijn.



De artikelen in dit overzicht zijn van de meest gangbare maten.
Voor meer artikelnummers kunt u contact opnemen met medical.cs.nl@essity.com.



Fixatiewijzer



	Artikelnr.	Afmeting	Aantal	ZI-nr.
Leukoplast* 	01521-00	5 m x 1,25 cm	1	12200948
	01522-00	5 m x 2,50 cm	1	12200956
	01536-00	9,2 m x 1,25 cm	1	13933531
	01537-00	9,2 m x 2,50 cm	1	13933558
Leukoplast* hospital 	01756-00	9,2 m x 1,25 cm	1	13947516
	01757-00	9,2 m x 2,50 cm	1	13947524
	01758-00	9,2 m x 5,00 cm	1	13947532
Leukoplast* Pro LF 	72212-00	5 m x 1,25 cm	1	15011399
	72212-01	5 m x 2,5 cm	1	15011402
	72213-00	9,2 m x 1,25 cm	1	15068951
Leukoplast* skin sensitive 	76173-00	2,6 m x 1,25 cm	1	16781643
	76173-01	2,6 m x 2,5 cm	1	16781651
	76175-00	2,6 m x 2,5 cm zonder klemring	1	16781678
	76173-06	1 m x 2,5 cm	1	16781686
Leukosilk* 	01021-00	5 m x 1,25 cm	1	12201030
	01022-00	5 m x 2,50 cm	1	12201049
	09566-00	9,2 m x 1,25 cm	1	13932659
	09567-00	9,2 m x 2,50 cm	1	13932667
Leukopor* 	02471-00	5 m x 1,25 cm	1	12200964
	02472-00	5 m x 2,50 cm	1	12200972
	02453-00	9,2 m x 1,25 cm	1	13900005
	02454-00	9,2 m x 2,50 cm	1	13856049
Fixomull* skin sensitive 	79965-01	5 m x 5 cm	1	16781694
	79965-02	5 m x 10 cm	1	16781708
	79965-03	5 m x 15 cm	1	16781716
	79965-04	2 m x 10 cm	1	16781724
Fixomull* stretch 	02036-00	10 m x 5 cm	1	12355100
	02037-00	10 m x 10 cm	1	12355119
	02038-00	10 m x 15 cm	1	12355127
	02039-00	10 m x 20 cm	1	12355135
Fixomull* transparent 	72216-00	10 m x 5 cm	1	15044726
	72216-01	10 m x 10 cm	1	15044734
	72216-02	10 m x 15 cm	1	15044742
	72217-00	2 m x 10 cm	1	15044718



Tips voor aanbrengen

Aanbrengen


- Klevende producten altijd aanbrengen op de droge huid.
- Polyacrylaat en siliconen kleeflagen kleven sneller en beter door aanwrijven (warmte).
- Siliconen kleeflagen behouden werking dus kleeft bij losmaken opnieuw.
- Gebruik voor verwijderen van zinkoxide kleeflagen Leukotape Remover.
- Let op de richting van rek in het product bij aanbrengen.
- Breng een fixatieproduct niet onder rek aan.
- Rond hoeken af door knippen voor betere hechting op bewegende lichaamsdelen bij volvlakfixatie.
- Breng onder zinkoxide kleeflagen een huidbeschermers (Cutimed Protect) aan.
- Verwijder na aanbrengen van Leukomed T (skin sensitive) en Fixomull transparent het bovenste schutblad met behulp van de rode rand.



Fixomull stretch en Fixomull skin sensitive

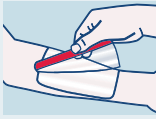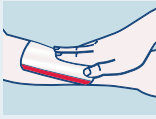

Leukomed T en Leukomed T skin sensitive

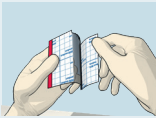

Fixomull transparent

Voor meer informatie bezoek ons **Leukoplast®** YouTube kanaal:



Wat wil je doen?	Generieke productnaam	Waar let je op?	Zeer gevoelige, kwetsbare huid <i>Bijvoorbeeld: baby's, ouderen, chronisch zieken, extreem droge huid</i>	Gevoelige huid <i>Bijvoorbeeld: langdurig zieken, kinderen, droge huid</i>	Gezonde huid <i>Bijvoorbeeld: jongeren, volwassenen, kortdurend ziek</i>
Kritische fixatie van sondes, tubes etc. - op de huid	HECHTPLEISTER	Latexvrije zinkoxide kleeflaag	Leukoplast Pro LF	Leukoplast Pro LF	Leukoplast Pro LF
		Zinkoxide-rubber kleeflaag (bevat latex)	Leukoplast (Hospital)	Leukoplast (Hospital)	Leukoplast (Hospital)
		Siliconen kleeflaag	Leukoplast skin sensitive		
		Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag (non-woven)		Leukopor	Leukopor
		Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag (kunstzijde)		Leukosilk	Leukosilk
Niet kritische fixatie - op de huid	HECHTPLEISTER	Hypoallergene polyacrylaat kleeflaag - uitwasbaar	Leukopor	Leukopor	Leukopor
Vastzetten zwachtel/windseel	HECHTPLEISTER				
Groot oppervlak of wondverband fixeren	VOLVLAKFIXATIE NON-WOVEN	< 2-3 weken	Fixomull skin sensitive	Fixomull stretch	Fixomull stretch
	VOLVLAKFIXATIE NON-WOVEN	> 2-3 weken	Fixomull skin sensitive	Fixomull skin sensitive	Fixomull stretch
	VOLVLAKFIXATIE FOLIE	Onsteriel	Fixomull transparent	Fixomull transparent	Fixomull transparent
		Steriel < 2-3 weken	Leukomed T skin sensitive	Leukomed T	Leukomed T
		Steriel > 2-3 weken	Leukomed T skin sensitive	Leukomed T skin sensitive	Leukomed T
Fixeren op bewegend lichaamsdeel (als volvlakfixatie geen optie is)	FIXATIEWINDELS	Niet klevend	Elastomull	Elastomull	Elastomull
		Op zichzelf klevend	Elastomull Haft	Elastomull Haft	Elastomull Haft
	BUIJSVERBAND	Zeer elastisch	Elastofix	Elastofix	Elastofix
		Licht elastisch	Tensofast double stretch	Tensofast double stretch	Tensofast double stretch
		Steun geven	Tensogrip	Tensogrip	Tensogrip

Tips voor verwijderen


Verwijderen

- Polyacrylaat is oplosbaar in water: natmaken (lauw water) vereenvoudigt verwijderen.
- Door warmte gaan kleeflagen harder plakken: verwijderen tijdens douchebeurt raden we af.
- Siliconen kleeflagen laten los zonder de huid te beschadigen.
- Verwijder een fixatie product dat kleeft altijd in de groeirichting van de haren.
- Een folie is eenvoudig te verwijderen door deze evenwijdig aan de huid en in de groeirichting van de haren uit te rekken.



Leukomed T, Leukomed T skin sensitive en Fixomull transparent

Fixatietips (voorbeelden) Elastofix

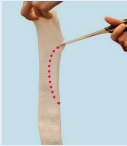

- Zorg er voor dat de juiste maat Elastofix gebruikt wordt: er is een passende maat voor ieder lichaamsdeel.
- Knip een stuk af dat lang genoeg is: bij uittrekken in de breedte wordt Elastofix minder lang.
- Elastofix is te knippen in alle mogelijke vormen: let hierbij op, op welk lichaamsdeel gefixeerd wordt.
- Het aantal betrokken lichaamsdelen bepalen waar en hoeveel gaten er in Elastofix geknipt moeten worden.
- Op plaatsen waar een lichaamsdeel doorheen moet kunnen of bij gedeeltes die vrij moeten blijven, hoort een opening.
- De gaten moeten groot genoeg zijn om insnoeren tegen te gaan.