

ADVIESWIJZER CONFECTIE-ASSORTIMENT

voor veneuze indicaties

INDICATIE	OEDEEMNEIGING	STIFFNESS	ULTRASHEER	OPAQUE	MATERNITY OPAQUE	CLASSIC*	ELVAREX SOFT RTW	FORMEN EXPLORE	FORMEN AMBITION
Primaire varices	Nee	Laag	CCL 2 (v)	CCL 2 (m/v)		CCL 2 (m/v)		CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Secundaire varices	Nee	Laag	CCL 2 (v)	CCL 2 (m/v)				CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Zwangerschapsvarices	Nee	Laag		CCL 2 (m/v)	CCL 2 (v)				
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Trombose (oppervlakkig of diep)	Nee	Laag				CCL 2/3 (m/v)		CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2/3** (m/v)		
CVI met oedeem (Widmer Fase 1)		Laag		CCL 2 (m/v)				CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
CVI met oedeem (Widmer Fase 2)		Laag		CCL 2 (m/v)		CCL 2/3 (m/v)	CCL 2/3** (m/v)	CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
Veneuze malformaties		Laag				CCL 2/3 (m/v)		CCL 2/3** (m/v)	CCL 2/3** (m/v)
inactiviteitsoedeem (dependency syndrome)		Hoog					CCL 2/3** (m/v)		


* Alleen mobiele patiënten ** Alleen beschikbaar in AD

Deze advieswijzer is gebaseerd op het Hulpmiddelenkompas

JOBST® Ultrasheer

- Zeer transparante kous
- Keuze uit verschillende kleuren, inclusief twee trendkleuren
- Met SoftFit-boord om afzakken op een comfortabele manier te voorkomen

Tip: kies bij ernstige spataderen voor JOBST Classic

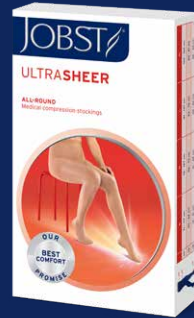

JOBST® Opaque

- Zachte, lichtdoorlatende kous
- Verdoezelt zichtbare spataderen
- Hoog aantrekgemak
- Met SoftFit-boord om afzakken op een comfortabele manier te voorkomen

Tip: kies bij een volle kuit voor JOBST Classic



JOBST® Classic

- Stevige kous met beperkte lengterek
- Beschikbaar in klasse 2 en 3
- Meerdere opties in confectie

Tip: kies bij snelle oedeemvorming voor JOBST Elvarex Soft



JOBST® Elvarex Soft

- Zachte kous die prettig op de huid voelt
- Vlakbreimateriaal om insnoeren te voorkomen
- Confectie in AD, CCL 2 en 3
- Hoog aantrekgemak

Tip: gebruik voor het aanmeten de JOBST tension matrix (zie JOBST meetstandaard)



JOBST® forMen Ambition

- Een stijlvolle kous voor de smalle kuit
- Door het hoge katoengehalte voelt de kous de hele dag prettig
- Verkrijgbaar in extra lange uitvoering
- Door de neutraliserende garens in de voetzool geen last van hinderlijke geur

Tip: kies bij een volle kuit voor JOBST forMen Explore



JOBST® forMen Explore

- Een stoere kous voor de volle kuit
- Door het hoge katoengehalte voelt de kous de hele dag prettig
- Verkrijgbaar in extra lange uitvoering
- Het voetdeel van JOBST forMen is speciaal afgestemd op de mannelijke anatomie

Tip: kies bij een smalle kuit voor JOBST forMen Ambition

