

Cutimed® Epiona

Collageen verband voor wonden waarin de wondgenezing stagneert



Eigenschappen en functies

Cutimed Epiona is een wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van wonden waarin de wondgenezing stagneert. Na absorptie van wondvocht geleert Cutimed Epiona en maakt het collageen goed contact met het wondbed. Proteasen (MMP's), welke in verhoogde concentraties de voortgang van de wondgenezing kunnen verstoren, binden zich aan het wondverband. Hierdoor optimaliseren de omstandigheden voor wondgenezing en wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie gestimuleerd. Cutimed Epiona wordt volledig geresorbeerd.

- ♦ Bindt proteasen (MMP's), welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden
- ♦ Zorgt ervoor dat in stagnerende wonden vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt
- ♦ Veilig en effectief omdat het collageen overeenkomt met de menselijke dermis
- ♦ Kan op maat worden geknipt of worden gescheurd door unieke perforatie

Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Epiona ●○○○ - ●●○○ ☹️ 🟡🟠	5 x 5 cm	73229-02	10	5	16252284
	10 x 10 cm	73229-03	10	5	16252292

Toepassingen ●○○○ - ●●○○ ☹️ 🟡🟠

Cutimed Epiona is geschikt voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert en die vrij zijn van necrotisch weefsel:

- ♦ Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, diabetische ulcera en decubitus
- ♦ Postchirurgische en/of opengesprongen wonden
- ♦ Acute wonden met secundaire wondgenezing

Cutimed Epiona met secundair verband bedekken.