

# Cutimed® Hydro

## Hydrocolloïd



### Eigenschappen en functies

Het hydrocolloïde deel van Cutimed Hydro vormt na absorberen van exsudaat een zachte gel. Deze zachte gel creëert een vochtig wondmilieu en bevordert hierdoor de wondgenezing. Door goede hechting van het hydrocolloïd op de droge huid en hoge waterdampdoorlaatbaarheid van de folie toplaag vindt verdamping van vocht plaats en wordt het risico op verweken van de wondranden minder.

Cutimed Hydro kan eenvoudig in één stuk worden verwijderd met minimale pijn/ongemak voor de patiënt. De matrix formule van het hydrocolloïde materiaal zorgt ervoor dat de meeste gel samen met het verband verwijderd wordt, met als resultaat weinig tot geen schade aan nieuw gevormd weefsel.

Cutimed Hydro biedt een sluitende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De patiënt mag daarom zonder extra bescherming douchen. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan Cutimed Hydro tot 7 dagen op de wond blijven.

Cutimed Hydro bevat geen latex of gelatine.

### Contra indicatie

Cutimed Hydro niet gebruiken op geïnfecteerde wonden.

### Varianten

#### Cutimed Hydro L (Light) ○○○○ - ●○○○ — ■■■

Cutimed Hydro L is dun en transparant. Hierdoor is visuele inspectie van de wond mogelijk zonder het verband te verwijderen.

#### Samenstelling

Cutimed Hydro L bestaat uit een hydrocolloïde contactlaag met een toplaag van een waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film.

#### Toepassingen

Geschikt voor droge tot licht exsuderende, oppervlakkige wonden, zoals schaafwonden en oppervlakkige brandwonden. Tevens geschikt voor het beschermen van wondranden, bijvoorbeeld onder negatieve druktherapie.

#### Cutimed Hydro B (Border)

●○○○ - ●○○○ — ■■■■

Cutimed Hydro B heeft een naar de randen aflopende hydrocolloïde contactlaag. Hierdoor is geen extra kleeflaag voor de randen nodig. De foam heeft extra absorptievermogen. De de foamlag beschermt tegen vocht en bacteriën van buitenaf en laat tegelijk waterdamp door. Cutimed Hydro B is waterdampdoorlatend, beschermt tegen vocht en vuil en wordt als border en als standaard hydrocolloïd gebruikt.

#### Samenstelling

De onderkant van Cutimed Hydro B bestaat geheel uit hydrocolloïd. Hierop is een foam aangebracht, met een toplaag van waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film.

#### Toepassingen

Cutimed Hydro B is geschikt voor licht tot gemiddeld exsuderende wonden, zoals diabetische ulcera, arteriële ulcera, donor sites en ulcus cruris.

## Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
<b>Cutimed® Hydro L (Light)</b> 	5 x 25 cm	72636-00	12	5	15575934
	7,5 x 7,5 cm	72636-01	10	20	15390497
	10 x 10 cm	72636-02	10	20	15390500
	15 x 15 cm	72636-03	5	16	15390519
<b>Cutimed® Hydro B (Border)</b> 	7,5 x 7,5 cm	72635-00	5	20	15390446
	10 x 10 cm	72635-01	5	20	15390454
	15 x 15 cm	72635-02	5	16	15390470
	15 x 18 cm (sacrum)	72635-03	3	16	15390489

## Legenda

### Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

### Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

### Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

### Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden
- Geschikt voor onder de douche