

Cutimed® Sorbact®

Bacteriënbindend wondverband



Eigenschappen en functies

Vanwege het puur natuurkundige werkingsmechanisme bindt en verwijdert Cutimed Sorbact bacteriën en schimmels zonder het vrijkomen van antibacterieel werkende stoffen. De werkzaamheid is gebaseerd op hydrofobe interactie. Cutimed Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. Met iedere verbandwissel worden de gebonden bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd. Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed Sorbact. Samen kunnen we infectiemanagement veiliger maken in elk opzicht.

Altijd een passende oplossing voor elk type wond

1. Kies Cutimed Sorbact voor infectiemanagement 1,2
2. Makkelijk in gebruik
3. Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden, geen contra-indicaties bekend
4. Te gebruiken bij oppervlakkige en diepe wonden die droog, vochtig of (zeer) nat zijn.

Bijvoorbeeld:

- ◆ Complexe wonden; veneuze, arteriële of diabetische ulcera en decubitus
- ◆ Wonden die na een operatie zijn opengesprongen
- ◆ Traumatische wonden
- ◆ Wonden na excisie van fistels en abscessen
- ◆ Dermale schimmelinfecties

Cutimed Sorbact wordt rechtstreeks toegepast op de wond.

Speciaal voor droge (diepe) wonden is er Cutimed Sorbact gel geïmpregneerd met hydrogel. Dit bacteriënbindend kompres creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor ook het autolytisch debridement.

Varianten

Cutimed® Sorbact®



absorberend wondverband

Bacteriënbindend absorberend wondverband

Cutimed® Sorbact® kompres



Bacteriënbindend (acetaat) kompres

Cutimed® Sorbact®



gaasstrook

Bacteriënbindende (katoen) gaasstrook

Cutimed® Sorbact® gel



Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel

Cutimed® Sorbact®



Hydroactive B (border)

Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand

Cutimed® Siltec® Sorbact®



Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border

Cutimed® Sorbion® Sorbact®



Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag

Cutimed® Sorbact® Depper



Bacteriënbindende depper

Overige eigenschappen

- ◆ Geen contra-indicaties bekend*
- ◆ Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter
- ◆ in de wond
- ◆ Laag risico op allergieën
- ◆ Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden
- ◆ Geschikt voor langdurige behandeling
- ◆ Geen opbouw van resistentiemechanisme bekend

* Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen

1 Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

2 Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

Assortiment

Omschrijving	Artikel-nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Cutimed Sorbact absorberend wondverband 	72161-01	7 x 9 cm	5	16	14982269
	72162-01	10 x 10 cm	5	16	14982277
	72163-00	10 x 20 cm	20	2	14982234
Cutimed Sorbact kompres 	72164-01	4 x 6 cm	5	24	14982285
	72165-01	7 x 9 cm	5	24	14982293
Cutimed Sorbact gaasstrook 	72166-00	2 x 50 cm	20	6	14982242
	72167-00	5 x 200 cm	10	6	14982250
Cutimed Sorbact gel 	72611-00	7,5 x 7,5 cm	10	36	15299201
	72611-01	7,5 x 15 cm	10	20	15299228
	72611-16	15 x 20 cm	5	8	16860853
Cutimed Sorbact Hydroactive B (Border) 	79933-00	7 x 8,5 cm	10	10	15833410
	79933-02	14 x 14 cm	10	10	15833445
	79933-03	19 x 19 cm	10	10	15833488
	79933-04	14 x 24 cm	10	10	15833453
Cutimed Siltec Sorbact  ovaal sacrum sacrum	73251-00	7,5 x 7,5 cm	10	10	15802205
	73251-14	10 x 22,5 cm	10	10	16595912
	73251-01	12,5 x 12,5 cm	10	10	15802213
	73251-02	15 x 15 cm	10	10	15802221
	73251-03	17,5 x 17,5 cm	5	10	15802248
	73251-04	22,5 x 22,5 cm	5	10	15802256
	73251-18	7 x 10 cm	10	10	16595920
	73251-05	17,5 x 17,5 cm	5	10	25802264
	73251-06	23 x 23 cm	5	10	15802272
Cutimed Sorbion Sorbact 	72698-00	10 x 10 cm	10	12	16187172
	72698-01	10 x 20 cm	10	6	16187180
	72698-02	20 x 20 cm	10	4	16187199
	72698-03	20 x 30 cm	10	4	16187202
Cutimed Sorbact depper 	72168-00	deppers	70 (14 x 5)	6	14982412

Legenda

Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht

Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche