

Cutimed® Sorbion®

Superabsorberend wondverband



Eigenschappen en functies

Cutimed Sorbion is een superabsorberend wondverband voor de behandeling van wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Cutimed Sorbion heeft een gelvormende kern van superabsorbers (gelvormende polymeren) en cellulosevezels die wondvocht verticaal opneemt en vasthoudt.

Cutimed Sorbion wordt goed verdragen door de huid.

- Direct na opname van wondvocht wordt het verband soepel en vormt zich naar het wondbed
- De gelvormende kern creëert een vochtig wondmilieu
- Het verband blijft stabiel en in vorm, hoe verzadigd het ook is
- Door uitstekende retentie (ook onder compressie) wordt maceratie van de wondranden en lekkage voorkomen
- Geabsorbeerd wondvocht met micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) worden gebonden en ingesloten
- Ondersteunt autolytisch debridement

Cutimed Sorbion creëert optimale omstandigheden voor wondgenezing.

Toepassingen

Cutimed Sorbion is geschikt voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven:

- Chronische wonden zoals veneuze, diabetische ulcera of decubitus
- Acute wonden met secundaire wondgenezing
- Oncologische ulcera
- Postoperatieve wonden
- Open buikwonden

Cutimed Sorbion moet na maximaal 7 dagen worden vervangen, afhankelijk van de klinische toestand.

Varianten

Het Cutimed Sorbion assortiment biedt 3 varianten, beschikbaar in vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant.

Cutimed Sorbion Sachet

De polypropyleen wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sachet verwijderd op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel (soft debridement).

Cutimed Sorbion Sachet is verkrijgbaar in standaard maten en:

- XL: voor grote oppervlakten, bijvoorbeeld benen, borstkas of buik.
- Multi Star: flexibele, ronde vorm, bijvoorbeeld voor hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen
- S Drainage: voor bijvoorbeeld catheters en drains

Cutimed Sorbion Border

Cutimed Sorbion Border heeft dezelfde wondcontactlaag als Cutimed Sorbion Sachet (voor softdebridement) en een siliconen border voor snelle, betrouwbare fixatie en atraumatische verwijdering

Cutimed Sorbion Sana









De polyethyleen wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sana voorkomt verkleving aan het wondbed en is daarmee uitermate geschikt voor matig vochtige wonden.

Cutimed Sorbion Sana is verkrijgbaar in standaard maten en:

- XL
- Multi Star

Beide zijden van Cutimed Sorbion Sachet en -Sana zijn geschikt voor contact met het wondbed.

Assortiment

		Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement)		7,5 x 7,5 cm	73232-00	10	62	16187962
		7,5 x 7,5 cm	73232-01	25	34	16187970
		10 x 10 cm	73232-06	10	62	16187989
		10 x 10 cm	73232-07	25	34	16187997
		10 x 20 cm	73232-09	10	34	16188020
		10 x 20 cm	73232-10	25	23	16188039
		15 x 15 cm	73232-12	10	36	16188004
		15 x 15 cm	73232-13	25	14	16188012
		20 x 20 cm	73232-15	10	22	16188047
		20 x 20 cm	73232-16	25	12	16188055
		20 x 30 cm	73232-18	10	17	16188063
Multi Star		ø 8 cm	73237-01	10	-	16188098
		ø 14 cm	73237-03	10	-	16188101
XL		25 x 45 cm	73240-00	10	-	16188071
S Drainage		10 x 10 cm	73241-00	10	76	16211723
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels		10 x 10 cm	71010-00	10	32	17159814
		15 x 15 cm	71010-02	10	14	17159849
		20 x 20 cm	71010-03	10	12	17159857
		10 x 23 cm	71010-04	10	20	17159865
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag.		8,5 x 8,5 cm	73233-00	10	62	16188128
		12 x 12 cm	73233-03	10	62	16188144
		12 x 12 cm	73233-04	25	18	16188152
		12 x 22 cm	73233-06	10	34	16188160
		12 x 22 cm	73233-07	25	10	16188179
		22 x 22 cm	73233-09	10	22	16188187
Multi Star		ø 11 cm	73238-01	10	62	16188195
		ø 17 cm	73238-03	10	36	16188209
XL		28 x 48 cm	73278-00	5	10	17089549

Cutimed Sorbion Sachet S is ook verkrijgbaar per 50 stuks. Scan de QR code voor het volledige assortimentsoverzicht:

