

GELOSTRETCH® LATEXVRIJ

ZINKGEL-ZWACHTEL MET ZEER HOGE
WERKDRUK EN ZEER LAGE RUSTDRUK.
MAKKELIJK AAN TE LEGGEN.



NIETS HOUDT JE TEGEN



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Gelostretch koppelt moderne materiaaleigenschappen en praktische voordelen aan het therapeutische effect van het traditionele zinklijmverband. Het dragermateriaal is samengesteld uit natuurlijke materialen.

Omdat het geen terugkerend vermogen heeft, kan Gelostretch zelfs bij moeilijke anatomische vormen met doorlopende zwachteltoeren worden aangelegd, zonder dat er plooiën of insnoeringen ontstaan.

Gelostretch hoeft niet in- of afgeknipt te worden tijdens het aanbrengen. Omdat Gelostretch met cellulose is geïmpregneerd in plaats van gelatine, zoals bij de conventionele zinklijm-zwachtels, is Gelostretch perfect modelleerbaar. Bovendien droogt het verband snel. Omdat Gelostretch zinkgel niet afgeeft, druipst of aan de handen plakt, is het verband vlekkeloos aan te leggen. U heeft dus geen handschoenen nodig. Na het drogen is de zwachtel bijzonder duurzaam.

Het dragermateriaal bestaat uit 76% viscose en 24% katoen. De zinkgel is op basis van cellulose. Gelostretch mag niet boven de 25 graden celsius worden bewaard en kan niet hergebruikt worden.

TOEPASSINGEN

- als compressieverband bij patiënten met chronisch veneuze insufficiëntie zoals ulcus cruris en aderontsteking
- bij de behandeling van stase dermatitis
- bij de behandeling van eczeem aan de ledematen

CONTRA-INDICATIES

- vergevorderde insufficiëntie van de perifere slagaderen EAI < 0,5
- overgevoeligheid voor zink

ASSORTIMENT

Gazofix	Artikelnummer	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
Gelostretch 10 x 10 cm	45297-00	10	4 x 10 (40)	n nb	n nb