

Fixomull® transparent

Transparente volvlakfixatie

Eigenschappen en functies

Fixomull transparent is een transparante folie op rol voor de fixatie van wondverband met groot formaat of voor grote oppervlakten. Hierdoor kan de patiënt zonder verdere bescherming onder de douche en/of in bad. De folie beschermt de wondomgeving tegen vuil, vocht en bacteriën van buitenaf.

Het productontwerp helpt om het risico op spanningsblaren te verminderen. De huid krijgt ruimte om te ademen, en in combinatie met de huidvriendelijke kleeflaag wordt dit product zelfs bij een gevoelige huid goed verdragen. Fixomull transparent kan snel en makkelijk aangebracht en verwijderd worden, zonder lijmresten achter te laten.

Fixomull transparent is dun en voorkomt wrijving. Fixomull transparent hoeft voor radiologisch onderzoek niet verwijderd te worden.

Dragermateriaal

Dunne polyurethaanfolie

Kleefmassa

Huidvriendelijk polyacrylaat

Toepassingen

- Fixatie van geavanceerde wondverbanden, kompressen, gazen, etc.
- Betrouwbare fixatie van sondes, tubes, katheters, etc.



Assortiment

Fixomull® transparent				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
10 m x 5 cm	72216-00	1	1 x 12 (12)	15044726
10 m x 10 cm	72216-01	1	1 x 12 (12)	15044734
10 m x 15 cm	72216-02	1	1 x 12 (12)	15044742
2 m x 10 cm	72217-00	1	1 x 12 (12)	15044718


Leukoplast®

Wound care in best hands

Aanbrenginstructie


Fixomull® transparent

1.

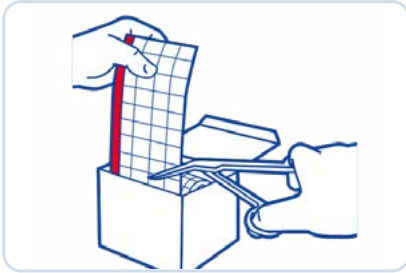

Knip Fixomull transparent af op de gewenste maat. **Tip:** werk bij een groot oppervlak met meerdere smalle stroken in plaats van één groot stuk.

2.

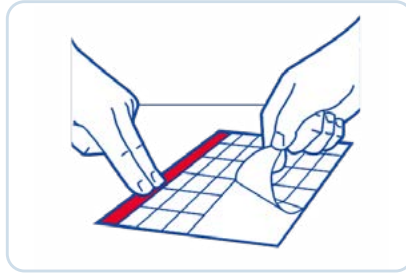

Het schutblad heeft twee helften. Verwijder eerst de helft zonder de rode rand.

3.



Plaats de folie over het wondverband en wrijf deze goed aan, vooral bij de randen en hoeken. Warmte laat de folie beter plakken.

4.



Verwijder de andere helft van het schutblad door deze terug te vouwen en evenwijdig aan de huid af te rollen. Wrijf de folie ook hier goed aan, vooral op de randen en hoeken. Dit deel van het schutblad blijft vastzitten aan de rode rand...

5.



...verwijder het schutblad samen met de bovenste bescherm laag voorzichtig vanaf de zijde met de rode rand evenwijdig aan de huid.

6.



Wrijf de folie voor de laatste keer overal goed aan.

Verwijderen: Maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwijdig aan de huid, in de groeirichting van haren, uit te rekken is de folie pijnloos te verwijderen. Ondersteun het vastzittende deel van de folie om trekkracht op de huid (en blaarvorming) te voorkomen.