

# Leukomed® I.V. / Leukomed® I.V. Film

## Infuuspleister

### Eigenschappen en functies

---


#### Leukomed I.V.

Deze non-woven infuuspleister is plooibaar en huidvriendelijk. De polyacrylaat kleefmassa biedt een betrouwbare en huidvriendelijke fixatie. Het extra wondkussen kan gebruikt worden om te deppen of als extra kussen onder de vleugels van de infuusnaald, om de huid te beschermen.

#### Leukomed I.V. film

De transparante infuuspleister Leukomed I.V. film houdt een infuus of naald tot 7 dagen op zijn plaats en verkleint het risico van besmetting van de wond. Het product laat de huid ademen en kan gemakkelijk verwijderd worden zonder residu achter te laten. De transparante infuuspleister Leukomed I.V. film is ademend, waardoor vochtophoping wordt tegengegaan. Tegelijk garandeert de huidvriendelijke kleefmassa een betrouwbare fixatie. De patient kan zonder extra bescherming onder douche.

Leukomed I.V. film hoeft niet verwijderd te worden voor inspectie. Daarnaast heeft Leukomed I.V. film extra fixatiestrips om de infuusfixatie nog betrouwbaarder te maken en een label om op te schrijven voor extra gemak.

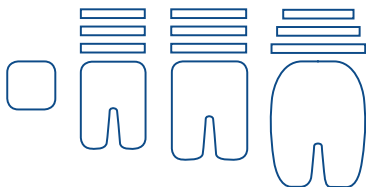

Leukomed I.V. film is verkrijgbaar in 4 maten.

Omdat Leukomed I.V. en Leukomed I.V. Film geen stralingsabsorberende bestanddelen bevatten, hoeft de hechtpleister niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek.

Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics.

#### Dragermateriaal

Leukomed I.V. is gemaakt van soepele en zachte non-woven.

Leukomed I.V. film is gemaakt van flexibele polyurethaanfolie.

#### Kleefmassa

Huidvriendelijk polyacrylaat

### Toepassingen

---

- Fixatie van perifere veneuze katheters (infuus)



**Leukoplast®**

Wound care in best hands


## Assortiment

Leukomed® I.V. / Leukomed® I.V. film				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
<b>Leukomed I.V.</b>				
5,8 x 8 cm - per 50	72389-00	1	8 x 1 (8)	15147363
<b>Leukomed I.V. film</b>				
4,5 x 4,5 cm - per 50	72390-04	1	10 x 1 (10)	15653307
6 x 8 cm - per 50	72390-00	1	8 x 1 (8)	15688240
7 x 9 cm - per 50	72390-05	1	6 x 1 (6)	15653315
8,5 x 11,5 cm - per 50	72390-03	1	6 x 1 (6)	15653323

# Aanbrenginstructie


## Leukomed® I.V. / Leukomed® I.V. film

1.

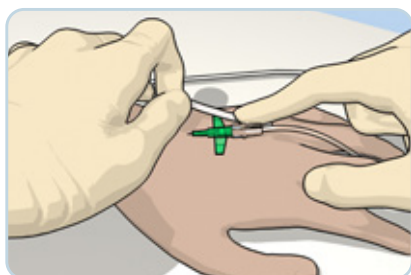


Fixeer de infuusnaald indien gewenst met de fixatiestrips. Deze zijn geplakt op het grote schutblad.

2.

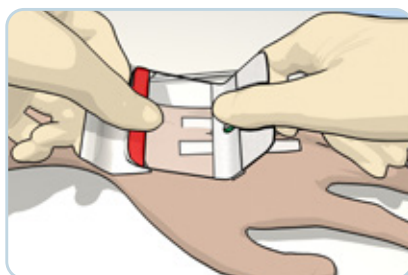


Verwijder het grote schutblad aan de onderzijde en plaats de folie over de insteekopening.

3.

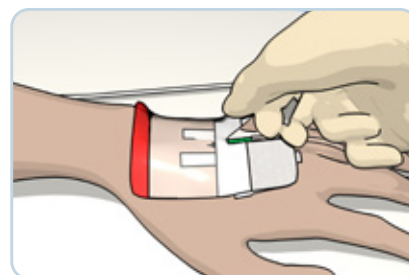

Verwijder de overige twee schutbladen en fixeer de infuusnaald op de huid.

4.

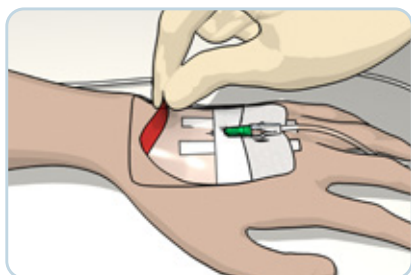

**Verwijderen:** maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwijdig aan de huid uit te rekken is de folie patiëntvriendelijk te verwijderen.